

L'impiego della medicazione in schiuma ALLEVYN[®] GENTLE BORDER è risultato idoneo a svariate tipologie di ferita, consentendone altresì una riduzione delle dimensioni

Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44.

Disponibile in: [Wounds UK](https://www.wounds-uk.com/)

Punti salienti

Alla valutazione finale (dopo 4-6 sostituzioni della medicazione), con l'uso della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER:



*Ferite non superficiali

Overview

- Valutazione clinica multicentrica delle caratteristiche della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER nella gestione di svariate tipologie di ferite in diversi contesti clinici (inclusi centri specializzati nella cura delle ferite, ospedali e ambulatori locali)
- Fra le varie tipologie di ferita: ulcere da decubito, ulcere venose degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico, ustioni, siti di donazione, ferite fungiformi/maligne e ferite chirurgiche in deiscenza
- Sono stati reclutati 153 pazienti in sei Paesi
- L'obiettivo primario era valutare l'idoneità complessiva della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER per le indicazioni trattate nell'arco di 4-6 sostituzioni
- Gli obiettivi secondari erano la valutazione delle caratteristiche della medicazione, variazioni negli esiti della ferita e la soddisfazione dei medici

Risultati

- Al termine dello studio il 33% delle ferite (51 su 153) risultava guarito
- Sono state ottenute riduzioni significative, rispetto alla valutazione iniziale, dell'area media della ferita (69%; $p < 0,001$) e della profondità media per le ferite non superficiali (63%; $p < 0,001$)
- Nel complesso, è stata osservata una riduzione significativa rispetto alla valutazione iniziale dei livelli di essudato della ferita ($p < 0,001$)
 - Sono state riportate riduzioni per il 64% dei pazienti
- In totale, il 93% dei pazienti non ha riportato dolore alla rimozione della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER (542 valutazioni su 583; Figura)
- Il tempo di utilizzo medio della medicazione è stato 3,6 giorni ($n = 111$; intervallo 0,6 – 7,0) e il motivo della sostituzione della medicazione è stato "trattamento di routine" per l'83% (494 su 593) delle valutazioni
- La medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER aderiva completamente prima della sostituzione nel 76% delle valutazioni (454 su 596 sostituzioni)
- I medici hanno giudicato la medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER idonea alla tipologia di ferita trattata nel 95% dei pazienti

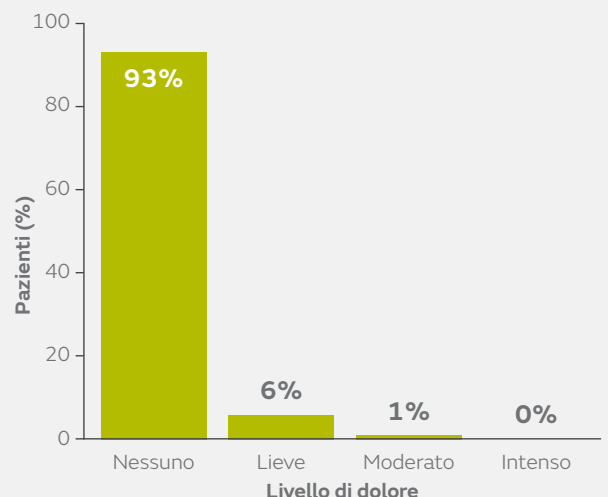


Figura. Livello di dolore alla rimozione della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER ($n = 583$ valutazioni)

Conclusioni

L'uso della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER è risultato idoneo a svariate tipologie di ferita in diversi contesti clinici e ha consentito riduzioni dell'area e della profondità della ferita.

Per informazioni dettagliate sui prodotti, comprese indicazioni d'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le Istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'impiego.