

- Sonderform für den Sakralbereich
- Keine Sekundärfixierung nötig
- Duschfest
- Mit EXULOCK[◇]- und EXUMASK[◇]-Technologie



- + Für Wunden mit schwacher bis starker Exsudation im Sakralbereich
- + Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet

Anwendung



1

- Erste Schutzfolie entfernen und die haftende Seite des Verbandes auf die Haut anlegen



2

- Das schmale Ende mindestens 2 cm über dem After platzieren
- Den Verband über dem Sakrum glätten



3

- Verbleibende Schutzfolien abziehen
- Verband glatt streichen
- Sicherstellen, dass das Wundkissen die Wunde abdeckt
- Verband nicht dehnen



4


- Ränder glatt streichen und dabei Falten vermeiden, die die Abdichtung beeinträchtigen können
- Der Verband kann bei Bedarf repositioniert werden

Entfernung

Den oberen Rand anheben und bis zur vollständigen Entfernung langsam Richtung Anus abziehen. Dadurch wird das Risiko einer Infektionsübertragung reduziert.

Wechselhäufigkeit

- Während der frühen Stadien der Behandlung den Verband häufig kontrollieren
- Sakralverbände können bis zu 5 Tage angelegt bleiben
- Verbände sollten je nach Zustand der Wunde und der umliegenden Haut gewechselt werden oder wenn das Exsudat 75 % des Wechselindikators bedeckt
- Verbandwechsel erwägen, wenn das Exsudat mehr als 50 % des Wechselindikators bedeckt

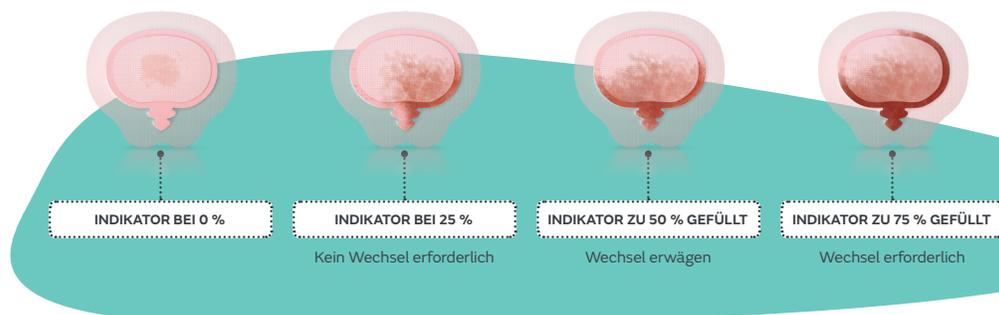

Die Grafik dient zur Orientierung. Die Entscheidung über den Zeitpunkt des Wechsels sollte je nach klinischer Beurteilung und vor Ort geltenden Protokollen getroffen werden.

Pharmazentralnummer (PZN)	Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundaufgabe	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
0249 5000	66801306	17,2 cm x 17,5 cm	12,4 cm x 8,5 cm	60 Stück (6 OP)	10 Stück
0249 5129	66801307	21,6 cm x 23 cm	17,0 cm x 12,3 cm	40 Stück (4 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*, PZN: Pharmazentralnummer Deutschland

Kontakt Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 30
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich
Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Schweiz
Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

◇ Warenzeichen von Smith+Nephew
Alle Marken anerkannt
© Mai 2024 Smith+Nephew
AWM-AWC-26662v2 | GMC1209-de | P240116

Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichts- und Warnhinweise, entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts.

Hersteller: Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hesse Rd, Hull HU3 2BN England

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

www.wundervoll-versorgt.de