

様

## 退院後の創の管理について

退院前の画像

月 日

使っている・貼っているもの

ハイドロ ジェントルエイド®

貼っている場所、傷



## 交換する日、頻度

月 日 ( )、日 ( )、日 ( )

※ 1週間に 回 交換

## 交換手順

はがし方




端を持って、ゆっくりはがします。

貼り方



透明の裏紙を剥がします。

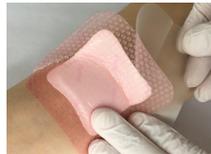

粘着剤がついているパッド部分をキズにのせて密着させ、残りの裏紙を剥がします。



しわにならないように全体を密着させます。

しわになった部分は、一度剥がして貼り直すことができます。

## 交換するときに確認してほしいこと

- キズが赤くなっていますか？       キズから出る液が増えていませんか？  
 キズから血は出ていませんか？       キズの痛みが増していませんか？

## 病院に連絡してほしい状態



キズの周りが赤い



キズから液がたくさん出る



キズが大きくなった

- 痛み止めを飲んでもキズの痛みが治まらない
- キズから出る液がにおう
- キズから血がたくさん出る

連絡場所

電話番号