


El uso del apósito de espuma ALLEVYN[®] GENTLE BORDER fue adecuado para una variedad de tipos de heridas y resultó en reducciones en el tamaño de la herida

Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44.

Disponible en: [Wounds UK](http://WoundsUK)

Puntos clave

En la evaluación final (tras 4 a 6 cambios de apósito), con el uso del apósito ALLEVYN GENTLE BORDER:

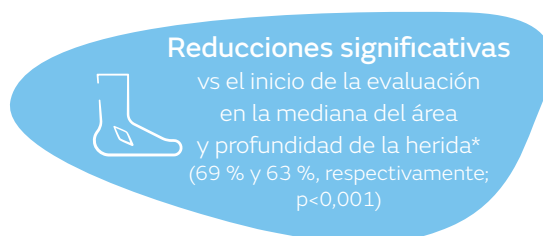


*Heridas no superficiales

Descripción general

- Evaluación clínica multicéntrica del desempeño del apósito ALLEVYN GENTLE BORDER en la gestión de una diversidad de heridas en una variedad de entornos clínicos diferentes (incluidas clínicas especializadas en heridas, hospitales y atención primaria)
- Los tipos de herida incluyeron lesiones por presión, úlceras venosas de pierna, úlceras de pie diabético, quemaduras, zonas donantes, heridas fungiformes o malignas y heridas con dehiscencia quirúrgica
- Se inscribieron 153 pacientes en seis países
- El objetivo principal era evaluar la aceptabilidad clínica general del apósito ALLEVYN GENTLE BORDER para las indicaciones tratadas durante 4 a 6 cambios de apósito
- Los objetivos secundarios incluyeron la evaluación de las características de desempeño del apósito, cambios en los resultados de la herida y la satisfacción de los profesionales sanitarios

Resultados

- Para el final del estudio, el 33 % de las heridas de los pacientes (51 de 153) habían cicatrizado
- Se consiguieron reducciones significativas desde el momento inicial en la mediana del área de la herida (69 %; p<0,001) y la mediana de la profundidad para heridas no superficiales (63 %; p<0,001)
- En general, hubo una reducción significativa desde el inicio de la evaluación en los niveles de exudado de la herida (p<0,001)
 - Se notificaron reducciones para el 64 % de los pacientes
- En total, el 93 % de los pacientes no comunicó ningún dolor en la retirada del apósito ALLEVYN GENTLE BORDER (542 de 583 evaluaciones; figura)
- El tiempo de uso medio del apósito fue de 3,6 días (n=111, intervalo, 0,6-7,0) y el motivo del cambio de apósito fue «de rutina» en el 83 % (494 de 593) de las evaluaciones
- El apósito ALLEVYN GENTLE BORDER estaba completamente adherido antes del cambio de apósito en el 76 % de las evaluaciones (454 de 596 cambios de apósito)
- Los profesionales sanitarios calificaron el apósito ALLEVYN GENTLE BORDER como adecuado para el tipo de herida a tratar en el 95 % de los pacientes

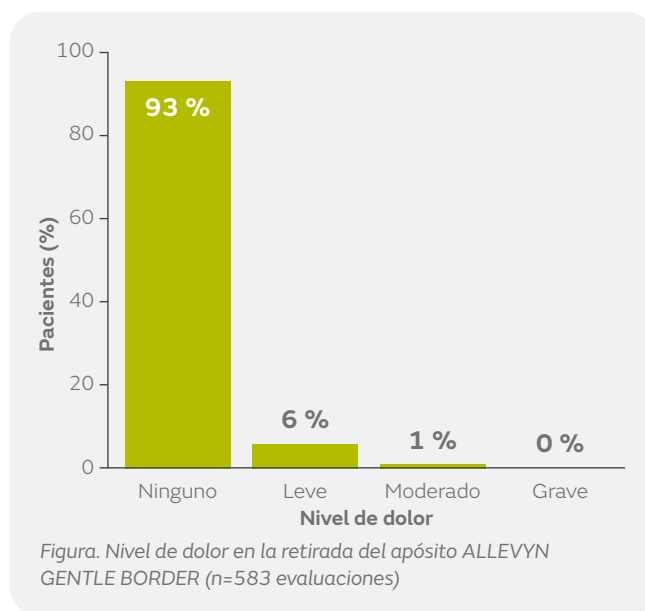

Conclusiones

El uso del apósito de espuma ALLEVYN GENTLE BORDER fue adecuado para una variedad de tipos de heridas en varios entornos clínicos, y resultó en reducciones en el área y profundidad de la herida.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso aplicables al producto antes de utilizarlo.