

L'utilizzo della medicazione in schiuma ALLEVYN[®] LIFE su una varietà di tipi di ferite, livelli di essudato e contesti assistenziali ha ricevuto valutazioni di soddisfazione elevate, il che potrebbe avere un impatto positivo sulla guarigione delle ferite e sul benessere del paziente.

+Punti di forza



Overview

- Valutazione prospettica non comparativa delle medicazioni ALLEVYN LIFE in diversi contesti assistenziali
- Un questionario è stato compilato per ciascun medico al momento dell'inizio, del cambio della medicazione e della sospensione del trattamento
- I pazienti hanno ricevuto la medicazione ALLEVYN LIFE per un massimo di quattro cambi o 14 giorni (la durata media di utilizzo è stata di 4 giorni)
- Sono state incluse ferite non infette di vario tipo e con diversi livelli di essudato (n=148); la maggior parte era localizzata agli arti inferiori (79,6%)

Risultati

- Rispetto al basale, l'area, la profondità e il volume della ferita si sono ridotti in modo significativo dopo l'utilizzo della medicazione ALLEVYN LIFE ($p < 0,001$).
- La maggior parte dei clinici (86%) ha espresso soddisfazione per l'utilizzo della medicazione ALLEVYN LIFE
 - la facilità di applicazione/rimozione (98%) e la conformabilità (91%) hanno ricevuto le valutazioni più alte
 - oltre il 50% ha indicato che ALLEVYN LIFE presenta caratteristiche preferibili rispetto a quella abitualmente utilizzata.
- La maggior parte dei pazienti (83%) ha riferito soddisfazione nell'utilizzo della medicazione ALLEVYN LIFE
 - Comfort, protezione della ferita e dolore alla rimozione sono stati gli aspetti con i punteggi di soddisfazione più elevati (figura)
 - oltre il 55% ha indicato che le caratteristiche della medicazione risultano positive rispetto a quella abitualmente utilizzata (48% per la capacità di mascherare gli odori).
- L'utilizzo della medicazione ALLEVYN LIFE ha avuto un impatto positivo sulla gestione quotidiana della ferita nel 45% delle valutazioni.



Conclusioni

La soddisfazione dei clinici e dei pazienti nei confronti della medicazione ALLEVYN LIFE è risultata elevata, il che potrebbe avere un impatto positivo sulla guarigione delle ferite e sul benessere del paziente.

Referenze

*Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN[®] LIFE. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95.
Disponibile su : [Wounds UK](https://www.wounds-uk.com)

Per informazioni dettagliate sul prodotto, comprese le indicazioni d'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le relative Istruzioni per l'Uso (IFU) prima dell'utilizzo.