

Smith+Nephew

ソフトフォーム ドレッシングを
ご使用いただく
患者さんとそのご家族へ



全国15施設以上の
大学病院で採用！

*2025年1月時点

① ソフトフォーム について

ソフトフォーム ドレッシング（以下ソフトフォーム）は、通気性と素材のやわらかさを重視した、ポリウレタンフォームドレッシングです。皮膚に触れる部分はシリコーン粘着のため、はがす時の刺激が少ない製品です。



薄くてやわらかい素材

約2mm厚のポリウレタンフォームドレッシング



蒸れにくい使用感

トップフィルムがなく通気性が高い



様々な用途に適用

カットして使える大判サイズ（15×30cm）



①ソフトウェアについて

「もっと使い勝手の良い製品が欲しい」

「夏の暑い時期もムレずに傷を覆いたい..」

そんな患者様のお声・ご要望をもとに、
10年の開発期間を経て製品化に至りました。

表皮水疱症友の会であるDebRA Japan様にも
開発に多大なご協力をいただき、使いやすさと快適
さにこだわった製品となっております。

ご存じですか？



表皮水疱症 友の会
DebRA Japan

NPO法人 表皮水疱症友の会（患者会）は、
病気の理解を広める活動をしながら、全国の病友と
ご家族を支援しています。また、学習会の開催や生
活支援ガイドブック等も制作されています。

全国で毎年、EBの赤ちゃんが誕生して
います。退院後の育児・生活・創傷ケア
などに悩まれるご家族も少なくありませ
ん。是非友の会の情報をご案内ください。



 **DebRA Japan**
Webサイト


② ソフトフォームの貼り方

① 必要なサイズを準備します。

(傷の大きさよりも一回り大きめが目安です)




首や肘など曲げ伸ばしする部位

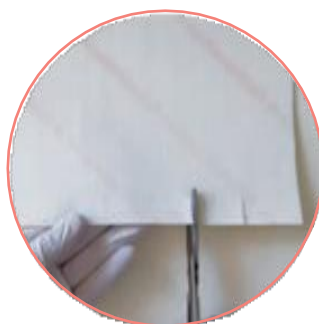

辺縁に切れ込みを入れておくと、
曲面に沿わせて
貼りやすくなります。

② 裏面の透明フィルムを剥がし、傷へ貼付します。

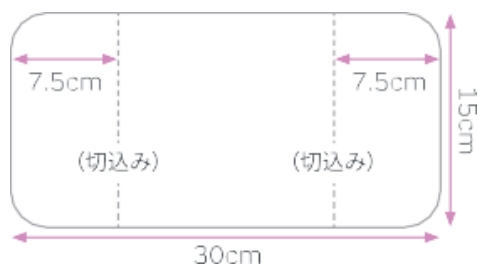

裏面の透明フィルムには、
左右2ヶ所に切れ込みが入っています。

③ 傷の状態や滲出液量により、 二次ドレッシングや固定方法を検討します。

どのような傷に適しているか？

浅い傷や治りかけの傷など、 滲出液が少ない傷に適しています！

通気性と素材のやわらかさを重視し、
トップフィルムはありません。
滲出液が多い時期は二次ドレッシングが必要です。



使用例

1 頸部～肩部への貼付



ソフトフォームの辺縁に切れ込みを入れておくと、
曲面でも剥がれにくくなります。

2 手指や手首、足首への貼付



手首や足首などの可動部位においても、
適度な密着感で貼付が可能です。

ドレッシング材同士がくっつきましますので、
一時的な固定が可能です。
ただし、使用する部位や状況に応じて、
固定方法は適宜ご検討ください。

写真提供：北海道大学大学院医学研究院皮膚科学教室 准教授 夏賀 健 先生

ソフトフォームによくある質問にお答えします。

Q. ソフトフォームはどんな傷に使えますか？

A. 浅い傷や治りかけの傷など、滲出液の量が少ない時期に適しています。
ソフトフォームはトップフィルムがないため、滲出液の量が多いと、上から染み出してくるのでご注意ください。



多量



中等量



少量

滲出液が多い時期や傷が感染している状態の際にご使用される場合には、ガーゼやメロリンなどの二次ドレッシングなどを併用してください。



③ソフトフォーム Q&A

Q. どんな場合・部位に向いていますか？

A. 「巻いて貼りたい（ドレッシング材同士がくっつく）」、「貼付時のムレをなくしたい」場合などにおすすめです。

	ソフトフォーム
吸収性	△
全周・重ね貼り	◎
通気性・ムレにくさ	◎
肌への密着感	○
剥がす時の痛み	○（少ない）

*自社におけ存真皮用ドレッシング材との比較



特定保険医療材料のご紹介 ※保険適用製品

ハイドロサイト[®]シリーズ

粘着の有無や粘着剤の違い、銀含有の有無など、状態に応じてご選択いただけます。



ハイドロサイト シリーズ
製品詳細・解説はコチラ！

自由にカットでき、剥がしやすい非固着性



自由に **固定**

(粘着剤なし)

ハイドロサイト プラス

しっかり固定できるアクリル系粘着剤



しっかり **固定**

(アクリル系粘着剤)

ハイドロサイト
AD プラス

肌への刺激が少ないシリコーン粘着剤



やさしく **固定**

(シリコーン粘着剤)

ハイドロサイト
AD ジェントル

シリコーン粘着剤に銀をプラス




やさしく **固定**

(シリコーン粘着剤)

ハイドロサイト
ジェントル 銀

ハイドロサイト プラスは非固着性です
(粘着剤はついていません)

サイズが豊富で20×20cmや
超特大の40×70cmは広範囲
を簡単に覆えます。

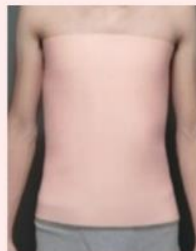

ハイドロサイト ライフ

吸収力とクッション性が高い製品です。膝や足裏など、クッション性が必要な時に適しています。



ハイドロサイト 薄型

伸縮性に優れ、手指や耳の後ろなど、屈曲部位に追従します。剥がす時は濡らしながら剥がして下さい。



ハイドロサイト ライフ
製品詳細・解説はコチラ！

化粧品・非償還品のご紹介 ※患者様ご自身でご購入いただける製品

セキューラ◇シリーズ



セキューラ
製品詳細・解説はコチラ！



全身用保湿ローション
セキューラ ML

保湿

無香料

全身の皮膚を乾燥からまもります。

- のびがよく、少量で広範囲に塗れます。
- 使用後は潤いを保ちつつサラサラです。
- 塗布後にテープやフィルム材が貼れます。



弱酸性洗浄料
セキューラ CL

洗浄

刺激を抑え
汚れを手早く落とす
スプレー式。

皮膚と同じ弱酸性。外出時の洗浄に便利です。



保湿クリーム
セキューラ DC

保湿

保護

うるおいを与えて
皮膚を保護。
撥水効果も備えます。

クリームタイプ。保湿をしながら撥水もします。



撥水性ジェル
セキューラ PO

保護

保湿

撥水性の被膜により
皮膚をまもります。

セキューラ DCよりも撥水性の高いジェルタイプ。失禁時の皮膚を保護します。

軟膏処置時や二次ドレッシングとして
使用する三層構造の高機能ガーゼ

創部に固着しにくい吸収性ガーゼ

メロリン◇

ガーゼより吸収量が高い
コットン／ポリエステル繊維

水分や汚れが染み込みにくい
撥水性ポリエステル不織布

創部に固着しにくい
多孔性ポリエステルフィルム



絆創膏に、ワンランク上の優しさを

ハイドロ ジェントルエイド◇

- ふんわりパッドで傷を優しくまもる
- 肌への刺激が少ないシリコーン粘着剤
- 最長7日間*継続して使用可能
- 濡れても剥がれにくい

* 創を観察し、滲出液の量に応じて適宜交換して下さい。



Q. 使用されている患者さまのお声は？

A. 下記のようなご評価を伺っております。

ソフトフォーム を使用された 患者さまの声*

表皮水疱症患者さまの滲出液が少ない創傷に使用しました。患者さまは、日頃から創の状態に応じた創傷被覆材を選択して管理されていますが、首や肩、手首、足首などの曲面は創傷被覆材の厚みや硬さがあると皮膚に沿わせにくく、浮いたり剥がれたりすることがあるようです。

その点、**ソフトフォームは適度な厚みとやわらかさ、密着感がとても良い**とのことでした。

また、トップフィルムがないので、全身に創傷被覆材を貼付するこの患者さまにおいては、**夏の暑い時期は蒸れやすいため通気性の良い製品を望んでいた**という声も聞かれました。

*使用評価時の医師による聞き取り（2022年10月実施）



ハイドロサイト AD ジェントル	承認番号	22100BZX00942000
ハイドロサイト ジェントル 銀	承認番号	22500BZX00409000
ハイドロサイト AD プラス	承認番号	22100BZX01096000
ハイドロサイト プラス	承認番号	22100BZX01097000
ハイドロサイト ライフ	承認番号	22600BZX00209000
ハイドロ ジェントルエイド	届出番号	13B1X10222WC0016
ハイドロサイト 薄型	承認番号	21900BZX00491000
メロリン	届出番号	13B1X10222WC0006
メロリン（未滅菌）	届出番号	13B1X10222WC0005



ソフトフォーム ドレッシング

保険適用

製品番号	サイズ (cm)	保険算定 面積 (cm ²)	枚／箱
33000137	15×30	450	10

管理医療機器

局所管理フォーム状創傷被覆・保護材

JMDNコード：11323002

医療機器認証番号：303ADBZX00025000

【警告】

〈適用対象(患者)〉明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。

[感染を悪化するおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。]

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉再使用禁止

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755
 仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652
 東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916
 名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420
 大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993
 広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325
 福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

°Trademark of Smith+Nephew

© 2022-2024 Smith+Nephew

SF-2
202403-4