

洗浄・保護・保湿・非アルコール性被膜剤

セキュラ◇

粘着剥離除去剤

リムーブ

+ ひとつ上のやさしさへ。

Smith+Nephew

SECURA◇

Skin Care

REMOVE

Adhesive Remover



保湿 Moisturize

保湿ローション

セキュラ[◇] ML

塗った上からテープも貼れる、
無香料でのびのよい保湿ローション。

- ✓ 多用途・広範囲に使用可能
- ✓ 塗りやすく、べとつきません
- ✓ 片手で使えるボトルタイプ


POINT 塗布後にテープやフィルム材が貼れます



セキュラ MLを塗布



その上から貼れます

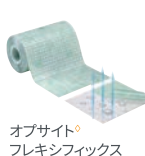

オプサイト[◇]
フレキシフィックス



オプサイト[◇]
ジェントルロール



乾燥しやすい部位や全身に お使いいただける保湿ローション

- 1 皮膚の乾燥しやすい方やお年寄りの全身スキンケアに。うるおいをキープし、保湿ベール上から医療テープを貼付できます。
- 2 のびがよくべとつかないのでいつでも使いやすく、無香料なので医療従事者の皆さまの業務中の手肌などにもご使用いただけます。
- 3 約5～6時間、保湿が持続する親水性ローションです。入浴・シャワー浴、清拭後などにおすすめします。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
66800015	4582111180315	60mL	560円	1本
59433400	4582111180308	236mL (ポンプ付)	1,380円	1本

セキュラMLにはバリア機能の低下しているお肌・脆弱(ぜいじゃく)なお肌に、刺激が感じられ易いエチルアルコールは配合していません。沁(し)みの不安があるかたにも。

化粧品



シャワー浴・入浴後の保湿スキンケアに。



無香料・無着色・低刺激ローションタイプ保湿剤です。



手指の保湿・ハンドケアに。特に頻繁な手洗いの医療従事者の皆さまへ。



足部・下肢全体への保湿ケアにお使いいただけます。



少量でもとても良く伸び腕部への保湿にお使いいただけます。



全身の保湿にお使いいただけます。

保湿 Moisturize

保護 Protect

保湿クリーム セキューラ[◇] DC

皮膚を守りながらうるおいを与える、
さらりとした無香性のクリーム。

- ✓ 皮膚にうるおいを与えます
- ✓ はっ水効果で皮膚を保護
- ✓ べとつかず、さわやかな使用感

POINT

おしりまわりの
スキンケアだけでなく、
手指や足にも
ご使用頂けます。



おしりまわりの保湿に



ハンドケアに



皮膚を汚れから守るはっ水効果を 兼ね備え、うるおいを長時間キープ する保湿クリーム

- 1 手指・足脚・全身への保湿にお使いいただける、無香料・無着色・低刺激のクリーム状保湿剤です。
- 2 皮膚の洗浄後に使用することで、うるおいを与え長時間(約12時間~24時間)しっかりと保湿できる、さわやかなモイスチャークリームです。
- 3 成分ジメチコン含有によりはっ水性が高く、汚れから皮膚を守りながら乾燥しやすい皮膚のコンディションをなめらかに整えます。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
59432200	4582111180292	114g	2,630円	1本

セキューラ DCにはバリア機能の低下しているお肌・脆弱(ぜいじゃく)なお肌に、刺激が感じられ易いエチルアルコールは配合していません。沁(し)みの不安があるかたにも。

化粧品



セキューラDCを適量(約1~2cm)指先に取ります。



使用部位に均一に塗ってください。



手荒れを予防ケアいただきたい医療従事者の皆さまへ。



足部分・大腿部・下肢全体への保湿にお使いいただけます。



クリーム状保湿剤ですから乾燥する皮膚のコンディションをなめらかに整えます。



しっかりと保湿できるモイスチャークリームですので全身の保湿にお使いいただけます。

保護 Protect

保湿 Moisturize

はっ水性ジェル

セキューラ[®] PO

下痢便や失禁等、強い刺激や汚れから皮膚を守り、水をはじくジェル。

- ✓ 皮膚を汚れから保護
- ✓ 皮膚のうるおいを保ちます
- ✓ 使いやすいチューブ入り

POINT

はっ水性の高い被膜をつくり、オムツかぶれをケア



セキューラ POを塗布



強いはっ水性で汚れを防ぎます



はっ水、保湿で皮膚を守り、 芳香成分で臭いを包みこむジェル

- 1 皮膚の上にはっ水性の高い被膜をつくり、刺激性の強い汚れから皮膚を保護します。頻繁な刺激や連続した刺激にも優れたはっ水性を発揮します。
- 2 はっ水性の被膜が水分の蒸発を防いで皮膚を保湿し、しっとりなめらかなうるおいをキープします。
- 3 一般的なはっ水バリアクリームのようなべたつきがなく、低刺激で、少量でもとてもよくのびる、なめらかで塗りやすいジェルです。

製品番号	JAN コード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
59431500	4582111180278	70g	1,840円	1本
59431600	4582111180285	159g	2,410円	1本

セキューラ POにはバリア機能の低下しているお肌・脆弱(ぜいじゃく)なお肌に、刺激が感じられ易いエチルアルコールは配合していません。沁(し)みの不安があるかたにも。

化粧品



STEP 1

皮膚を洗浄した後、よく乾かします。



STEP 2


セキューラPOを適量(約1~2cm)指先に取ります。



STEP 3

使用部位に均一に塗ってください。

オムツかぶれをケアされる皆さまに セキューラ PO

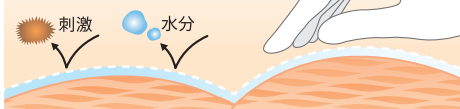

はっ水性のある被膜により皮膚を保護

保湿成分配合で、皮膚をしっとりなめらかに

芳香成分で臭いを包みこむ

- 皮膚にはっ水性の被膜をつくり、オムツのなかの便や尿を直接皮膚に触れさせません。
- 保湿成分を配合しているため、皮膚をしっとりなめらかにします。
- オムツかぶれの起きにくい、すこやかな皮膚を保ちます。

洗 浄 Cleanse

弱酸性洗剤料

セキューラ[◇]CL

ご自宅や外出先でも、おしりまわり等の
汚れを優しくすばやく落とす洗剤料。

- ✓ 汚れを手早く落とせます
- ✓ お肌と同じ弱酸性
- ✓ 片手で使えるスプレー式

POINT

泡立て不要
拭き取るだけで
洗浄できます。



適量を吹きかけます



濡れティッシュなどで
拭き取ります



泡立てが不要なため手早く洗浄でき
労力を軽減
保湿効果も備えた洗剤料

- 1 セキューラCLそのものが洗浄効果を持っています。
スプレーして汚れを浮き上がらせ、ガーゼなどで
拭き取ります(泡立て不要)。
- 2 すばやい洗浄作業は、ケアされる側・する側双方の
労力を軽減するメリットをつくります。
- 3 保湿成分を含む洗剤料のため、洗浄後もしっとり。
皮膚を清潔にしつつ、保湿します。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
59430900	4582111180261	236mL	1,900円	1本

セキューラCLにはバリア機能の低下しているお肌・脆弱(ぜいじゃく)なお
肌に、刺激が感じられ易いエチルアルコールは配合していません。沁(し)み
の不安があるかたにも。

化粧品



STEP 1

汚れている部位に、
セキューラCLを
適量(2~4プッシュ)
吹きかけます。



STEP 2

吹きかけてから
約5~10秒間そのまま
にした後、ガーゼなどで
拭き取ります。



STEP 3

ガーゼで拭き取った後、
濡れたタオルなどで
拭き取ります。または、
水またはぬるま湯で
洗い流します。
皮膚を洗浄した後、
よく乾かします。



セキュラ
シリーズを
上手く使い分け
しましょう!

<p>1 頻繁な手洗いによるスキントラブル(手荒れ)ケアに</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC</p>	<p>2 乾燥する季節の全身スキンケアに</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC</p>	<p>3 足部分・下肢・かかとへのスキンケア保湿に</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC</p>	<p>4 日ごろの手のお手入れに</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC</p>
<p>5 デリケートな肌の方の保湿ケアに</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC</p>	<p>6 ドライスキンの予防を必要とされる方の保湿ケアに</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC</p>	<p>7 治療の影響による皮膚の乾燥ケアに</p>  <p>▶セキュラML ▶セキュラDC ▶セキュラPO</p>	<p>8 保湿に配慮した洗浄をしたいときに</p>  <p>▶セキュラCL</p>
<p>9 はっ水被膜で尿失禁・便失禁から皮膚を守りたいときに</p>  <p>▶セキュラPO</p>	<p>10 ストーマ用装具等による皮膚ダメージから皮膚を守りたい場合に</p>  <p>▶セキュラ ノンアルコール被膜</p>	<p>11 粘着剤の刺激からの皮膚の保護に</p>  <p>▶セキュラ ノンアルコール被膜</p>	<p>12 NPWT時のドレープ貼付部位に</p>  <p>▶セキュラ ノンアルコール被膜</p>

ひまく
保護

セキュラ[®] ノンアルコール被膜スプレー

(販売名: ノンアルコール スキンプレップ スプレー)

粘着製品(テープ・ストーマ用装具等)の繰り返しのご使用による皮膚のダメージや便・尿・滲出液等による皮膚と創周辺のダメージから、液体包帯被膜剤で皮膚を守ります。

尿や便失禁、消化液、傷口からの排液、粘着剤や摩擦による刺激から、健康な皮膚または傷んだ皮膚を保護します。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
66800872	4582111180322	28mL	2,020円	1本

一般医療機器 液体包帯 JMDNコード:33584000
届出番号:13B1X10222WC0014

ひまく
保護

セキュラ ノンアルコール被膜スティックタイプ 滅菌済

(販売名: ノンアルコール スキンプレップ)

スティックタイプは範囲を限定して被膜保護したい際に簡単操作ができます。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
66800787	4582111180377	3mL	1,620円	5本
66800711	4582111180339	3mL	10,640円	50本

一般医療機器 液体包帯 JMDNコード:33584000
届出番号:13B1X10222WC0013

はくり剤

リムーブ

アロエ抽出液を配合し、皮膚にやさしい剥離(はくり)剤。

ストーマ用装具やテープの粘着剤・ハイドロコロイド材を剥がしやすくして、皮膚への物理的的刺激を軽減する剥離剤です。皮膚に残った粘着剤のべとつきも除去します。



皮膚への刺激を低減しストーマ装具の粘着剤を剥がしやすくなります。



ドレッシング材の粘着剤のべとつきも除去します。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
403100	4582111180018	紙ナプキンタイプ	2,520円	50枚/箱
403300	4582111180025	236mL/ポリ容器タイプ	4,000円	1本

衛生材料

ひまく
保護

セキュラ ノンアルコール被膜 ナプキンタイプ 滅菌済

(販売名: ノンアルコール スキンプレップ)

便・尿・滲出液等による皮膚と周辺のダメージから被膜により皮膚を守ります。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税抜)	入数/小箱
66800712	4582111180346	1mL	6,160円	50枚

一般医療機器 液体包帯 JMDNコード:33584000
届出番号:13B1X10222WC0013

スミス・アンド・ニュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

®Trademark of Smith+Nephew

© 2016-2023 Smith+Nephew