

レプリケア[◇]ET レプリケア[◇]ウルトラ

ハイドロコロイドドレッシング

smith&nephew
REPLICARE[◇] ET
REPLICARE[◇] ULTRA
Hydrocolloid Wound Dressing

はがれにくい新しいハイドロコロイドドレッシング



すべりが良い

外的な摩擦を軽減する
ポリウレタンフィルムを採用。
ズレによるはがれを軽減します。



薄い

皮膚との段差がなく、
肌にしつかりなじみます。



高い吸収力

しっかりと滲出液を
吸収し、湿潤環境を
維持します。

真皮に至る創傷



皮下組織に至る創傷



レプリケア[◇]ET

製品番号	サイズ(cm)	保険算定面積(cm ²)	枚/箱
66801612	5 X 7	35	10
66801615	10 X 10	100	10

医療機器認証番号:226ADBZX00164000 管理医療機器
局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材 JMDNコード:34082002 電子線滅菌済

■保険適用

種 類:特定保険医療材料
保 険 請 求 名:皮膚欠損用創傷被覆材 レプリケア ET
保 険 適 用 範 囲:真皮に至る創傷用
適 用 期 間:2週間を標準として特に必要と認められた場合については
3週間を限度とする。
保 険 請 求:償還価格による。

■使用目的又は効果

真皮までの創傷に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、
「疼痛の軽減」を目的とする。

レプリケア[◇]ウルトラ

製品番号	サイズ(cm)	保険算定面積(cm ²)	枚/箱
66000434	10 X 10	100	10

医療機器承認番号:22600BZX00539000 高度管理医療機器
二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材 JMDNコード:34082003 電子線滅菌済

■保険適用

種 類:特定保険医療材料
保 険 請 求 名:皮膚欠損用創傷被覆材 レプリケア ウルトラ
保 険 適 用 範 囲:皮下組織に至る創傷用
適 用 期 間:2週間を標準として特に必要と認められた場合については
3週間を限度とする。
保 険 請 求:償還価格による。

■使用目的又は効果

皮下脂肪組織までの創傷(III度熱傷を除く。)に対する「創の保護」、「湿潤環境の維
持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

使用方法



①剥離紙(白色)を途中までは
がします。



②端をもちながら患部に貼付し
ます。



③残りの剥離紙(透明)をはがし
ます。



④人肌で温めることで皮膚によ
くなじみます。

警告

適用部位に明らかな臨床的創感染を有する患者には感染症状を軽快させてから使用すること。創傷の感染が疑われる場合は、抗菌薬の投与等による全身・局所管理を行い、十分な観察の下で慎重に適用すること。[感染を悪化させるおそれがある。]

禁忌・禁止

- 1) 再使用禁止
- 2) 以下の場合には使用しないこと。
・III度熱傷 ・筋・骨に至る創傷
- 3) 本品の成分に対してアレルギーを有する患者には使用しないこと。

「使用方法」及び「使用上の注意」等の詳細については添付文書をご参照下さい。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755

名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420

広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325

仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652

大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993

福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916

http://www.smith-nephew.com/japan/ ◊Trademark of Smith & Nephew. © 2015-2021 Smith & Nephew KK

REP-4
202105-3