

+ Su exclusiva forma multilobular con bordes más anchos le permite permanecer en el sitio de aplicación más tiempo*¹ y un indicador de cambio para saber cuando cambiar el apósito.²⁻⁴

Smith+Nephew

ALLEVYN[®] LIFE
Apósito de espuma

Aplicación



- Retire el film protector del centro sin removerlo por completo
- Centre el apósito
- Adhiera parte del borde del apósito a la piel perilesional
- Puede usar sus dedos para ayudar a adherir el borde.
- Tome parte del film protector parcialmente retirado



- Retire el resto del film protector
- Alise sobre la piel.
- Si está sobre una herida, asegúrese que la almohadilla absorbente cubra la herida.
- No estire el apósito.



- Aplique suavemente la almohadilla sobre la parte del cuerpo sin estirar el apósito
- Despegue lentamente los otros dos lóbulos del film protector, mientras coloca el borde hacia abajo
- No estire el borde, alíselo suavemente


Los apósitos de espuma **ALLEVYN LIFE** enmascaran el exceso de fluido de la herida al mismo tiempo que ayuda a evitar posibles fugas y bloquea el olor.⁵⁻⁷

La siguiente imagen puede ser útil para mostrarle cuando cambiar el apósito:




INDICADOR AL 0 %

El apósito puede permanecer aplicado con el exudado enmascarado.

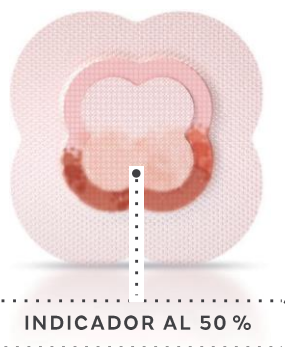

INDICADOR AL 50 %

Considere programar el cambio apósito en los próximos días.

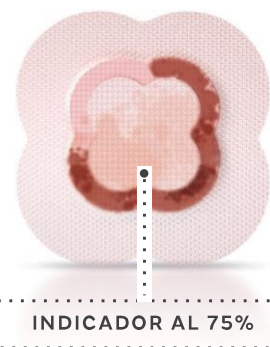

INDICADOR AL 75 %

Es el momento de cambiar el apósito

Códigos ALLEVYN LIFE



Tamaño (cm)	Código S+N	Unidades
10.3cm x 10.3cm	66801067	10
12.9cm x 12.9cm	66801068	10
15.4cm x 15.4cm	66801069	10
21cm x 21cm	66801070	10

Códigos ALLEVYN LIFE financiados por el S.N.S



Tamaño (cm)	Código S+N	Código nacional	Unidades
15.4cm x 15.4cm	66801742	473025.8	3
21cm x 21cm	66801743	491845.8	3

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de Uso (IFU) aplicables al producto antes de usar

*ALLEVYN LIFE puede usarse aproximadamente el doble de tiempo que los apósitos convencionales. n=37; los apósitos duran 1.92x veces más que otros apósitos de espuma

Referencias 1. Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. J Wound Care. 2015 Jul;24(7):312, 314-7. 2. Stephen-Haynes JB, A., and Searle, R., The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. Journal of Community Nursing. 2013;27(5):50-59. 3. Simon D, Biel A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. WoundsUK. 2014;10(3):80-87. 4. Smith & Nephew February 2016. Subjective comparison of masking ability of the New ALLEVYN LIFE versus Current ALLEVYN LIFE by Healthcare Professionals. Internal Report. DS/16/061/R. 5. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. WoundsUK. 2013;9(4):91-95. 6. Smith & Nephew 14 June 2012. Odour reducing properties of ALLEVYN Life. Internal Report. DS/12/127/DOF. 7. Smith & Nephew 20 June 2016. A Randomised Cross-Over Clinical Evaluation to Compare Performance of ALLEVYN Life and Mepilex® Border Dressings on Patient Wellbeing-Related Endpoints. Internal Report. CE/047/ALF

Smith & Nephew S.A.U, Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona T. +34 902 30 31 60, F. +34 902 30 31 70

www.smith-nephew.com/allewyn * Marcaregistrada de Smith+Nephew. Todas las marcas registradas © Diciembre 2020 Smith+Nephew AWM-AWC 25197-es V1 ALLEVYN LIFE Application sheet 1220