

退院後の創の管理について

使っている・貼っているもの

ハイドロサイト◇ ADジェントル or ハイドロサイト ジェントル銀

貼っている場所、傷の部位



交換する日、頻度

月 日 ()、 日 ()、 日 ()


※ 1週間に _____ 回で交換

交換手順


はがし方




シリコン粘着の端を持って、ゆっくりはがします。

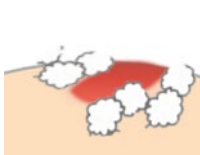

キズやキズの周りについている汚れを石鹸などで洗います。

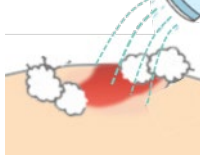

貼り方

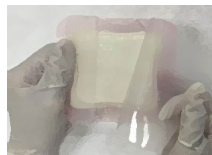

裏面の透明フィルムをはがします。



粘着剤がついている白いパッド面をキズにのせて密着させて貼ります。皮膚になじませて貼付完了です。

しわになった部分は、一度剥がして貼り直すことができます。


交換するときに確認してほしいこと

- キズから出る液が増えていませんか？
- キズの痛みが増していませんか？
- キズから出る液がにおいませんか？
- キズから血は出ていませんか？


病院に連絡してほしい状態



キズの周りが赤い

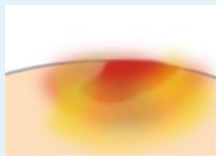

キズから液がたくさん出る

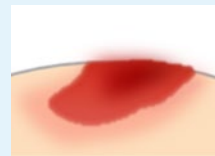

キズが大きくなった

痛み止めを飲んでもキズの痛みが治まらない
キズから出る液がにおう
キズから血がたくさん出る

連絡場所

_____ 病院

_____ 外来

_____ 電話番号