


Een route naar een effectievere aanpak van infecties

Verbeteren van de resultaten voor de patiënt¹ met nauwkeurige besluitvorming, snelle reactie en effectieve behandelingskeuzes

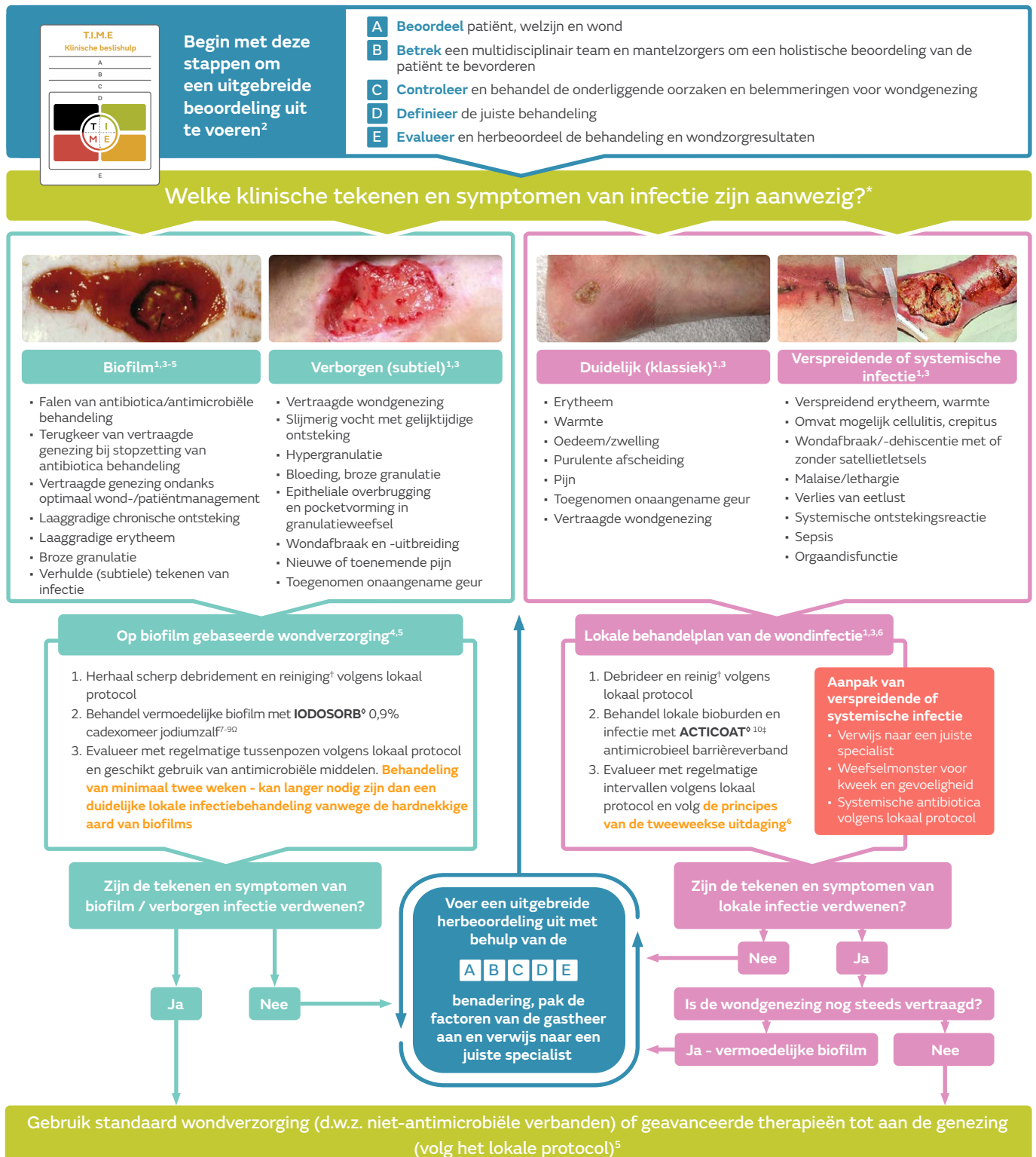

TWEEWEEKSE UITDAGING^{1,6}

Antimicrobiële verbanden worden aanbevolen voor gebruik gedurende een periode van minimaal twee weken. Herbeoordeel na twee weken en overweeg:

- te stoppen als de tekenen en symptomen van de infectie zijn verdwenen,
- door te gaan met antimicrobiële verbanden als de wond geneest, maar er nog steeds klinische tekenen en symptomen zijn, of
- overweeg een alternatief antimicrobieel verband en verwijs de patiënt naar een juiste specialist als er geen verbetering optreedt.

* Geen enkel teken of symptoom kan de aanwezigheid van een infectie op betrouwbare wijze bevestigen, en mensen met immunosuppressie vertonen mogelijk geen tekenen en symptomen van een klinische infectie.
[†] Reinig de wond en de huid rondom de wond grondig. Indien een antiseptisch reinigingsmiddel wordt gekozen, moeten de gebruiksaanwijzing en de inwerktijd van het product worden gevolgd.
[‡] Overweeg het gebruik van DURAFIBER® Ag zilververband met gelerende vezels voor diep geïnfecteerde wonden.
[§] Tenzij er een contra-indicatie is voor jodium.
[¶] Voor patiënten en wonden met zeer hoog risico (bijv. osteomyelitis) kan het een overweging zijn om een antimicrobiële behandeling te gebruiken voor een langere periode dan de tweeweekse uitdaging.
 Voor gedetailleerde informatie over het product, inclusief indicaties voor gebruik, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het product.

Referenties 1. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International (2016). 2. Moore Z, et al. J Wound Care 28(3):154-161 (2019). 3. Weir D, Schultz G. Assessment and Management of Wound-Related Infections. In Doughty D & McNichol L (Eds.). Wound, Ostomy and Continence Nurses Society Core Curriculum: Wound Management (p. 156-180). 2016. Philadelphia: Wolters-Kluwer. 4. Wolcott RD, et al. J Wound Care 19(2): 45-53 (2010). 5. Schultz G, et al. Wound Repair Regen 25(5): 744-757 (2017). 6. Ayello EA, et al. Wounds Int 1-24 (2012). 7. Roche ED, et al. Int Wound J 1-10 (2019). 8. Malone M, et al. J Antimicrob Chemother 72, 2093-2101 (2017). 9. Schwarzer S, et al. J Infect 80(3):261-270 (2020). 10. Gago M, Garcia F, Gaztelu V, Verdu J, Lopez P, Nolasco A. A comparison of three silver-containing dressings in the treatment of infected, chronic wounds. Wounds. 2008;20(10):273-278.
 Foto's (van links naar rechts) met dank aan Kerlyn Carville, Kevin Woo en Henri Post.
 ©Handelsmerk van Smith+Nephew. Alle handelsmerken zijn erkend. ©Juni 2020 Smith+Nephew. 25993-nl | GMC1067