

オプサイト[◇]
クイックロール2way
クイックロール


Transparent Film Roll

より肌に優しく、より快適で、より使いやすい 患者様にも医療従事者の方にも優しい製品です


「15 μ mの薄さ」と「低粘着の粘着剤」と「水蒸気透過性の高さ」が皮膚に最適なフィルムを実現しています。

1 最適な薄さのフィルムの厚み

15 μ mの薄さでフィルムと皮膚との段差がなくなりました。フィルムが周囲から剥がれにくくなり、長期固定が可能です。また、皮膚とのなじみが良く、貼付時の違和感が低減します。

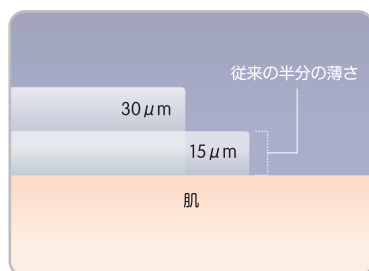

Q | 皮膚へのなじみややすさについてお聞きます。
貼付した際の肌への違和感はどうですか？

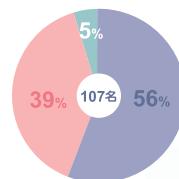

- 違和感がない
- 違和感が少ない
- 少し違和感があった
- 違和感があった

2 肌に優しい粘着剤


低粘着のアクリル系の粘着剤を使用することで、フィルムの剥離時に生じる刺激を低減しました。脆弱な皮膚の患者様にも優しい貼付が可能です。



皮膚と平行（横方向）に
引っ張りながら
はがしてください。

3 高水蒸気透過性

不感蒸泄をさまたげない高い水蒸気透過性があり、皮膚の状態を正常に保ちます。蒸れにくいので貼付時の違和感が低減します。

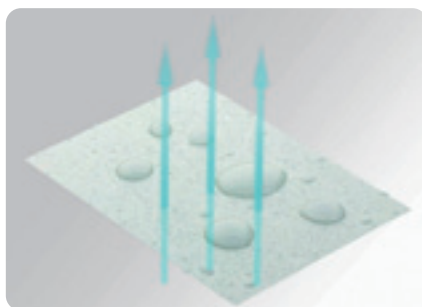

貼付方法

誰もが簡単に貼付できるように、貼付方法を離けい紙に記載しています。



1 右側の離けい紙を中央からはがします



2 左側の離けい紙をはがします




3 両サイドのハンドルを両手で持って貼付します

伸縮性が高い

肌の動きに追従することで凹凸のある部位（骨突出部、踵部など）にもしっかりとフィットし、肌になじみます。




Q フィルムの伸縮性についてお聞きます。皮膚への追従性はどうか？

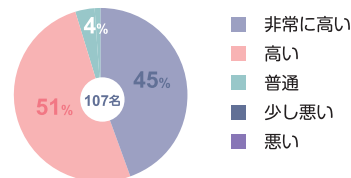


すべりが良い

皮膚の保護にも使われるロールフィルムにはすべりの良さも必要になります。すべりが良いので摩擦係数が減り、皮膚の保護にも最適です。

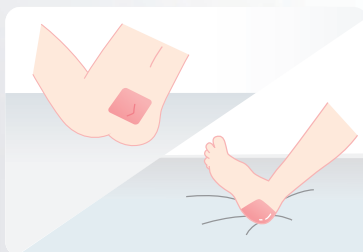

Q フィルムの摩擦係数についてお聞きます。フィルムのすべりはどうか？

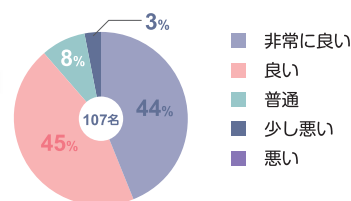


貼りやすい

誰でも簡単に貼付できるよう設計されています。離れ紙にイラスト付きの貼り方を載せていますので、初めてお使いになる方でも簡単に貼ることができます。両サイドにハンドルが付いているので、手袋をしたままでも簡単に貼れます。



Q 操作性についてお聞きます。フィルムは貼りやすいですか？

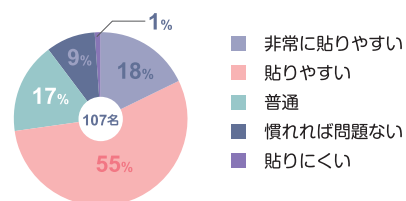

第23回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会での弊社展示ブースアンケート結果になります



4 中央テープをはがすと保護フィルムも同時にはがれます
※中央テープは左右どちらからでもはがせます



5 残りの保護フィルムをはがします



6 フィルム全体を馴染ませたら、貼付完了です

製品情報

【12m巻】 オプサイト[◇] クイックロール 2way



製品番号	サイズ	巻 / 箱
66800339	5cm×12m	1
66800340	10cm×12m	1
66800341	15cm×12m	1

【3m巻】 オプサイト[◇] クイックロール



製品番号	サイズ	巻 / 箱
66000960	5cm×3m	1
66000961	10cm×3m	1

用途

皮膚の保護：摩擦からの保護等

固定：創傷ドレッシング、ガーゼ、チューブ・カテーテル、その他 器具等

シャワー等防水目的：ドレッシング材、ストーマ装具、その他 器具等

使用上の注意

未滅菌ですので、カテーテル刺入部や創傷部に直接貼付しないでください。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウインドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号
TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.
© 2015-2017 Smith & Nephew KK

販売店