


RENASYS[®] EDGE

Kurzanleitung



Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie mit der Therapie

3

Drücken Sie  zum **Starten** / **Pausieren** der Therapie



4

Wenn die Therapieeinheit korrekt arbeitet, leuchtet die grüne **OK Statusanzeige**




1

Einschalten der Therapieeinheit (2 Sek. drücken)

2


Wählen Sie den Sollwert des Unterdrucks mithilfe der + oder - Tasten

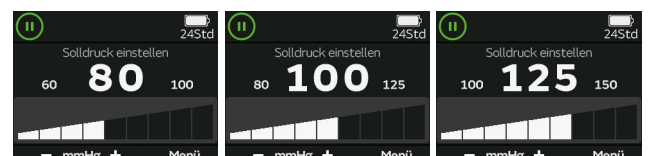

Installation eines neuen Kanisters



Stellen Sie sicher, dass die Therapie pausiert oder das Gerät **ausgeschaltet** ist.

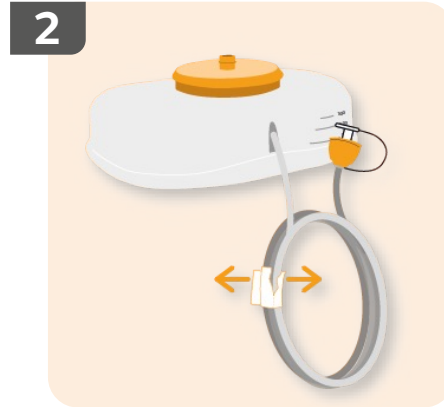


Entfernen Sie das Papier vom Kanisterschlauch und entrollen Sie den Schlauch vollständig.



Drücken Sie die Therapieeinheit nach unten auf den Kanister, bis Sie ein Klicken der Entriegelungstaste hören.



Positionieren Sie den Kanister mit dem Schlauch zur Rückseite und richten Sie die Therapieeinheit darüber aus.

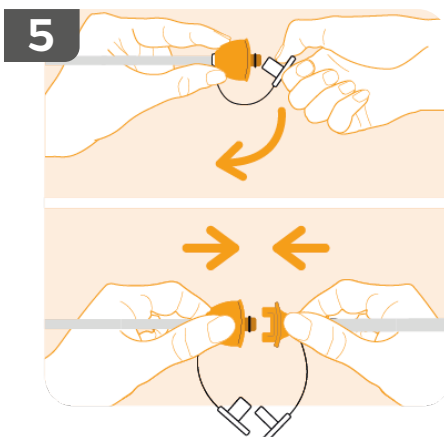


Entfernen Sie die Kappen von beiden Quick-Click-Adaptern und drücken Sie diese zusammen, bis sie einrasten.




Starten Sie die Therapie, indem Sie die Taste  drücken.


Warnungen

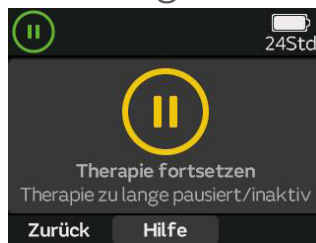

Therapie zu lange pausiert

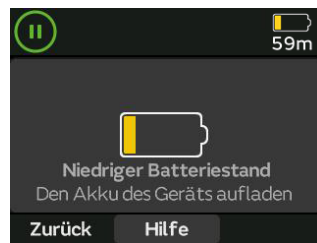

Niedriger Batteriestand

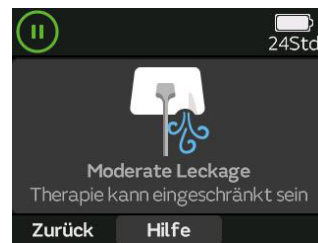

Moderate Leckage




Therapieeinheit zu heiß


Alarme



Blockade

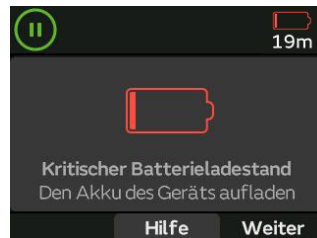


Kritischer Batteriestand

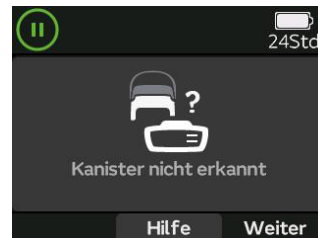

Fehlender Kanister




Batteriefehler

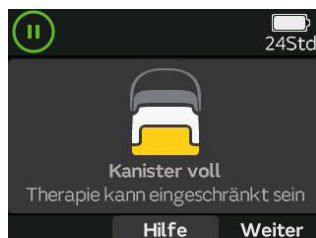


Kanister voll



Therapieeinheit zu heiß

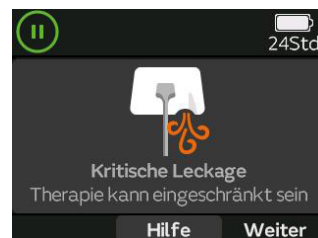

Kritische Leckage

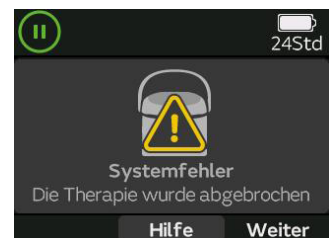

Systemfehler / hoher Unterdruck

Tasten- und Symbolerklärung

Tasten der Therapieeinheit

	Start / Pause
	Stummschaltung
	Eingelassene Tastensperre
	Kanisterentriegelung
	Drei Multifunktions-Tasten

Leuchten der Therapieeinheit

	System OK
	Batteriewarning
	Alarm / Warning
	Anzeige externer Stromversorgung

Batteriesymbole

	Vollständige Ladung
--	---------------------

	Niedrig
	Kritisch niedrig
	Wird geladen
	Voll aufgeladen
	Batteriefehler

Therapiebildschirm-Symbole

	Y-Konnektor-Modus
	Intermittierender Modus
	Kontinuierlicher Modus

Statusleisten-Symbole

	Therapie pausiert
	Therapie OK
	Alarm / Warning

	Kritische Leckage
	Moderate Leckage
	Blockade
	Fehlender Kanister
	Systemfehler / hoher Unterdruck
	Warnung: Therapieeinheit zu heiß
	Alarm: Therapieeinheit zu heiß
	Therapie zu lange pausiert
	Kanister voll
	Tastensperre aktiv
	Bluetooth eingeschaltet
	Stumm

Suchen Sie weitere Informationen? Scannen Sie den QR-Code für:

- + Kontakt zum Kundendienst
- + Videos zur Fehlerbehebung
- + Videos zur grundlegenden Bedienung



Wundmanagement Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Van-der-Smissen-Straße 9
22767 Hamburg

T +49 (0) 40 8797 44-0
F +49 (0) 40 8797 44-375
www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

Hersteller
Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN,
United Kingdom

♦ Markenzeichen von
Smith+Nephew; alle Marken-
zeichen sind registriert.
© Dezember 2025 Smith+Nephew
AWM-AWD-46296 | P240320