

+ ALLEVYN[®] THIN Schaumverband ist ein selbstklebender,^{1,2} flexibler und anschmiegsamer^{1,3,4} Verband für das Management niedrig bis mäßig exsudierender Wunden.

Smith+Nephew

ALLEVYN[®] THIN
Schaumverband

Anwendung



1

- Das Trennpapier entfernen



2

- Die selbstklebende Seite des Verbandes auf die Wunde auflegen



3

- Guten Kontakt sicherstellen
- Den Verband in der Position glattstreichen und dabei darauf achten, dass die Ränder des Verbandes nicht faltig sind

Entfernung

Zur Entfernung des ALLEVYN THIN Verbandes, eine Ecke anheben und den Verband durch Umschlagen zurückziehen.

Wechselhäufigkeit

Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Exsudatmenge der Wunde ab. Den Verband wechseln, wenn der sekundäre Verband ansteigt oder bei Austritt. Das Intervall zwischen den Verbandwechseln beträgt ein bis mehrere Tage.

Ein Verbandwechsel ist mindestens einmal pro Woche erforderlich.

Die nachstehende Grafik dient nur zur Orientierung.

Der ALLEVYN THIN Verband sollte häufig kontrolliert werden.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66012615	5,0 cm x 6,0 cm	0312 6902	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66012616	10,0 cm x 10,0 cm	0312 6919	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66045124	15,0 cm x 15,0 cm	0312 6931	48 Stück (16 OP)	3 Stück
66047579	15,0 cm x 20,0 cm	0312 6925	48 Stück (16 OP)	3 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

Kontakt Deutschland

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4, Haus 21
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.cat

Kontakt Schweiz

Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.ch

♦Marke von Smith+Nephew

Alle Marken anerkannt
©Januar 2021 Smith+Nephew
AWM-AWC-26659 | GMC1249-de

Hersteller: Smith&Nephew Medical Ltd, 101
Hessle Rd, Hull HU3 2BN England

Detaillierte Informationen

zu den Produkten,
einschließlich der Indikationen,
Kontraindikationen, Vorsichts-
und Warnhinweise, entnehmen
Sie bitte vor der Anwendung
der Gebrauchsanweisung des
jeweiligen Produkts.

Referenzen

1. Beiersdorf AG. Clinical evaluation of Cutinova™ Thin. Internal report. **2.** Schmidt A, Gassmueller J, Hughes-Formella B, Bielfeldt S. Treating hypertrophic scars for 12 or 24 hours with a self-adhesive hydroactive polyurethane dressing. *J Wound Care*. 2001;10(5):149–153. **3.** Smith + Nephew 2009. ALLEVYN THIN Dressing physical properties. Internal report. DS/09/013/R6. **4.** Smith+Nephew 2007. A prospective, multi-centre, randomised and comparative evaluation to assess the relative cost effectiveness of treatment of Stage II pressure ulcers with ALLEVYN THIN and Saline soaked gauze. Internal report. SR/SR/CE/011/ALT.

*Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.