



Aufblasbare Tamponade,  
entwickelt für eine schnelle  
einmalige Behandlungslösung  
mit niedrigem Profil und  
selbstgleitenden Eigenschaften.

 **smith&nephew**  
**RAPID RHINO<sup>®</sup>**  
Produkte zur Stillung von  
Nasenbluten

An der Seite von Medizinern und Pflegekräften

# RAPID RHINO<sup>◇</sup> Produkte zur Stillung von Nasenbluten

## Breite Auswahl von Lösungen zur Stillung von Nasenbluten


Äußerst niedriges Profil und selbstgleitendes Hydrokolloidgewebe ermöglichen unübertroffen<sup>1</sup> einfache Einführung und Entfernung.




Mit CMC-ummanteltes Außengewebe, das durch Befeuchtung ein gleitfähiges Gel bildet. Für optimalen Patientenkomfort vom Einsetzen bis zum Entfernen.

## Merkmale


- Einfaches Einführen und Entfernen
- Schnelle Anpassung an die Anatomie der Nase
- Bietet leichte, gleichmäßige Kompression der Epistaxisbereiche
- Entwickelt zur Vermeidung von Anhaftungen an das Gewebe und von Koagel beim Entfernen
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen

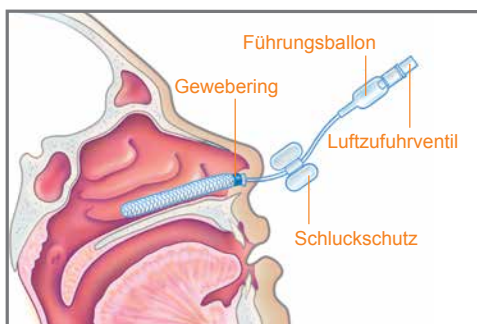


RAPID RHINO Nasentamponade (Unaufgeblasen 5,5 cm, Abbildung zeigt vordere Tamponade)

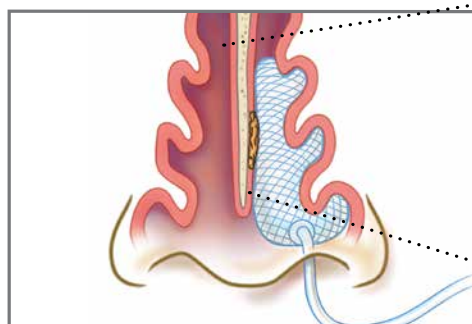


RAPID RHINO mit Carboxymethylcellulose (CMC)

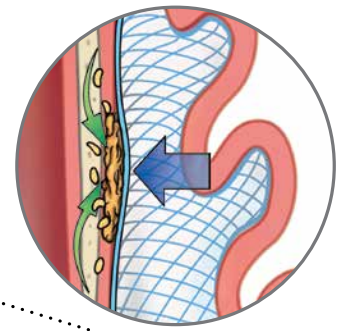


## Anweisungen zur Verwendung von RAPID RHINO

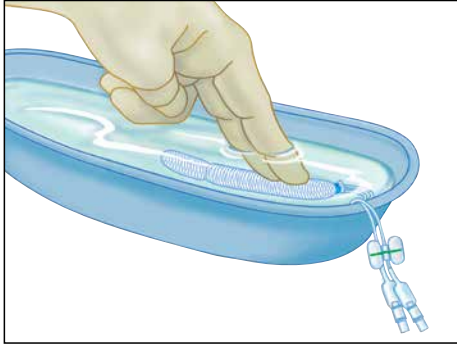


1. INSGESAMT 30 Sekunden lang in sterilem Wasser tränken.

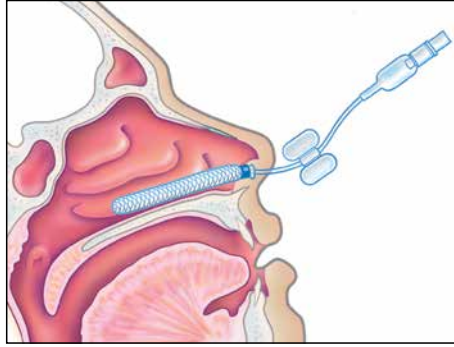


2. Tamponade entlang des Nasenbodens einbringen, bis die blaue Markierung hinter dem Nasenloch liegt.

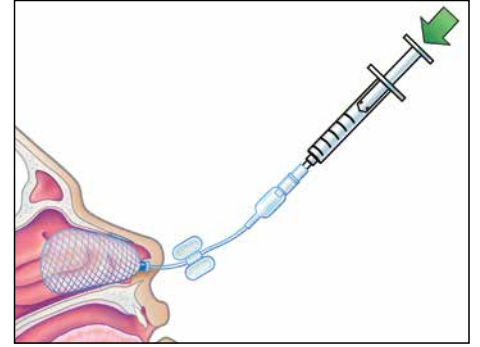


3. Rapid Rhino Tamponade unter Verwendung einer 20-ml-Spritze ausschließlich mit LUFT befüllen. Auf eine direkt spürbare Rückmeldung des Kontrollballons achten. Das Befüllen beenden, sobald der Kontrollballon rundlich wird und sich beim Zusammendrücken fest anfühlt.

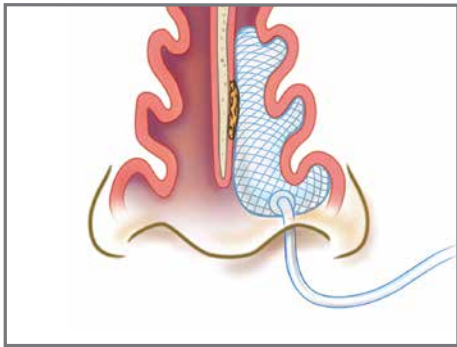

4. Blasen Sie den Ballon auf, um eine sanfte Tamponade mit geringem Druck herzustellen und das CMC-Gewebe direkt an der blutenden Stelle anzuwenden.

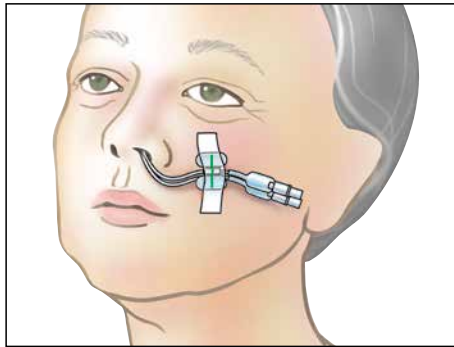

5. Nach 15–20 Minuten überprüfen; falls notwendig erneut aufblasen, um den geeigneten Druck sicherzustellen und mit einem Pflaster an der Wange des Patienten zu fixieren.

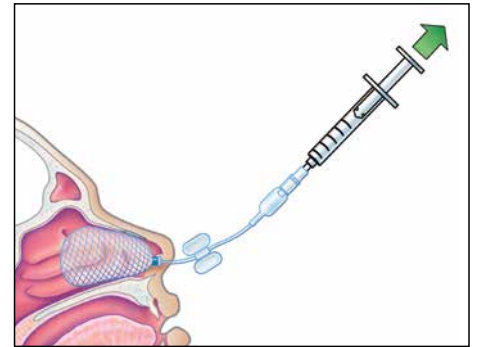

6. Die Entfernung sollte 24–72 Stunden nach der Behandlung erfolgen.

## Unilaterale Modelle



RR450 Nasentamponade –  
4,5 cm aufblasbare Tamponade zur Stillung von Nasenbluten



RR550 Aufblasbare Tamponade –  
5,5 cm aufblasbare Tamponade zur Stillung von Nasenbluten



RR551 Aufblasbare Tamponade mit Luftweg –  
5,5 cm aufblasbare Tamponade zur Stillung von Nasenbluten mit integriertem Luftweg



RR750 Aufblasbare Tamponade –  
7,5 cm aufblasbare Tamponade zur Stillung von Nasenbluten



RR751 Aufblasbare Tamponade mit Luftweg –  
7,5 cm aufblasbare Tamponade zur Stillung von Nasenbluten mit integriertem Luftweg



RR900 – 9 cm aufblasbare Tamponade mit zwei Ballons zur Stillung intranasaler Blutungen aus der Keilbeingaugenarterie (Arteria sphenopalatina)

## Bilaterale Modelle



RR552 – 5,5 cm bilaterale Tamponade zur Stillung von Nasenbluten;



RR752 – 7,5 cm bilaterale Tamponade zur Stillung von Nasenbluten;

### Literaturangaben

1 Singer AJ, Blanda M, Cronin K, LoGiudice-Khwaja M, Gulla J, Bradshaw J, Katz.

A Comparison of nasal tampons for the treatment of epistaxis in the emergency department: a randomized controlled trial. Ann. Emerg. Med. 2005; 45:134–139

## Bestellangaben

### RAPID RHINO<sup>®</sup> aufblasbare Tamponaden

Art.Nr.	Beschreibung
RR450	4,5 CM, AUFBLASBAR, UNILATERAL, OHNE LUFTWEG
RR550	5,5 CM, AUFBLASBAR, UNILATERAL, OHNE LUFTWEG
RR551	5,5 CM, AUFBLASBAR, UNILATERAL, MIT LUFTWEG
RR552	5,5 CM, AUFBLASBAR, BILATERAL, OHNE LUFTWEG
RR750	7,5 CM, AUFBLASBAR, UNILATERAL, OHNE LUFTWEG
RR751	7,5 CM, AUFBLASBAR, UNILATERAL, MIT LUFTWEG
RR752	7,5 CM, AUFBLASBAR, BILATERAL, OHNE LUFTWEG
RR900	9 CM, AUFBLASBAR, MIT DOPPELTEM BALLON



ArthroCare Corporation  
7000 West William Cannon Drive  
Austin, TX 78735  
USA

[www.rapidrhino.com](http://www.rapidrhino.com)



Smith & Nephew medical Limited  
101 Hessle Road, Hull  
HU3 2BN  
Großbritannien

[ec.rep@smith-nephew.com](mailto:ec.rep@smith-nephew.com)

Smith & Nephew GmbH  
Friesenweg 4 | Haus 21  
22763 Hamburg  
Deutschland

T +49 800 664 75 78  
F +49 40 87 97 44 375

[info@smith-nephew.com](mailto:info@smith-nephew.com)

Smith & Nephew GmbH  
Concorde Business Park 1/C/3  
2320 Schwechat  
Österreich

T +43 1 70 79102  
F +43 1 70 79101

[info.austria@smith-nephew.com](mailto:info.austria@smith-nephew.com)

Smith & Nephew Schweiz AG  
Oberneuhofstrasse 10d  
6340 Baar  
Schweiz

T +41 41 766 22 66  
F +41 41 766 22 93

[SLSE@smith-nephew.com](mailto:SLSE@smith-nephew.com)