


## El uso del apósito de espuma ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE con un programa de formación y educación sobre el cuidado de heridas ayudó a reducir los cambios de apósitos y los costes, así como a liberar visitas de enfermería en comparación con la practica anterior

### + Puntos positivos

Comparado con apósitos previos, el uso de ALLEVYN LIFE:

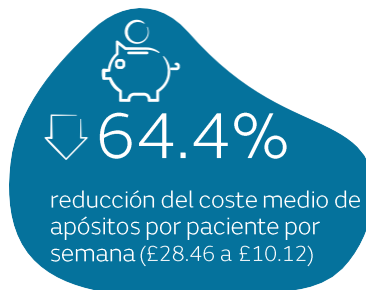


### Resumen

- Un programa específico sobre la práctica del cuidado de heridas que incluye el uso del apósito ALLEVYN LIFE en una organización sanitaria del Reino Unido
- Enfermeras de atención primaria recibieron formación y educación, incluyendo la selección de apósitos y frecuencia de cambio, durante dos semanas, seguida de una fase de implementación de una semana
- Un total de 37 pacientes fueron tratados en su mayoría en centros sociosanitarios (40.5%) o en su domicilio (43.2%)
- La mayoría de los pacientes tenían heridas crónicas de más de seis semanas de duración (73.0%) y tres (8.1%) tenían heridas infectadas

### Resultados

- En general, el 97.3% de los pacientes tuvo una reducción en las visitas de cambio de apósito en comparación al valor inicial (práctica anterior) después de la implementación de ALLEVYN LIFE
- La implementación de los apósitos ALLEVYN LIFE redujo:
  - Frecuencia media de visitas de cambio de apósitos por semana en un 50% (de 3.6 a 1.8)
  - Media del número de apósitos por paciente por cambio de apósito en un 47.6% (de 2.1 a 1.1)
  - Número medio de apósitos por paciente por semana en un 79.6% (de 9.8 a 2.0)
  - Pacientes que requieren cambios de apósito  $\geq 3$  veces por semana (Figura)
- El tiempo medio de uso del apósito aumentó en 2,3 días con el apósito ALLEVYN LIFE (de 2.5 días al inicio a 4.8 días después de la implementación)
- El uso ALLEVYN LIFE redujo el coste de los apósitos por paciente por semana en un 64.4% (£18.34) y se estimó que liberó 1,274 visitas (658 horas) por semana en la practica sanitaria local de 708 pacientes (Figura)
  - 66,269 visitas (34,239 horas) por año

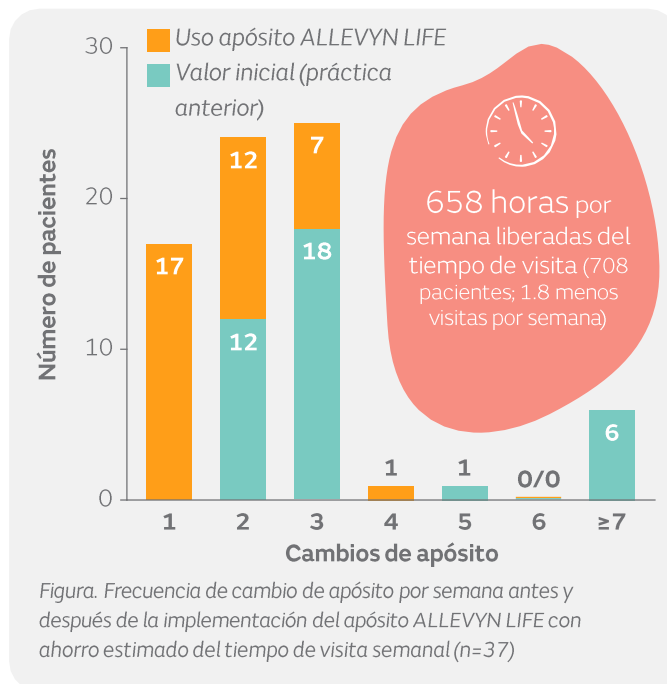

### Conclusiones

El uso del apósito ALLEVYN LIFE con un programa de formación y educación, ayudó a reducir la frecuencia de cambio de apósitos, los costes semanales de apósitos por paciente y las visitas de enfermería en comparación con la práctica anterior, lo que supuso una importante liberación sustancial del valioso tiempo de enfermería.

### Cita

\*JoyH, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *J Wound Care*. 2015;24(7):314-317. Available at: [Journal of Wound Care](#)

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de su uso.