

ALLEVYN[®] Apósitos: Guía de aplicación para zonas difíciles

Los apósitos ALLEVYN[®] están disponibles en una variedad de formas y tamaños que, dependiendo , de la herida, pueden utilizarse en diferentes zonas del cuerpo.^{1-16†}

ALLEVYN[®] Apósitos para el talón



Con un apósito ALLEVYN[®] LIFE o GENTLE BORDER Heel, retire la película protectora central y coloque el talón sobre el apósito, con los lóbulos superiores en ángulo recto con la pierna.




Retire la película protectora de un lóbulo superior, dóblela sobre el maléolo y fíjela en su sitio. Repita con el otro lóbulo superior.



Retire la película del lóbulo inferior y fíjela. El apósito debe estar ahora en su lugar. Asegúrese de que el apósito se adhiere a la piel alisando los bordes alrededor.

ALLEVYN[®] Apósitos para las manos

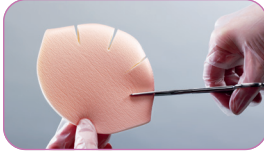

Tome un apósito ALLEVYN[®] HEEL y haga 4 cortes equidistantes en el arco del apósito. Los cortes deben tener aproximadamente 1,5 cm de profundidad, dependiendo del tamaño de los dedos.



Coloque el apósito en la mano. Introduzca los dedos por los 4 cortes realizados. Asegúrese de que el apósito está bien ajustado.



Para fijarlo, aplique el film transparente OPSITE[®] en la parte inferior del apósito, en la base de la palma de la mano. Esto asegurará la parte posterior y el frente del apósito. Asegúrese de que el OPSITE[®] forma un borde en el apósito y no cubre completamente el ALLEVYN[®] HEEL.

ALLEVYN[®] Apósitos para los dedos de la mano



Utilice un apósito ALLEVYN[®] ADHESIVE o GENTLE BORDER (por ejemplo, 7,5 cm x 7,5 cm). Asegúrese de que la piel circundante está seca. Gire el apósito en diagonal y coloque el dedo en la esquina del apósito.



Levante el apósito sobre la punta del dedo. Gire el dedo y fije las esquinas a lo largo del mismo.



Asegúrese de que el apósito se adhiere a la piel sin arrugas. Igualar los bordes en todo el contorno.

ALLEVYN[®] Apósitos para los dedos del pie



Utilice un apósito cuadrado ALLEVYN[®] (por ejemplo, 7,5cm x 7,5cm GENTLE BORDER o ADHESIVE) y gírelo en diagonal. Asegúrese de que la piel circundante está seca. Coloque el dedo del pie en el borde del apósito.



Levante el apósito sobre la punta del dedo. Gire los bordes del apósito hacia la parte posterior del dedo.



Asegúrese de que el apósito se adhiere al dedo y de que los bordes son uniformes en todo el contorno.

ALLEVYN[®] Apósitos para los dedos del pie



Utilizar un apósito ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE o GENTLE BORDER pequeño. Doble el apósito por la mitad. Haga 2 cortes en el apósito con una separación de 1 cm/2 cm.



Introduzca los dedos de los pies en los cortes realizados. Asegúrese de que haya suficiente apósito entre los dedos.



Fijar en su sitio con OPSITE[®]. Asegurarse de que el film OPSITE[®] forma un borde sobre el apósito y no cubre completamente el apósito ALLEVYN[®].

ALLEVYN[®] Apósitos para codos

Las prominencias óseas, como los codos, son propensas a desarrollar lesiones. Los apósitos ALLEVYN[®] ADHESIVE se adaptan a los contornos del cuerpo y son cómodos para el paciente.⁸⁻¹⁰ Los apósitos ALLEVYN[®] GENTLE BORDER permiten flexibilidad y se adaptan a zonas difíciles y zonas del cuerpo propensas al movimiento.³⁻⁶



ALLEVYN[®] ADHESIVE Sacrum



ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Multisite




ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Heel

Retirada de apósitos de silicona
Para retirar el apósito, levante una esquina del apósito y despéguelo lentamente hasta retirarlo por completo de la herida.

†Por favor, tener en cuenta
Realizar un corte en un apósito ALLEVYN[®] puede aumentar la posibilidad de fuga de fluidos y bacterias y puede comprometer las propiedades de barrera bacteriana proporcionadas por el apósito.

ALLEVYN Apósitos para la mama

La cirugía mamaria a menudo provoca heridas que deben cubrirse con un apósito. Los apósitos ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Multisite permanecen suaves sobre la piel y son adaptables para ajustarse a una herida en cualquier zona alrededor de la mama.^{3,5,17,18} Los apósitos ALLEVYN[®] LIFE son adaptables^{1,19} y pueden aplicarse en cualquier zona difícil del cuerpo.^{1,2}

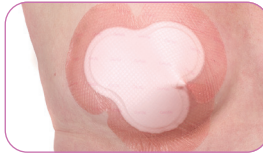

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Multisite



ALLEVYN[®] LIFE

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso (IFU) del producto antes de utilizarlo.

www.smith-nephew.com/es-es/

ALLEVYN [®] LIFE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	10
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	10
66801069	15,4 cm x 5,4 cm	10
66801070	21 cm x 21 cm	10
66801304	25 cm x 25,2 cm Heel	5
66801306	17,2 cm x 17,5 cm Sacrum	10
66801307	21,6 cm x 23 cm Sacrum	10
ALLEVYN [®] GENTLE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66802128	5 cm x 5 cm	10
66802129	10 cm x 10 cm	10
66802130	10 cm x 20 cm	10
66802131	15 cm x 15 cm	10
66802132	20 cm x 20 cm	10
66802133	20 cm x 50 cm	2
ALLEVYN [®] TRACHEOSTOMY		
Código S+N	Tamaño	Un.
66007640	9 cm x 9 cm Tracheostomy	10

ALLEVYN° GENTLE BORDER			
Código S+N	Tamaño	Un.	
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	10	
66800270	10 cm x 10 cm	10	
66800900	10 cm x 20 cm	10	
66800264	10 cm x 25 cm	10	
66800265	10 cm x 30 cm	10	
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10	
66800975	15 cm x 15 cm	10	
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	10	
66800898	16,8 cm x 17,1 cm Sacrum	10	
66801031	21,6 cm x 23 cm Sacrum	10	
66800506	23 cm x 23,2 cm Heel	5	
66800959	17,1 cm x 17,9 cm Multisite	10	
ALLEVYN° HEEL			
Código S+N	Tamaño	Un.	
66007630	10,5 cm x 13,5 cm Heel	5	
ALLEVYN° HEEL financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66000695	488494.4	10 cm x 10 cm (x2)	3

ALLEVYN° GENTLE BORDER LITE			
Código S+N	Tamaño	Un.	
66800833	5 cm x 5 cm	10	
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	10	
66800835	10 cm x 10 cm	10	
66800836	5,5 cm x 12 cm	10	
66800837	8 cm x 15 cm	10	
66800840	15 cm x 15 cm	10	
66801012	10 cm x 20 cm	10	
66801013	8,6 cm x 7,7cm Oval	10	
66801014	15,2 cm x 13,1 cm Oval	10	
66801041	8 cm x 8,4 cm Multisite	10	
ALLEVYN° LIFE financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66801742	473025.8	15,4 cm x 15,4 cm	3
66801743	491845.8	21 cm x 21 cm	3
ALLEVYN° GENTLE financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66802140	478578.4	10 cm x 10 cm	3
66802141	491852.6	15 cm x 15 cm	3

ALLEVYN° ADHESIVE			
Código S+N	Tamaño	Un.	
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	10	
66000599	10 cm x 10 cm	10	
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	10	
66000801	15 cm x 15 cm	10	
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	10	
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	10	
66000451	22 cm x 22 cm Sacrum	10	
66000700	17 cm x 17 cm Sacrum	10	
ALLEVYN° NON-ADHESIVE			
Código S+N	Tamaño	Un.	
66007637	10 cm x 10 cm	10	
66007335	10 cm x 20 cm	10	
66000093	15 cm x 15 cm	10	
66007638	20 cm x 20 cm	10	
ALLEVYN° GB LITE financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66801888	477059.9	8,6 cm x 7,7 cm Oval	3
6681887	477067.4	10 cm x 20 cm	3
ALLEVYN° NON-ADHESIVE financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66000352	483297.6	10 cm x 10 cm	3
6681887	477067.4	15 cm x 15 cm	3
ALLEVYN° ADHESIVE financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66000349	483313.3	12,5 cm x 12,5 cm	3
6681887	477067.4	15 cm x 15 cm	3
ALLEVYN° SACRUM financiado por el S.N.S.			
Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66000694	489468.4	17 cm x 17 cm	3

*Apósitos ALLEVYN[®] LIFE, ALLEVYN[®] GENTLE BORDER, ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE, ALLEVYN[®] ADHESIVE y ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE.

Referencias: **1.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80–87. **2.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50–59. **3.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S.A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. **4.** Smith+Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. **5.** Smith+Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **6.** Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK*. 2016;12(2):70–78. **7.** Stephen-Haynes J, Greenwood M. Clinical evaluation of Allevyn Gentle Border Lite within one health trust. *British Journal of Nursing*. 2011;20(20):S36–S42. **8.** Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17–26. **9.** Bale S, Squires D, Varnon T, Walker A, Benbow M, Harding K. A comparison of two dressings in pressure sore management. *J Wound Care*. 1997;6(10):463–466. **10.** Amione P, Ricci E, Topo F, et al. Comparison of Allevyn Adhesive and Biatain Adhesive in the management of pressure ulcers. *J Wound Care*. 2005;14(8):365–370. **11.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants. Internal Report. DS/14/318/R. **12.** Williams C, Young T. Allevyn adhesive. *Br J Nurs*. 1996;5(11):691–693. **13.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224–228. **14.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants Internal Report DS/14/318/R. **15.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224–228. **16.** Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing*. 1994;3(20):1049–1050, 1052–1043. **17.** Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. *Wounds UK*. 2012;8(4):110–118. **18.** Smith+Nephew 2018. Volunteer Evaluation of Wound Care Dressing Product Features. Internal Report. AWM/AWC/001/v1. **19.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95.

Advanced Wound Management, Smith & Nephew S.A. . Fructuós Gelabert, 2 y 4, 08970 - Sant Joan Despí. (Barcelona) España. Tel: + 34 93 373 7301 Línea directa: +34 934 759 244
©Febrero 2025 Smith+Nephew. ®Marca registrada de Smith+Nephew. AWM-AWC-40359-es V2 ALLEVYN awkward areas poster 0225