

メロリン[®]

非固着性吸収ドレッシング

 smith&nephew

MELOLIN[®]

Absorbent dressing



ガーゼを超えた高機能ドレッシング—メロリン◇

メロリン独自の3層構造でガーゼにはない機能性を発揮。


様々な用途にご利用いただける、使い勝手に優れたドレッシングです。

- 非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
- 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
- 軟膏処置のカバードレッシングとして

構造

<外表面:撥水処理ポリエステル不織布>

- 外表面に撥水処理ポリエステル不織布を採用。
- 不意に付着した水滴などが染み込まず、ドレッシングを清潔に維持。

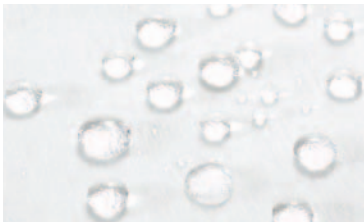


<吸収層:コットン/ポリエステル繊維>

- ボリュームのあるコットン/ポリエステル繊維が、自重の約10倍の高い吸収性を発揮。
- 通常のガーゼに比べて吸収量が多く(図1)、ドレッシングの交換回数を低減。
- ストライクスルー(上層への浸透速度)を遅らせる構造を採用。(図2)
- 優れたクッション性で、適用部をやさしく保護。




(図1) 吸収量(100cm²あたり)

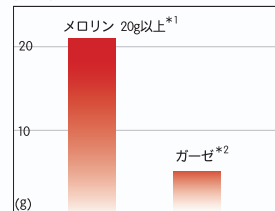


*1 社内資料
*2 医科学: 64, Suppl. 62-63, 1994

(図2) メロリン

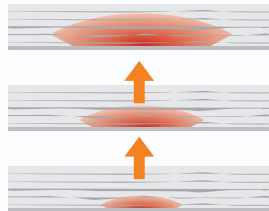

一般ガーゼ

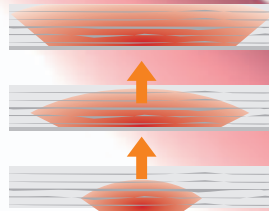


<創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム>

- 創傷適用面に多孔性ポリエステルフィルムを採用。
- 適用部に固着しにくく、ドレッシング交換時の患者の痛みや不快感を低減。(図3)
- 無数の小さな穴から液体をスムーズに通過させ、素早く滲出液を吸収。(図4)



(図3)

(図4)

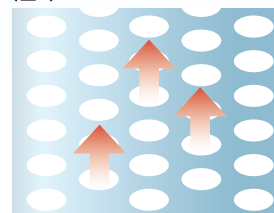

豊富なバリエーション

滅菌済と未滅菌の2タイプ

滅菌済タイプ: オートクレーブ滅菌処理されているので、
包装から取り出してすぐに
ドレッシング交換が可能。

未滅菌タイプ: オートクレーブ滅菌^{*3}が可能。

*3 オートクレーブ滅菌の条件につきましては「日本薬局方」を参照下さい。

使用方法




- ①創の大きさに適したサイズを選択する。
- ②光沢のあるポリエステルフィルム面を適用部に貼付する。

- ③貼付したドレッシングは、フィルムやテープなどで固定する。



- ④滲出液の漏れ、周囲の剥がれ等を観察したら交換する。

「ユニークな3層構造」

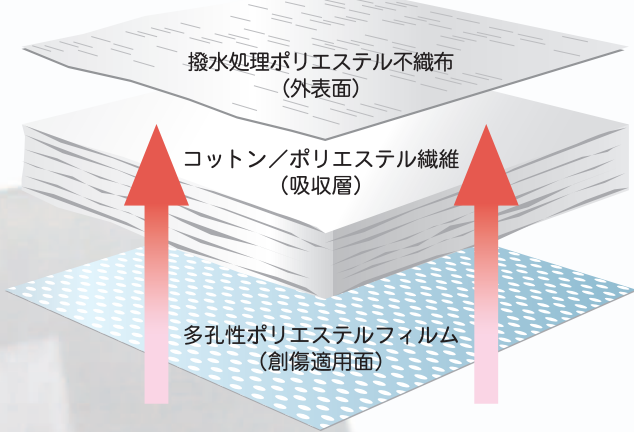

創傷面

使用例

ガーゼの代わりとして様々な創傷処置にご利用いただけます。

熱傷にアルギン酸塩ドレッシングを使用後、2次ドレッシングとして使用。※



採皮創に軟膏処置ガーゼとして使用。※



様々な用途にお使いいただけるように、豊富なサイズを取り揃えました。

20cm×30cm

10cm×20cm

10cm×10cm

5cm×5cm

外傷性皮膚欠損創



褥瘡/皮膚潰瘍 ※



※写真提供: 函館中央病院 形成外科診療部長 木村中先生



メロリン [®]		(滅菌済)
製品番号	サイズ (cm)	枚/箱
66974932	5×5	25
66974933	10×10	10
66974940	5×5	100
66974941	10×10	100
66974939	10×20	100

メロリン [®] 未滅菌					
製品番号	サイズ (cm)	枚/箱	製品番号	サイズ (cm)	巻/袋
66974942	10×10	150	66974930	50×700	1
66974943	10×20	75			
66974944	20×30	25			

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000
 (一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード 34654000)

届出番号:13B1X10222WC0005

滅菌済のものは、
 オートクレープ滅菌処理されています。

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000
 (一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード 34654000)

届出番号:13B1X10222WC0006

使用目的、効能又は効果

創傷、術後創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。
 本品においては創接触面には、創面に固着しないような加工が施されている。

禁忌・禁止：再使用禁止

※使用方法及び使用上の注意等の詳細については添付文書をご参照ください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社
 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL: 03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755
 仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652
 東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916
 名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420
 大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993
 広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325
 福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

®Trademark of Smith & Nephew.

© 2010-2017 Copyright Smith & Nephew KK

販売店