

医療用品(4) 整形用品  
一般医療機器 皮膚接合用テープ(JMDNコード: 70438000)

ロイコストリップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 1) 再使用禁止
- 2) 本品を貼付する皮膚に血液、油分(軟膏・クリーム含む)、水分等が付着している場合や体毛が濃い部分には、そのまま上から貼付しないこと。[本品の粘着力が低下したり、そのまま貼付すると十分に粘着せず、貼付中に剥がれてしまう恐れがある。]
- 3) 感染創(膿が出ている、発赤、発熱、腫れ、悪臭などの異常がある傷)もしくは感染が疑われる部位には、使用しないこと。[傷の悪化、感染の悪化、治癒の遅延につながる可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

形状及び構造

本品は数本のストリップが1枚のライナー(剥離紙)上に貼られ1枚あるいは2枚以上のライナーが滅菌包装されている。

<各部の名称>

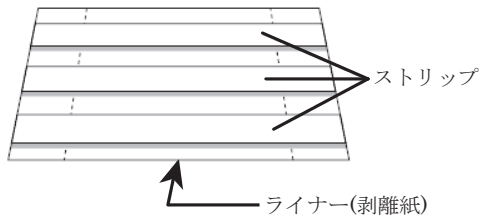

サイズ・包装

製品番号	サイズ(mm)	入数/袋	入数/箱
66002876	4×38	8本	50袋
66002903	4×76	4本	50袋
66002878	6.4×76	3本	50袋
66002879	6.4×102	5本	50袋
66002880	13×102	6本	50袋
66002881	26×102	4本	25袋

【使用目的又は効果】

本品は、皮下縫合後の表皮接合、けが、小切開後の接合、抜糸後の皮膚の固定等に用いる皮膚接合用テープである。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、1回限りの使用のみで使用できない。

1. 準備




- 1) 創傷部を清潔にし、必要に応じて止血処理を行う
- 2) 創傷部の周囲をアルコール、ポビドンヨード等で消毒・脱脂し、乾燥させる。

**注意** 貼付部が乾燥していないと、はがれやすくなるので、注意すること。

- 3) 創傷部の接合に適したサイズのストリップを選び、使用する直前に個包装を開封する。

2. 貼付

- 1) ストリップの端を引っ張り、ライナーの切り込みを切断する。(図1)
- 2) ライナーの端を、切り込みから先だけはがす。(図2)
- 3) ストリップの端を持ち、ライナーを全部はがしてから、最初のストリップは創部の中央に位置するよう、ストリップの半分を貼付する。(図3)

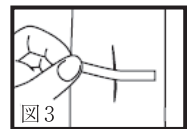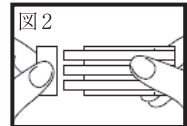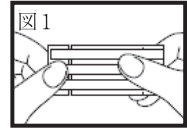


**注意** ストリップは、創面に対して直角の向きになるように貼付する。

- 4) 手指または鑷子で創縁を引き合わせ、ストリップの残り半分を確実に貼付する。

**注意** 皮膚に緊張がかかると、皮膚の引きつれや水疱の原因になることがあるので注意すること。

- 5) 続いて、他のストリップを約3mmの間隔を開けて平行に貼付する。(図4)

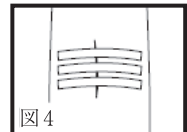

**注意** ストリップは、創部が十分に閉鎖するように貼付すること。

3. 除去

- 1) 創部が十分に閉鎖したら、ストリップの端を両側から上部に持ち上げるようにして、創部の縁まではがす。
- 2) 創部は、創傷面からそっと持ち上げるようにしてはがす。

**注意** はがすとき、創部が裂開しないように十分注意すること。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

使用中は、感染の有無を確認するため、頻繁に観察すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により、水疱、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 発熱、疼痛、発赤、膨張、異常な臭気等、感染の兆候がみられたときや、皮膚障害等の異常がみられたときは、本品を除去し、適切な処置をすること。
- 3) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 4) 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- 5) 本品を再滅菌しないこと。

2. 不具合・有害事象

(1) 重大な有害事象

- 1) 本品が皮膚に強く粘着していることで、本品を剥がす際に発生する皮膚の異常(表皮剥離、発疹、発赤、疼痛など)。
- 2) 傷に腫れやむくみが発生することで、本品が引っ張られ、本品の端部付近の皮膚に過度の緊張がかかることがあり、

W-C010-001

20038



皮膚の引きつれや水疱などの異常が皮膚に生じることがある。

(2)その他の有害事象

- 1) 本品の使用に際して発生する皮膚異常（腫れ、水疱、発赤、発疹、ただれ、掻痒感、色素沈着、瘢痕形成など）。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法：高温多湿を避けて室温で保管すること。
2. 使用期限：製品包装に記載（自己認証による）。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

スミス・アンド・ネフュー株式会社

東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL：03-5403-8930 FAX：03-5403-8931