

Smith+Nephew

医療施設で採用※の絆創膏

# オプサイト◇ Post-Op II

(ポストオプツー)



医療品質※を  
ご家庭でも

濡らしたくない浅いキズに  
ムレにくい防水絆創膏



高吸収



防水性  
ムレにくい



傷にくっつき  
にくい

※ 医療介護関連施設で採用 2022年2813施設

# ムレにくい防水絆創膏

防水性で水仕事や入浴が可能。  
細菌を透過させず二次感染を防止。




防水  
仕様

## 水蒸気を透過する ポリウレタンフィルム

- ✓ 汗や傷からの液などの水分が溜らず、ムレにくく快適
- ✓ 絆創膏の固定性が向上

### イメージ図

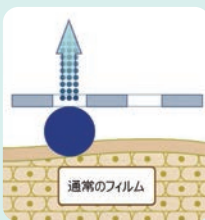

REACTIC<sup>®</sup>フィルムは水となじみやすい構造で、フィルム面に水分分子がすばやく染み込み、多くの水分を速やかに蒸散させます。

### 使用例

## すり傷やきり傷などの浅い傷、





## 傷にくっつきにくい高吸収パッド

パッドに傷が固着しにくく、はがすときの痛みが少ない。  
通常のガーゼに比べて吸収量の多い素材を採用。



### 吸収イメージ




オプサイト<sup>®</sup> Post-Op II



弊社ハイドロコロイド:レプリケア<sup>®</sup> ウルトラ

## 低アレルギー性のアクリル系粘着剤

- ✓ 格子状に塗布した粘着材で皮膚への刺激を軽減

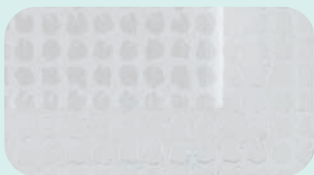

## 処置や手術の後の治った傷の保護

などに使用いただけます。



足



脚



腹

## 使用方法

ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

- 必要に応じて貼る部位の除毛をしてください。
- 貼る部位を洗浄、または必要に応じて消毒します。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように十分洗浄し余分な水分はよく拭き取ってください。

1



「1」と書かれた裏紙をはがします。

2



パッド部分が傷全体を覆うように貼ります。

3



よくなじませます。

4



「2」と書かれているキャリアーをはがし、フィルムを皮膚になじませます。

## はがし方




フィルムの端を少しはがして持ち、他方の手で貼付面を軽く押えてフィルムを貼付面とほぼ平行に引っ張りながらはがす。

## Q. どのサイズを選べば良いですか？

**傷の周りの皮膚も十分に  
覆えるパッドサイズを  
ご選択ください。**

とくに滲出液が多い場合、  
小さいサイズでは  
吸収パッドも小さいため、  
交換が早まります。

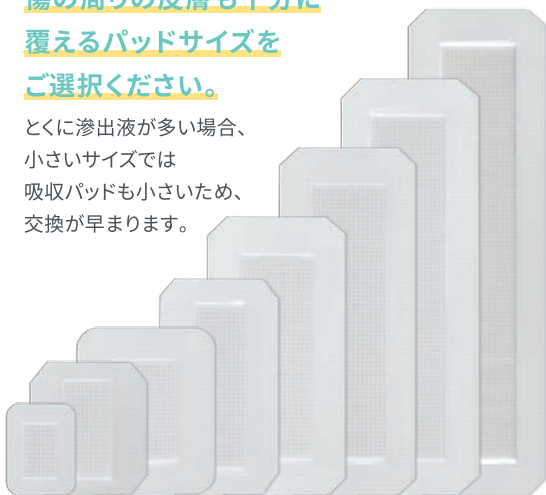

4×2.5 7.3×3.7 7.5×5 12×3.7 15×5.5 20×5.7 25×5.7 30×5.7  
パッドサイズ(cm)

## Q. 貼付中に入浴や シャワー浴はできますか？

**防水フィルムのため、  
入浴やシャワー浴が可能です。**

フィルム部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。  
パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換して  
ください。

## Q. 何日ごとに交換したら良いですか？

**フィルムが破れたり、フィルムの周囲や  
カテーテルラインにそって浮いてしまったり、  
外界との交通が見られる場合は、  
交換してください。**

最長は7日間ですが、使用開始して初めの時期は、  
傷を観察する目的で早めの交換をお勧めします。

※吸収状態に関わらず7日間を限度に交換してください。

## オプサイト<sup>®</sup> Post-Op II

一般医療機器 救急絆創膏

製品番号	全長サイズ (cm)	パッド部サイズ (cm)	枚/箱	標準価格 (税込)	1枚当たり 標準価格
66000708	6.5×5	4×2.5	100	9,180円	92円
66000709	9.5×8.5	7.3×3.7	20	3,880円	194円
66000710	12×10	7.5×5	10	2,860円	286円
66000712	15.5×8.5	12×3.7	20	6,530円	327円
66000713	20×10	15×5.5	20	7,550円	378円
66000714	25×10	20×5.7	20	8,570円	429円
66000715	30×10	25×5.7	20	9,180円	459円
66000716	35×10	30×5.7	20	10,200円	510円

使用目的  
又は効果

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護。

禁忌・禁止<sup>\*</sup> 〈使用方法〉再使用禁止

販売名 オプサイト Post-Op II

※ 詳細は添付文書をご参照ください。

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

(一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード 70444000)

届出番号 13B1X10222WC0002

実物大 6.5×5cm



スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号

TEL.03-5403-8830

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

◊Trademark of Smith+Nephew

© 2023 Smith+Nephew

OP-3  
202308-1