

RENASYS[◇] EDGE

Guide pratique

Smith+Nephew

RENASYS[◇] EDGE
Système de thérapie par
pression négative



Système RENASYS[®] EDGE




RENASYS[®] EDGE
Système de thérapie par pression négative

Mise en route de l'appareil et démarrage de la thérapie

Appuyer sur le bouton pour **démarrer ou mettre en pause** la thérapie.




Allumer la console.

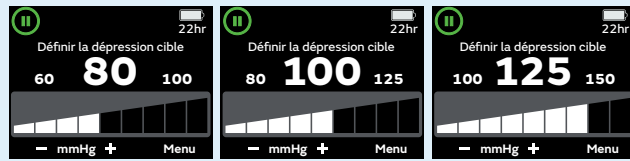

Installation d'un nouveau réservoir



Assurez-vous que la thérapie est en pause ou que la console est **éteinte**.

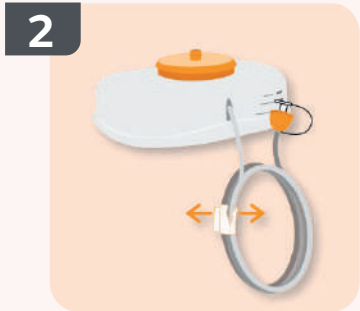


Retirez le ruban adhésif autour de la tubulure du réservoir et libérez la tubulure.



Positionnez le réservoir de manière à ce que la tubulure soit orientée vers l'arrière de la console.



Enclenchez la console sur le réservoir jusqu'à entendre un "click".

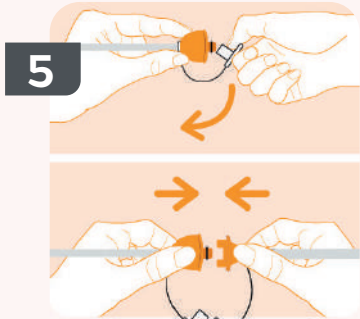


Retirez les capuchons des deux connecteurs à déclic et emboîtez-les jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.




Débutez la thérapie en appuyant sur le bouton.

RENASYS[®] Pose d'un pansement kit Mousse et kit Gaze RENASYS avec la technologie Soft Port.


Nettoyage et détersion

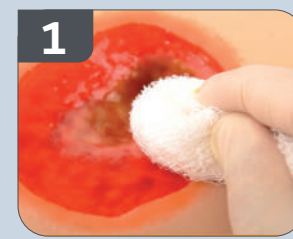

Effectuer la détersion sur les tissus dévitalisés ou nécrosés. Nettoyer la plaie et la tamponner pour la sécher.

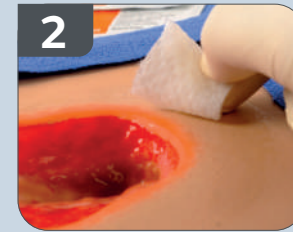


Si nécessaire, protéger la peau péri-lésionnelle contre l'exposition à l'humidité et à l'adhésif en appliquant un protecteur cutané.

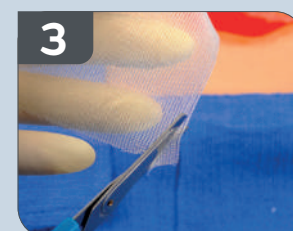


Si nécessaire, une interface non-adhérente peut être appliquée. Découper une couche d'interface non-adhérente et la placer sur la plaie.

Si le pansement de la plaie est réalisé avec un kit mousse...

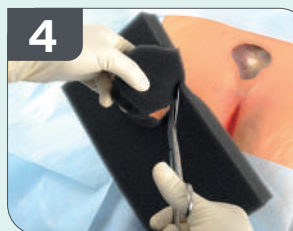

Découper la mousse pour l'adapter à la taille et à la forme de la plaie, puis insérer la mousse dans la plaie. Éviter de surcharger. La mousse doit remplir complètement la cavité de la plaie. Il peut être nécessaire d'empiler des morceaux de mousse pour les plaies profondes.

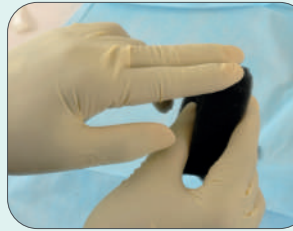

Précaution : Si plusieurs morceaux de mousse sont nécessaires pour réaliser le pansement, compter et noter le nombre de morceaux présents pour vous assurer que tous les morceaux sont retirés lors du changement de pansement afin de minimiser les risques de rétention et d'infection.



La mousse doit être coupée pour s'adapter au lit de la plaie. Ne pas forcer ou tasser la mousse dans des zones de la plaie qui pourraient endommager les tissus sous-jacents.

Ne pas couper la mousse directement au-dessus de la plaie pour éviter que des fragments ne tombent dans la plaie.

Si le pansement de la plaie est réalisé avec un kit gaze...



Appliquer une couche de gaze humidifiée avec une solution saline sur le lit de la plaie. Déplier la gaze humidifiée restante et remplir toute la cavité de la plaie. Éviter de surcharger la plaie.



Précaution : Si plusieurs morceaux de gaze sont nécessaires pour combler la plaie, compter et noter le nombre de morceaux présents pour s'assurer que tous les morceaux sont retirés lors d'un changement de pansement afin de minimiser le risque de rétention et d'infection.




Retirer les aides à l'application du film adhésif étape par étape au niveau de la plaie. Il est important de couvrir l'ensemble du produit de comblement et la peau périlésionnelle.



Remarque : Éviter d'étirer ou de tirer le film transparent pour minimiser la tension ou les traumatismes sur la peau péri-lésionnelle.

Superposer les bords du film adhésif d'au moins 7,5 cm (3 pouces) lors de l'utilisation de plusieurs morceaux de film transparent.

Application du RENASYS[◇] Soft Port

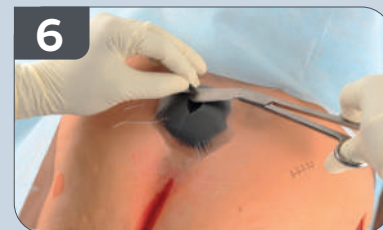

Découper une ouverture circulaire (d'au moins 2 cm de diamètre) au centre du de la plaie, au-dessus du produit de comblement.



Retirer le support adhésif du pansement RENASYS[◇] Soft Port et l'aligner directement sur l'ouverture du film adhésif de la plaie. Appliquer une légère pression pour ancrer le Soft Port au film adhésif.



Lisser le pansement tout en retirant le cadre du Soft Port RENASYS[◇].




Fixer le Soft Port RENASYS[◇] au patient conformément à votre protocole local. S'assurer que le disque d'aération, situé près du connecteur rapide orange, n'est pas couvert ou obstrué.



Connecter le Soft Port RENASYS[◇] à la tubulure du réservoir en connectant ensemble les connecteurs orange jusqu'à entendre un clic, indiquant que la connexion est sécurisée. Lancer la thérapie sur la console RENASYS[◇] en s'assurant qu'elle fonctionne au niveau prescrit de thérapie. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la pompe RENASYS[◇] pour obtenir des instructions de fonctionnement complètes. Le pansement final doit être complètement comprimé, bien ajusté et exempt de fuites.

Alertes

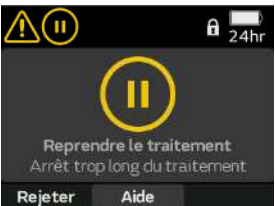

Arrêt trop long du traitement



Batterie faible



Fuite d'air modérée



Pompe en surchauffe

Alarmes



Obstruction




Batterie très faible



Réservoir non détecté



Échec de la batterie

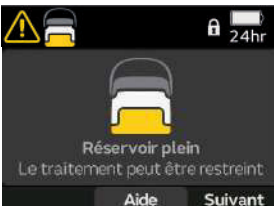

Réservoir plein



Pompe en surchauffe



Fuite d'air critique



Aspiration trop forte

Fabricant :
Advanced Wound Management
Smith & Nephew, Inc.
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN, Royaume-Uni

Distributeur en France :
Smith & Nephew S.A.S.
40/52 Boulevard du parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE—France
T +33(0) 800 111 330
F +33(0) 1 46 41 24 93
Société par Actions Simplifiée au
capital de 3.366.150 euros
577 150 840 R.C.S. Nanterre.

www.smith-nephew.com/fr-FR

©Marque de commerce de Smith+Nephew
Toutes les marques de commerce sont reconnues
©Juin 2023 Smith+Nephew
AWM-AWD-39651-fr | GMC1717
W-24-096 | Octobre 2024

Glossaire des icônes et des symboles

Boutons de la console

	Play/Pause
	Sourdine
	Déconnexion du réservoir
	Verrouillage/déverrouillage de la console.
	Boutons multifonctions

Voyants de la console

	Système OK
	Avertissement batterie
	Alarme/Alerte
	Indicateur de charge

Icônes de la batterie

	Recharge complète
	Bas
	Critique
	Recharge en cours
	Recharge complétée
	Défaillance de la batterie

Icônes sur l'écran principal

	Mode connecteur Y
	Mode intermittent
	Mode continu
	Pause
	Système OK
	Alarme/Alerte
	Fuite d'air critique
	Fuite d'air modérée
	Blocage
	Réservoir manquant
	Système défaillant
	Alerte température console trop élevée
	Alarme température console trop élevée
	En pause trop longtemps
	Réservoir plein
	Vérouillée
	Bluetooth actif
	En sourdine