



ALLEVYN[®] Apósitos: Guía de aplicación para zonas difíciles

Los apósitos ALLEVYN[®] están disponibles en una variedad de formas y tamaños que, dependiendo de la herida, pueden utilizarse en diferentes zonas del cuerpo.^{1-16†}

ALLEVYN Apósitos para el talón



Con un apósito ALLEVYN LIFE o GENTLE BORDER Heel, retire la película protectora central y coloque el talón sobre el apósito, con los lóbulos superiores en ángulo recto con la pierna.



Retire la película protectora de un lóbulo superior, dóblela sobre el maléolo y fíjela en su sitio. Repita con el otro lóbulo superior.



Retire la película del lóbulo inferior y fíjela. El apósito debe estar ahora en su lugar. Asegúrese de que el apósito se adhiera a la piel alisando los bordes alrededor..

ALLEVYN Apósitos para las manos



Tome un apósito ALLEVYN HEEL y haga 4 cortes equidistantes en el arco del apósito. Los cortes deben tener aproximadamente 1,5 cm de profundidad, dependiendo del tamaño de los dedos.



Coloque el apósito en la mano. Introduzca los dedos por los 4 cortes realizados. Asegúrese de que el apósito está bien ajustado.



Para fijarlo, aplique el film transparente OPSITE[®] en la parte inferior del apósito, en la base de la palma de la mano. Esto asegurará la parte posterior y el frente del apósito. Asegúrese de que el OPSITE forma un borde en el apósito y no cubre completamente el ALLEVYN HEEL.

ALLEVYN Apósitos para los dedos de la mano



Utilice un apósito ALLEVYN ADHESIVE o GENTLE BORDER (por ejemplo, 7,5 cm x 7,5 cm). Asegúrese de que la piel circundante está seca. Gire el apósito en diagonal y coloque el dedo en la esquina del apósito.



Levante el apósito sobre la punta del dedo. Dale la vuelta al dedo y fije las esquinas a través del dedo a su vez.



Asegúrese de que el apósito se adhiere a la piel sin arrugas. Igualar los bordes en todo el contorno.

ALLEVYN Apósitos para los dedos del pie



Utilice un apósito cuadrado ALLEVYN (por ejemplo, 7,5cm x 7,5cm BORDURA SUAVE o ADHESIVO) y gírelo en diagonal. Asegúrese de que la piel circundante está seca. Coloque el dedo del pie en el borde del apósito.



Levante el apósito sobre la punta del dedo. Gire los bordes del apósito hacia la parte posterior del dedo..



Asegúrese de que el apósito se adhiere al dedo y de que los bordes son uniformes en todo el contorno..

ALLEVYN Apósitos para los dedos del pie



Utilizar un apósito ALLEVYN NON-ADHESIVE o GENTLE pequeño. Doble el apósito por la mitad. Haga 2 cortes en el apósito con una separación de 1 cm/2 cm.



Introduzca los dedos de los pies en los cortes realizados. Asegúrese de que haya suficiente apósito entre los dedos.



Fijar en su sitio con OPSITE. Asegurarse de que el film OPSITE forma un borde sobre el apósito y no cubre completamente el apósito ALLEVYN.

ALLEVYN Apósitos para codos

Las prominencias óseas, como los codos, son propensas a desarrollar lesiones. Los apósitos ALLEVYN ADHESIVE se adaptan a los contornos del cuerpo y son cómodos para el paciente.⁸⁻¹⁰ Los apósitos ALLEVYN GENTLE BORDER permiten flexibilidad y se adaptan a zonas difíciles y zonas del cuerpo propensas al movimiento.³⁻⁶



ALLEVYN ADHESIVE SACRUM



ALLEVYN GENTLE BORDER Heel

ALLEVYN Apósitos para la mama

La cirugía mamaria a menudo provoca heridas que deben cubrirse con un apósito. Los apósitos ALLEVYN GENTLE BORDER permanecen suaves sobre la piel y son adaptables para ajustarse a una herida en cualquier zona alrededor de la mama.^{3,5,17,18} Los apósitos ALLEVYN LIFE son adaptables¹⁻¹⁹ y pueden aplicarse en cualquier zona difícil del cuerpo.^{1,2}



ALLEVYN LIFE

Retirada de apósitos de silicona

Para retirar el apósito, levante una esquina del apósito y despéguelo lentamente hasta retirarlo por completo de la herida.

¡Por favor, tener en cuenta

Realizar un corte en un apósito ALLEVYN puede aumentar la posibilidad de fuga de fluidos y bacterias y puede comprometer las propiedades de barrera bacteriana proporcionadas por el apósito.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso (IFU) del producto antes de utilizarlo.

ALLEVYN LIFE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66801067	10.3cm x 10.3cm	10
66801068	12.9cm x 12.9cm	10
66801069	15.4cm x 5.4cm	10
66801070	21cm x 21cm	10
66801304	25cm x 25.2cm Heel	5
66801306	17.2cm x 17.5cm Sacrum	10
66801307	21.6cm x 23cm Sacrum	10
ALLEVYN GENTLE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66802128	5cm x 5cm	10
66802129	10cm x 10cm	10
66802130	10cm x 20cm	10
66802131	15cm x 15cm	10
66802132	20cm x 20cm	10
66802133	20cm x 50cm	2

*Apósitos ALLEVYN LIFE, ALLEVYN GENTLE BORDER, ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, ALLEVYN ADHESIVE, y ALLEVYN NON-ADHESIVE.

Referencias: **1.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80–87. **2.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50–59. **3.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. **4.** Smith+Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. **5.** Smith+Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **6.** Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK*. 2016;12(2):70–78. **7.** Stephen-Haynes J, Greenwood M. Clinical evaluation of Allevyn Gentle Border Lite within one health trust. *British Journal of Nursing*. 2011;20(20):S36–S42. **8.** Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17–26. **9.** Bale S, Squires D, Varnon T, Walker A, Benbow M, Harding K. A comparison of two dressings in pressure sore management. *J Wound Care*. 1997;6(10):463–466. **10.** Amione P, Ricci E, Topo F, et al. Comparison of Allevyn Adhesive and Biatain Adhesive in the management of pressure ulcers. *J Wound Care*. 2005;14(8):365–370. **11.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants. Internal Report. DS/14/318/R. **12.** Williams C, Young T. Allevyn adhesive. *Br J Nurs*. 1996;5(11):691–693. **13.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224–228. **14.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants Internal Report DS/14/318/R. **15.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224–228. **16.** Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing*. 1994;3(20):1049–1050, 1052–1043. **17.** Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. *Wounds UK*. 2012;8(4):110–118. **18.** Smith+Nephew 2018. Volunteer Evaluation of Wound Care Dressing Product Features. Internal Report. AWM/AWC/001/v1. **19.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95.

Advanced Wound Management, Smith+Nephew S.A.. Fructuós Gelabert, 2 y 4, 08970 - Sant Joan Despí (Barcelona) España. Tel + 34 93373 7301 Línea directa: +34934759244 ©Noviembre 2024 Smith+Nephew. ◊ Marca registrada de Smith+Nephew. AWM-AWC-40359-es V1 ALLEVYN awkward areas poster 1124

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66800833	5cm x 5cm	10
66800834	7.5cm x 7.5cm	10
66800835	10cm x 10cm	10
66800836	5.5cm x 12cm	10
66800837	8cm x 15cm	10
66800840	15cm x 15cm	10
66801012	10cm x 20cm	10
66801013	8.6cm x 7.7cm Oval	10
ALLEVYN LIFE financiado por el S.N.S		
Código S+N	C.N.	Tamaño
66801742	473025.8	15,4cm x 15,4cm
66801743	491845.8	21cm x 21cm
ALLEVYN GENTLE financiado por el S.N.S		
Código S+N	C.N.	Tamaño
66802140	478578.4	10cm x 10cm
66802141	491852.6	15cm x 15cm
ALLEVYN HEEL financiado por el S.N.S		
Código S+N	C.N.	Tamaño
66000695	488494.4	10cm x 10cm (x2)

ALLEVYN ADHESIVE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66000043	7.5cm x 7.5cm	10
66000599	10cm x 10cm	10
66000044	12.5cm x 12.5cm	10
66000801	15cm x 15cm	10
66000045	17.5cm x 17.5cm	10
66000046	22.5cm x 22.5cm	10
66000451	22cm x 22cm Sacrum	10
66000700	17cm x 17cm Sacrum	10
ALLEVYN NON-ADHESIVE		
Código S+N	Tamaño	Un.
66007637	10cm x 10cm	10
66007335	10cm x 20cm	10
66000093	15cm x 15cm	10
66007638	20cm x 20cm	10
ALLEVYN GB LITE financiado por el S.N.S		
Código S+N	C.N.	Tamaño
66801888	477059.9	Oval 8,6cmx7,7cm
66801887	477067.4	10cm x 20cm
ALLEVYN NON-ADHESIVE financiado por el S.N.S		
Código S+N	C.N.	Tamaño
66000352	483297.6	10cm x 10cm
66000777	483305.8	15cm x 15cm

ALLEVYN ADHESIVE financiado por el S.N.S

Código S+N	C.N.	Tamaño
66000349	483313.3	12,5cm x 12,5cm
66000777	491837.3	15cm x 15cm

ALLEVYN SACRUM financiado por el S.N.S

Código S+N	C.N.	Tamaño
66000694	489468.4	17cm x 17cm