

医療用品(4)整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDNコード:34864000)
(一般医療機器 カテーテル被覆・保護材(JMDNコード:70444000))
プリマポア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は、通気性に優れた不織布にアクリル系粘着剤を塗布し、非固着性の吸収パッドを付加したドレッシング材である。

2. 機能及び動作原理

創部又は注射針、カテーテル等の穿刺部を保護・固定する。非固着性の吸収パッドは創面に固着しにくく、ドレッシングの交換時の疼痛を緩和する。不織布シートは優れた通気性と伸縮性を持つ。

サイズ・包装

製品番号	サイズ(cm)		枚/箱
	全長	パッド	
7133	7.2×5	4×2.5	100
7135	8.3×6	5.7×3.5	50
66000317	10×8	5.3×4.5	20
66000318	15×8	11×4	20
66000319	20×10	15.5×5.3	20
66000320	25×10	20×5.3	20
66000321	30×10	25×5.3	20
66007140	35×10	29.5×5.3	20

【使用目的又は効果】

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、1回限りの使用のみで再使用はできない。

必要に応じて創傷部を十分に清潔にし、止血処置すること。

1. 創傷部又は穿刺部の周囲をポピドンヨードまたはアルコールにて消毒、脱脂、乾燥させる。
2. 適当なパッドサイズの本品を選ぶ。
3. 離けい紙をはがし、本品を創傷部又は穿刺部に貼付する。
4. 本品をはがすときは、端を少しはがして持ち、他方の手で貼付面を軽く押えて貼付面に対して180度逆方向へはがす。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 明らかに創部及び注射針やカテーテル穿刺部に感染を有する患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用中に、創部及び注射針やカテーテル穿刺部の周囲の皮膚に本品が原因と推察される臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行う。また、患者の全身状態の悪化、全身管理の不足等によっても、創部及び穿刺部から周囲の皮膚に感染症状が現れることがある。感染の兆候に十分注意し、臨床的感染が認められた場合には、原則として使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 3) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使

用を中止し、適切な治療を行うこと。

- 4) 創傷治癒促進を目的とする場合には、適切な創傷被覆材をご利用下さい。
 - 5) また、本品が破れたり、周囲やカテーテルラインにそって浮きが見られたり、外界との交通がみられる場合は、本品を交換すること。
 - 6) 本品をはがす際は、貼付面に対して180度逆方向へはがすこと。上に持ち上げると皮膚への刺激が強すぎることもある。尚、本品が固着してしまった場合には、生理食塩液等を染み込ませたガーゼ、もしくはテープ等の粘着製品の除去用剥離剤等を用いて貼付面をぬらしながらはがすこと。
2. 不具合・有害事象
- 本品の使用による不具合・有害事象としては以下の症状が発現することが考えられる。
- ・キズの感染症状
 - ・キズ及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
 - ・固着
 - ・疼痛
3. その他の注意
- 1) 本品は滅菌済で、包装の破損等がない限り無菌性は保証されているが、使用時に包装が破損又は汚損している場合には使用しないこと。
 - 2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
 - 3) 本品を再滅菌しないこと。
 - 4) 本品をカテーテル固定に使用する場合は、必要に応じてカテーテルをテープ等で固定し、本品を貼付して下さい。
 - 5) 本品をカテーテル固定に使用する場合は、定期的に穿刺部を観察すること。
 - 6) 本品を使用後に粘着剤の残渣が見られる場合には、生理食塩液等を染み込ませたガーゼ、もしくはテープ等の粘着製品の除去用剥離剤等を用いて除去して下さい。
 - 7) 万が一、個包装内の製品に不良が見られた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法: 高温多湿を避けて、室温で保管すること。
2. 使用期限: 製品包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
スミス・アンド・ネフュー株式会社
東京都港区芝公園二丁目4番1号
TEL: 03-5403-8930
FAX: 03-5403-8931

使用方法等は裏面もお読みください。

W-C004-001

20032



使用上の注意



してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用せず、医師の診察を受けること
 - 1) 感染がみられるキズ。(化膿していたり、ずきずきする痛み、腫れや熱、発赤のあるキズ。)
 - 2) すでにかさぶたができているキズ。
 - 3) 深いキズやひどいやけど、多量の体液(滲出液)が出ているキズには使用しないこと。
2. 一度開封したものを使用しないこと、一度使用したものを再使用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、使用を直ちに中止し、この添付文書を持って医師の診断を受けること
 - 1) 本品の使用により、キズに感染症状(化膿、痛み、腫れや熱、発赤)が見られた場合。
 - 2) 本品の使用により、キズの周りに発疹・発赤、かゆみ等のアレルギー反応が現れた場合。
 - 3) 数日間使用していても症状が良くならない場合。

【プリマポアの使用目的】

切り傷、擦り傷等の軽度のキズ、縫合したキズ等の保護することを目的とします。

【プリマポアの使い方】

貼り方

- 1 キズを水道水または生理食塩液等で十分に洗浄してください。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように水道水または生理食塩液等でよく洗浄してください。本品を交換する場合にも必ずこの操作を行ってください。
- 2 洗浄した後は、周囲の皮膚の余分な水分をよくふき取ってください。
- 3 適当なパッドサイズの本品を選んでください。
- 4 離けい紙をはがして、キズ等にはってください。

交換の目安

滲出液の漏れ、周囲の剥がれ等を観察したら交換してください。濡れたまま、または汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなります。

はがし方

本品をはがす際は、貼付面に対して180度逆方向へはがしてください。本品がキズに固着しているときは、水道水または生理食塩液等で貼付面をぬらしながらはがしてください。