

**医療用品(4)整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDNコード:34864000)**

**ハイドロ ジェントルエイド**

**再使用禁止**


**【禁忌・禁止】**

一度使用したものを再使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

1.形状及び構造

本品は高い水蒸気透過性を持ち、外からの液体やバクテリアの侵入を防ぐことができるポリウレタン製の背面フィルム層、皮膚・創傷面に接触するシリコーンゲル粘着剤を塗布した穴の開いたポリウレタン製の創傷接触層、その中間に吸水性に富む親水性フォーム製の吸収パッド層を挟み込んだ3層構造の救急絆創膏です。創傷接触層は離けい紙で保護されています。

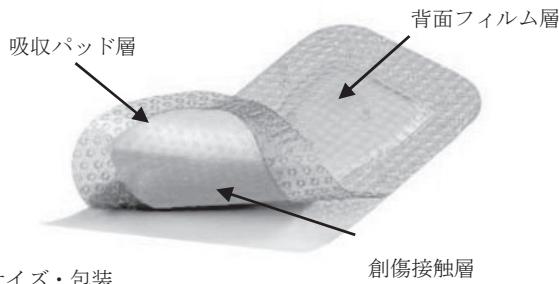

サイズ・包装

製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	枚/箱
66800833	5 x 5	3 x 3	10
66800834	7.5 x 7.5	5 x 5	10
66800835	10 x 10	7.5 x 7.5	10
66800836	5.5 x 12	3 x 9.5	10
66800837	8 x 15	5.5 x 12.5	10
66800840	15 x 15	12.5 x 12.5	10
66801012	10 x 20	7.2 x 17.2	10

2.機能及び動作原理

本品は吸収パッドで創傷からの滲出液を吸収・保持し、さらに液体やバクテリアの侵入を防ぐ防水性の背面フィルムにより、外部からの感染や汚染を防止する機能も持ち合わせた救急絆創膏です。

**【使用目的又は効果】**

傷及び周囲皮膚の被覆及び保護

**【使用方法等】**

本品は、1回限りの使用のみで再使用はできません。

1.本品を使用する前は必要に応じて除毛し、創部を消毒液または生理食塩液等で十分に洗浄してください。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように生理食塩液等で洗浄してください。洗浄後は創周囲の余分な水分をよく取り除いてください。(本品を交換する場合にも必ずこの処置を行ってください。)

2.周囲の健常皮膚も十分に被覆できる適切なサイズを選んでください。

3.本品を滅菌袋から取り出し、離けい紙を剥がし、粘着剤の付してある白色面を創部に直接被覆してください。

4.端がしわにならないように本品を創部に密着させ、創部の全周に確実に貼付されているか確認してください。

5.踵や肘といった貼付しにくい部位に使用する場合には本品を切って使用することもできます。切ってフォームが露出した部分は適切なテープ等で覆ってください。その際本品全体を覆わないようしてください。

6.使用開始して初めの時期は頻繁に観察してください。本品の背面層から滲出液の吸収状態が観察できるので、パッドの端から約0.5cmのところまで滲出液が広がった時を目安に交換してください。また、滲出液の吸収状態に関わらず7日間を限度として交換してください。

7.本品を剥がす時は、隅をそっと持ち上げ、ゆっくりと本品の背面側に引っ張るように創部から剥がしてください。

**【使用上の注意】**

1.重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中、創傷に本品が原因と考えられる臨床的感染(化膿、痛み、腫れや熱、発赤)が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 2) 本品を使用中に皮膚障害、発疹・発赤、かゆみ等のアレルギー反応と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 3) 創傷の観察を十分に行い滲出液の量や創の状態に応じ、適切な交換および処置を行ってください。

2.不具合・有害事象

一般的な救急絆創膏の使用における「不具合・有害事象」

- ・創の感染症状
- ・創傷および周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3.その他の注意

- 1) 本品は滅菌されています。包装のやぶれ等がない限り無菌性は保証されています。使用時に包装が破損又は汚損している場合は使用しないでください。
- 2) 万が一、個包装内の製品に不良が見られた場合には使用しないでください。
- 3) 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 4) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 5) 本品を再滅菌しないでください。
- 6) 次亜塩素酸塩液や過酸化水素液等の酸化剤との併用はしないでください。[ポリウレタン成分を分解することがあるため]

**【保管方法及び有効期間等】**

- 1.保管方法: 高温多湿、直射日光を避けて、室温で保管してください。
- 2.使用期限: 製品包装に記載しています。
- 3.使用期間: 1回の使用で最大7日間〔自己認証(当社データ)による〕。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

スミス・アンド・ネフューブル株式会社  
東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL: 03-5403-8930 FAX: 03-5403-8931

