

1. Legen Sie die Enden des Nahtmaterials durch die Schlaufe der Einfädelhilfe.



2. Ziehen Sie die Einfädelhilfe ab, um das Nahtmaterial in die Öse des Implantates zu fädeln. Wiederholen Sie Schritte 1 + 2, bis das gesamte gewünschte Nahtmaterial eingefädelt ist.



3. Identifizieren Sie die Insertionsstelle. Präparieren Sie das Loch mit dem in der Gebrauchsanweisung aufgeführten empfohlenen Präparationsinstrument.



4. Bringen Sie den Anker in das Gelenk ein und halten Sie dabei das Nahtmaterial gestrafft.




5. Führen Sie die beladene Ankeröse in den Knochen ein, bis der distale Gewindengang der Implantatschraube kurz vor dem Knochen positioniert ist. Spannen Sie das Nahtmaterial an, bis die entsprechende Gewebekompression erreicht ist. Klemmen Sie das Nahtmaterial fest, wenn gewünscht. Überprüfen Sie, ob das erste Gewinde des proximalen Ankers teilweise im Knochen positioniert ist.



6. Drehen Sie den inneren Plug nach unten, indem Sie den kleineren, schwarzen Knopf im Uhrzeigersinn drehen, bis mindestens ein Klick zu hören ist.



7. Drehen Sie den größeren, orangenen Knopf im Uhrzeigersinn, um die Implantatschraube in den Knochen zu drehen, bis die Lasermarkierung mit der Oberfläche des Knochens bündig ist.

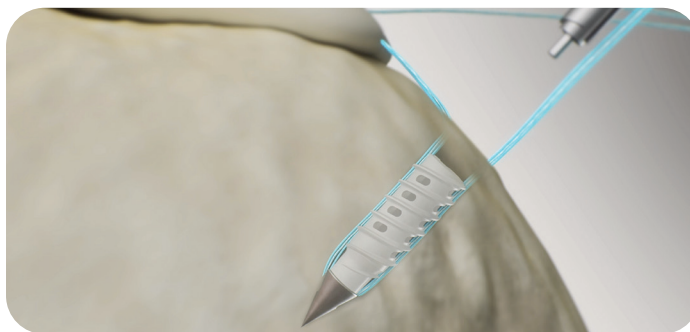

8. Ziehen Sie das Setzinstrument zurück und entfernen Sie es aus dem Gelenk.

Bestellinformationen

HEALICOIL[®] Knotless, knotenloser Fadenanker

Artikel-Nr.	Bezeichnung
72205135	HEALICOIL Knotless REGENESORB [®] Fadenanker, standard, steril
72205136	HEALICOIL Knotless REGENESORB Fadenanker, selbstschneidend, steril
72205137	HEALICOIL Knotless PK-Fadenanker, standard, steril
72205138	HEALICOIL Knotless PK-Fadenanker, selbstschneidend, steril
72205308	Bohrer, 4,75 mm, für HEALICOIL knotenlosen Fadenanker (für harten Knochen), wiederverwendbar
72201915	Konische Ahle, 3,8 mm, wiederverwendbar
72202621	Konische Ahle, 3,8 mm, steril
72203710	Gewindeschneider, 5,5 mm, wiederverwendbar
72203952	Gewindeschneider, 5,5 mm, steril

Alle Fotos und Diagramme dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht maßstabsgetreu dargestellt.

Für weitere Informationen zur Anwendung der in dieser Präsentation beschriebenen Produkte sowie Indikationen für den Gebrauch, Kontraindikationen und Produktsicherheitsinformationen beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung (IFU) des jeweiligen Produkts. Wenn Sie diese Instrumente bestellen möchten, wenden Sie sich in den USA bitte telefonisch an **+1 800 343 5717** oder an einen autorisierten Smith & Nephew-Außendienst.

Weitere Informationen finden Sie auf [smith-nephew.de](https://www.smith-nephew.de)

Sports Medicine
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810

Kontakt Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4, Haus 21
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich
Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Schweiz
Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

◇Marke von Smith + Nephew.
©2020 Smith+Nephew.
Alle Rechte vorbehalten.
22198-de V4 05/20