

+ Guida all'applicazione - Heel

Smith+Nephew

Grazie alla loro struttura esclusiva, le medicazioni in schiuma ALLEVYN COMPLETE CARE aiutano a **ridurre al minimo le perdite**^{*1-3} e a **prevenire i fattori** che contribuiscono alle lesioni da pressione^{†4-7}

ALLEVYN[®]
COMPLETE CARE
Medicazione in schiuma

Step di applicazione della medicazione in schiuma per tallone ALLEVYN COMPLETE CARE Heel



1 Selezionare la medicazione della misura appropriata, assicurandosi che il tampone assorbente copra interamente la ferita o l'area da proteggere.



2 Rimuovere il supporto protettivo centrale (1) e applicare il lato adesivo della medicazione alla parte posteriore della caviglia.




3 Staccare uno dei supporti protettivi (2) e fare aderire il lobo superiore alla caviglia lasciandolo bene. Rimuovere il supporto protettivo rimanente (2), coprire il lato opposto della caviglia e lisciare. Non tendere la medicazione.



4 Rimuovere i supporti protettivi restanti (3) su ciascun lato nella parte inferiore della medicazione. Sollevare e applicare la parte restante della medicazione sotto la base del piede, quindi sovrapporre i lobi per fissare la medicazione.



5 Spianare i bordi per rimuovere qualsiasi piega.

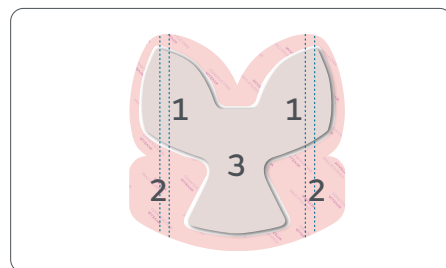


L'illustrazione precedente mostra l'ordine di rimozione dei supporti protettivi durante l'applicazione.

Medicazione a riposo



Medicazione sottoposta a forze di taglio

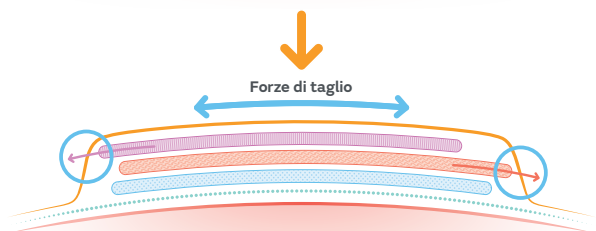


Tecnologia ShearDEFENSE[®] a strati indipendenti


- Il design brevettato a strati indipendenti consente agli strati di scorrere creando attrito all'interno della medicazione^{*4}

La medicazione ALLEVYN COMPLETE CARE maschera visivamente l'essudato assorbito, mantenendo un aspetto più gradevole per un periodo più lungo^{2,3,8-12} e indicando al contempo efficacemente il momento della sostituzione⁸


Ecco un diagramma utile per capire quando sostituire la medicazione

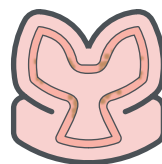

Sostituzione non necessaria

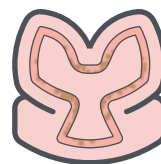

Considerare il cambio

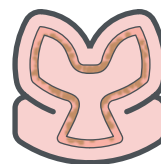

Sostituire



Rimozione

- Sollevare la medicazione da un angolo e staccarla delicatamente fino a rimuoverla del tutto.
- Smaltire secondo i protocolli clinici locali o gettare in modo igienico dopo l'uso.



Osservazione

In caso di utilizzo per la prevenzione di lesioni da pressione, esaminare frequentemente la cute alla ricerca di eventuali danni da pressione. Sollevare un angolo all'indietro, ispezionare e riposizionare quindi la medicazione.

*Come dimostrato in vitro. †Come dimostrato in silico e in vitro.

Riferimenti bibliografici: 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23-30. 3. Rossington A, et al. Wounds UK. 2013;9(4):91-95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Simon D, Bielby A. Wounds UK. 2014;10(3):80-87. 11. Joy H, et al. J Wound Care. 2015;24(7):312, 314-317. 12. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023.