

患者さま向け：PICO◇（ピコ）の正しい使いかた



Smith+Nephew

すること

作動確認をしましょう。

どのように

OKライトが緑に点滅しているか、ご確認ください。
正常作動時は、**OKライトが緑に点滅**しています。



* 本体の向きは逆さにしても問題ありません。
就寝時など適切にご使用いただけるよう医療スタッフの指示に従ってください。

すること

チューブを出す位置に気を付けましょう。

どのように

おしりに傷がある場合



腰側から出すとトイレや着替えの時など、
チューブが引っかからず、不便が少ないです。

足に傷がある場合



傷の位置により腰側
または、裾側から出します。

すること

磁力の影響を受ける機械の近くに置かないようにしましょう。

なぜ

PICOは磁石を内蔵しています。
磁力の影響を受ける機器からPICOを**10cm以上**離してください。



磁力の影響を受ける機器

ペースメーカーや、除細動器、人工内耳等の埋め込み型装置、
インスリンポンプ等の生命維持管理装置

おしらせ

定期的な振動は異常ではありません。

なぜ

PICOは治療に必要な陰圧をかける時に、
器械が作動して吸引します。
定期的に吸引動作を行いますので、この
時に振動します。





患者さま向け：PICO◇（ピコ）の正しい使いかた



Smith+Nephew

すること

シャワーに入るときには、注意しましょう。

どのように


- 長時間のシャワーは避けてください
- PICO本体は浴室に持ち込まないでください
- 創部を浴槽につけることはできません



シャワーの入り方

- ① オレンジボタンを押し、陰圧を止める。
- ② コネクター部分をねじり、PICO本体からドレッシングにつながっている接続チューブを外す。
- ③ 外した接続チューブの端は、チューブに水が入らないように、下向きにする。

※ PICO本体を外した際は、水が入らないように、接続チューブの端をラップなどで包んでください。また、ドレッシングも水浸しにならないようにラップなどで一時的に保護してください。

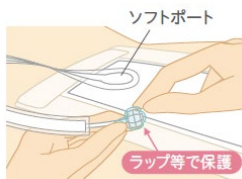

- ④ シャワーから出た時、ドレッシングが濡れている場合は、乾いたタオルなどで、水気を拭く。PICO本体と接続チューブのコネクターをつなぎ、オレンジボタンを押してドレッシングへの陰圧を再開する。

異常かな？と思ったら

アラームの確認をしましょう。



アラーム時の対応



低陰圧アラーム
(空気もれ)

ドレッシング交換アラーム

バッテリー低下アラーム



アラームが点滅した際は、下記連絡先にご連絡ください。

連絡先



日中：

夜間：