

オプサイト ウンド
オプサイト Post-OpII
オプサイト インサイズ

Smith+Nephew

OPSITE[◇]
Transparent Films




オプサイト[®] ウンド

「モイストウンドヒーリング」の考え方から 生まれたトランスペアレント ドレッシング

滲出液による湿潤を保ちつつ過剰な水分を
透過するフィルムです。

創傷部にじかに貼付することにより、
創傷の治癒に適した湿潤環境を
つくります。

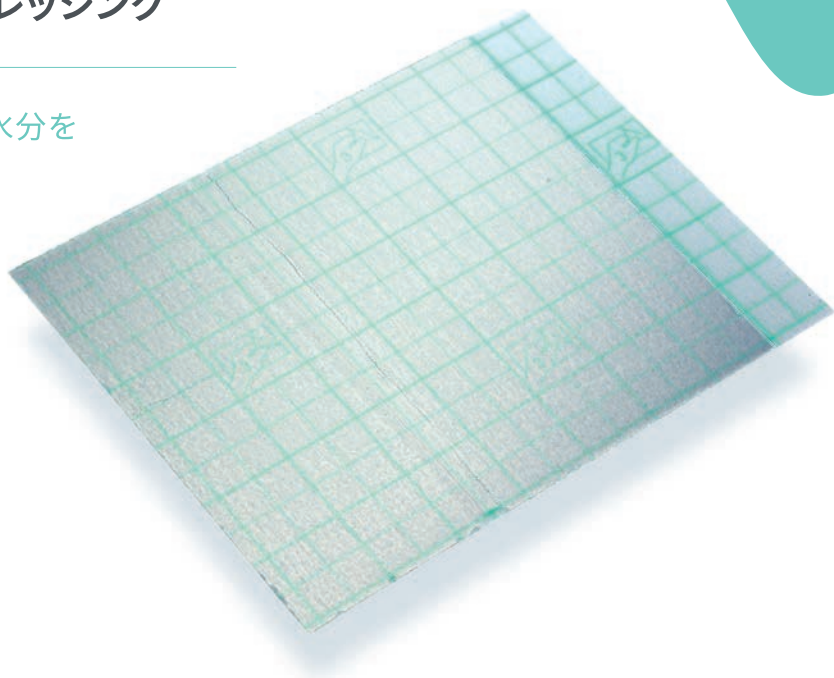

オプサイト ウンド

使用目的、効能又は効果

創深度Ⅱ以下の熱傷、採皮創（ドナーサイト）、縫合創、外傷性皮膚欠損創における上皮形成の促進、疼痛の軽減、創の保護及び感染防止

EOG滅菌済


製品番号	サイズ(cm)	枚／箱
4628	6×7	100
4630	10×12	50
4631	15×20	10
4632	12×25	20

管理医療機器 粘着性透明創傷被覆・保護材
JMDNコード:17428000
認証番号:20300BZY01176000

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【使用上の注意】
「使用方法」及び「使用上の注意」の詳細は添付文書をご参照ください。

- 透明なため、貼付したまま創傷部を観察することが可能
- 細菌を透過させないフィルムのため、二次感染を防止
- 防水性を有し、貼付したままでのシャワー浴や入浴が可能
- 薄く伸縮性のあるフィルム
関節などにも貼付しても、体の動きを妨げない

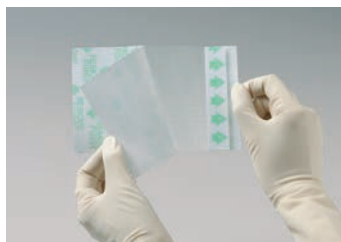

1.「REMOVE FIRST」と書かれた裏紙をはがします。



2.ドレッシングの粘着面を皮膚にあてます。



3.ドレッシングを貼付しながら「2」と書かれた裏紙をはがします。



4.キャリアーをはがし、ドレッシングをなじませます。

オプサイト[◇] Post-Op II

吸収パッド付きのトランスペアレントドレッシングが創傷を保護

親水性ポリウレタンフィルムと非固着性の吸収パッドを
組み合わせた創傷保護用のドレッシングです。
ドレッシング下の水分の貯留を防ぐため、
ムレによるドレッシングの剥がれを低減します。

親水性ポリウレタンフィルム REACTIC[◇]

オプサイト ウンドのトランスペアレントドレッシング
には、親水性ポリウレタンフィルム REACTICを
採用しています。

REACTICは水分に接すると水蒸気透過が高まる
特長があり、14,000g/m²/day/37°Cの水蒸気
を透過します*。

* 社内データ



オプサイト Post-Op II

使用目的、効能又は効果

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・
保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定
及び被覆・保護。

EOG滅菌済


製品番号	全長サイズ (cm)	パッド部サイズ (cm)	枚/箱
66000708	6.5×5	4×2.5	100
66000709	9.5×8.5	7.3×3.7	20
66000710	12×10	7.5×5	10
66000712	15.5×8.5	12×3.7	20
66000713	20×10	15×5.5	20
66000714	25×10	20×5.7	20
66000715	30×10	25×5.7	20
66000716	35×10	30×5.7	20

一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード:34864000
(一般医療機器 カテーテル被覆・保護材
JMDNコード70444000)
届出番号:13B1X10222WC0002

【使用上の注意】

「使用方法」及び「使用上の注意」の詳細は添付文書
をご参照ください。

- 健常皮膚への負担を考慮
 - ・ 低アレルギー性のアクリル系粘着剤を使用
 - ・ 粘着剤を格子状に塗布しているため、剥がしやすい¹⁾
- 細菌を透過させないフィルムにより、二次感染を防止
- 防水性を有し、貼付したままでのシャワー浴や入浴が可能
- 薄く伸縮性のあるフィルム
関節などにも貼付しても、体の動きを妨げない

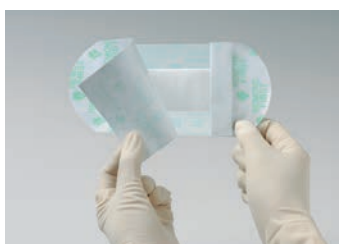


1. 「REMOVE FIRST」と書かれた
裏紙をはがします。



2. パッドが創傷部全体を覆うように
フィルムを貼付します。



3. 「REMOVE FIRST」と書かれている
残りの裏紙をはがします。

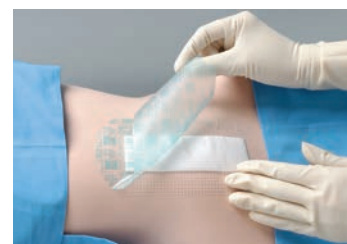


4. 「2」と書かれているキャリアーをはがし、
フィルムを皮膚になじませます。

オプサイト[®] インサイス

水蒸気透過性を有するポリウレタンフィルムの インサイス ドレープ

オプサイト インサイスは、水蒸気透過性を有し
皮膚呼吸を妨げません。

長時間にわたる手術でも創縁部に密着し、
皮膚常在菌の移動を防ぐことで術中創感染を
防止します。

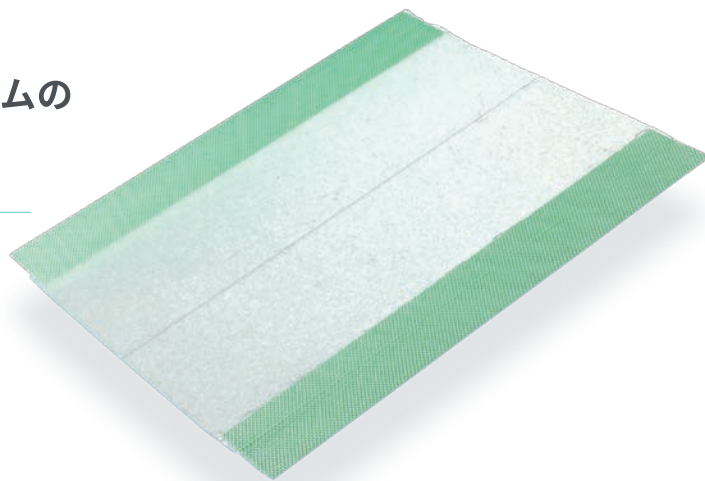

オプサイト インサイス

使用目的、効能又は効果

手術野の確保、術中感染予防

EOG滅菌済

製品番号	全長サイズ (cm)	透明フィルム部 サイズ(cm)	枚/箱
4975	10×14	10×12.5	50
4986	15×28	15×21	10
4987	28×30	21×30	10
4988	28×45	21×45	10
4989	45×55	45×48	10
4994	56×84	56×77	10

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ

JMDNコード:35531000

届出番号:13B1X10222WC0003


【ご注意】

貼付する前に通常の方法で皮膚消毒し、乾燥させてください。「使用方法」及び「使用上の注意」の詳細は添付文書をご参照ください。

- 術者の視界に影響を与えないよう、光の反射を抑えたフィルム
- 薄いにもかかわらず、破れにくい
 - ・ メスなどの鋭利なものによる切開は可能
- 薄いため皮膚になじみやすく、伸縮性も有するため、複雑な部位にも貼付可能
- 細菌を透過させないフィルムのため、術野の汚染防止に寄与



1. 2人で両端のグリーンハンドルを持ち、他の1人が白い裏紙をはがします。

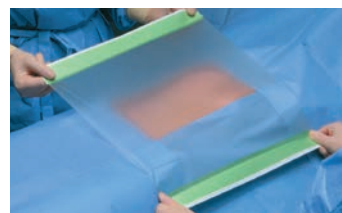

2. フィルムの下に空気が入らないように片側から押しつけるように貼付します。



3. 切開予定線を滅菌ガーゼで押さえ、しっかり貼りつけてください。



4. 端のグリーンハンドルの裏紙をはがして固定します。

References

1. Willie JC, et al. J Hospital Infection. 1993; 23: 113-121

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755

仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652

東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916

名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420

大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993

広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325

福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

°Trademark of Smith+Nephew
© 2009-2021 Smith+Nephew

販売店

OP-1
202110-2