

+ ALLEVYN[◇] Schaumverband Ferse nicht haftend ist anatomisch geformt und ermöglicht eine einfache Anwendung^{1,2} an Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen oder Hoden. Der Verband kann in Verbindung mit Kompressionstherapie verwendet werden und hält Flüssigkeiten unter Kompression zurück.^{3,4}

Smith+Nephew

ALLEVYN[◇]
NON-ADHESIVE
Schaumverband Ferse

Anwendung



1

- Die weiße Seite auf die Wunde auflegen



2

- Guten Kontakt sicherstellen



3

- Mit einer Fixierung sichern, z. B. OPSITE[®] FLEXIFIX Rolle mit transparenter Folie, OPSITE FLEXIFIX GENTLE Rolle mit transparenter Folie mit Silikon-Adhäsiv, Klebeband oder Verband


Entfernung

Zur Entfernung des ALLEVYN NON-ADHESIVE Schaumverbands Ferse die Fixierung oder den Verband entfernen und den Verband von der Wunde abheben.

Wechselhäufigkeit

In den frühen Phasen des Wundmanagements sollte der ALLEVYN NON-ADHESIVE Schaumverband Ferse gemäß den Vorschriften der betreffenden Klinik kontrolliert werden. Wenn das Produkt auf infizierte Wunden verwendet wird, sollte die Infektion untersucht und gemäß den Vorschriften der betreffenden Klinik behandelt werden. Verbände können bis zu 7 Tage ununterbrochen angelegt bleiben, bzw. bis das Exsudat sichtbar wird und sich auf weniger als 1,5 cm an den Rand des Wundkissens annähert (je nachdem, was zuerst eintritt).

Die nachstehende Grafik dient nur zur Orientierung. Die Entscheidung zum Verbandwechsel sollte anhand der klinischen Beurteilung erfolgen und lokale Protokolle sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

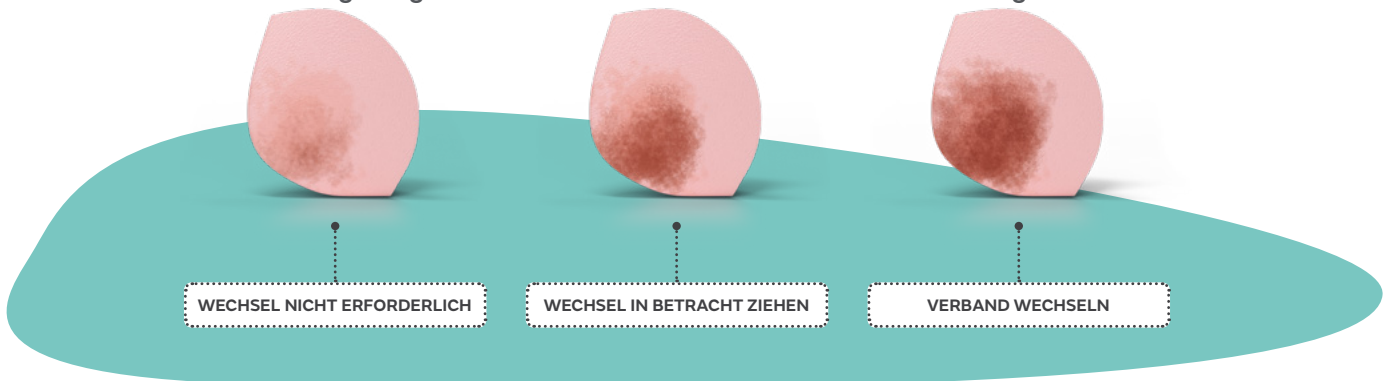

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66801121	10,5 cm x 13,5 cm	0968 6648	42 Stück (6 OP)	7 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

Kontakt Deutschland

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4, Haus 21
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.at

Kontakt Schweiz

Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.ch

◇Marke von Smith+Nephew
Alle Marken anerkannt
©Januar 2021 Smith+Nephew
AWM-AWC-26661 | GMC1253-de
Hersteller: Smith&Nephew Medical Ltd, 101
Hessle Rd, Hull HU3 2BN England
www.wundervoll-versorgt.de

Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichts- und Warnhinweise, entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts.

Referenzen

1. Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224–228. 2. Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community *British Journal of Nursing* 1994;3(20):1049–1050, 1052–1043. 3. Smith+Nephew 2018. Project Peridot Testing - ALLEVYN NON-ADHESIVE Dressings. Internal report. DS/18/264/R. 4. Franks PJ, Moody M, Moffatt CJ, et al. Randomised trial of two foam dressings in the management of chronic venous ulceration. *Wound Repair and Regeneration*. 2007;15(2):197–202.

*Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.