

+ Con un adhesivo seguro¹ cuando la seguridad es primordial y la retención del apósito es clave

Smith+Nephew

ALLEVYN[®] ADHESIVE
Apósito de espuma

Aplicación



1
Seleccione el tamaño del apósito adecuado, prepare y limpie la piel y el área perilesional.



2
Retire una parte del film protector del ALLEVYN ADHESIVE y coloque el lado adhesivo hacia la piel.



3
Retire el resto del film protector y alise el apósito sobre la piel sin estirar, asegurándose de que no queden pliegues. La almohadilla absorbente del apósito debe cubrir toda la superficie de la herida.


Las siguientes imágenes le indican cuándo **ALLEVYN ADHESIVE** debe ser cambiado:



NO ES NECESARIO CAMBIARLO



NO ES NECESARIO CAMBIARLO

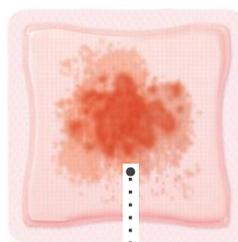

CAMBIE EL APÓSITO

Se puede mantener hasta 7 días (5 días en la región sacra), a menos que el exudado este a 0.5cm de la almohadilla absorbente o lo que suceda primero.

Tenga siempre en consideración el protocolo local de cambio de apósito

Retirada



Para retirar el apósito ALLEVYN ADHESIVE, levante uno de los bordes del apósito y retírelo lentamente hasta quitarlo completamente de la herida. El apósito sacro debe retirarse desde el borde superior y hacia el ano para minimizar la posibilidad de contaminación fecal.

Códigos ALLEVYN ADHESIVE

| Tamaño (cm) | Código S+N | Unidades |
|-----------------|------------|----------|
| 7.5cm x 7.5cm | 66000043 | 10 |
| 10cm x 10cm | 66000599 | 10 |
| 12.5cm x 12.5cm | 66000044 | 10 |
| 17.5cm x 17.5cm | 66000045 | 10 |
| 22.5cm x 22.5cm | 66000046 | 10 |
| 12.5cm x 12.5cm | 66000744 | 10 |



ALLEVYN Sacrum Apósito de espuma

| | | |
|-------------|----------|----|
| 17cm x 17cm | 66000700 | 10 |
| 22cm x 22cm | 66000451 | 10 |

Códigos ALLEVYN ADHESIVE financiados por el S.N.S

| Tamaño (cm) | Código S+N | Código nacional | Unidades |
|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 12.5cm x 12.5cm | 66000349 | 483313.3 | 3 |
| 15cm x 15cm | 66000777 | 491837.3 | 3 |

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) aplicables al producto antes de usarlo.

Referencias 1. Amione P, Ricci E, Topo F, et al. Comparison of Allevyn Adhesive and Biatain Adhesive in the management of pressure ulcers. Wound Care. 2005;14(8):365-370.

Smith & Nephew S.A.U, Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona T. +34 902 30 31 60, F. +34 902 30 31 70

www.smith-nephew.com/allevyn [®] Marca registrada de Smith+Nephew. Todas las marcas registradas y reconocidas ©Diciembre 2020

Smith+Nephew AWM-AWC 25199-es V1 ALLEVYN ADHESIVE Application sheet 1220