

治療開始

- 1 「電源ボタン」を2秒間押します(立ち上がりに約55秒かかります)。
- 2 「+」および「-」ボタンを押して所望の陰圧値に設定します。
- 3 「スタート/ストップボタン」を押すと治療を開始します。



ロックおよびロック解除

ロック	治療中にタッチスクリーンのロックを行なう場合は、「ロック/ロック解除ボタン」を2秒間押します。	
ロック解除	タッチスクリーンのロック解除を行なう場合は、「ロック/ロック解除ボタン」を2秒間押します。	
注意	治療中に5分間操作が無いとタッチスクリーンは自動的にロックされます。タッチスクリーンのロック中は画面が暗くなり、ステータスライトは治療中であることを示すため緑色に点灯し続けます。	

治療中の機器の位置

機器は直立の位置に設置してください。直立以外の位置に設置するとキャニスター内のフィルターに滲出液が接触し、閉塞アラームが生じることがあります。

- ・治療中は付属のストラップを使用してください。
- ・300mLキャニスター使用時はキャニスターのスタンドを使用することもできます。




RENASYS TOUCH

陰圧維持管理装置 アラームガイド


アラーム対処方法

アラーム発生時には、電子音が鳴り、アラーム画面(下図)が表示され、ステータスライトが黄色に表示されます。

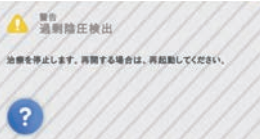

過剰陰圧検出アラーム

過度に高い陰圧(235mmHg以上)を検知した場合のアラームで、機器故障の疑いがあります。本品の電源を切り、再起動してください。

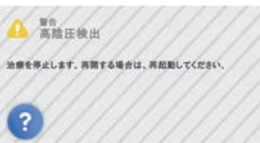

高陰圧検出アラーム

高陰圧(陰圧設定値よりも15mmHg高い)を検知した場合のアラームで、機器故障の疑いがあります。本品の電源を切り、再起動してください。



低陰圧検出アラーム

低陰圧(設定陰圧値よりも著しく低い)状態が60秒間続いた場合のアラームです。ヘルプメニューからトラブルシューティングを確認ください。



エアリーク検出アラーム

閾値以上のエアリークが45秒以上続いた場合のアラームです。ヘルプメニューからトラブルシューティングを確認ください。

アラーム対処方法

警告
閉塞検出

チューブまたはキャニスターが閉塞しています。

**閉塞検出アラーム**

一見キャニスターが満杯でない場合においても、キャニスター内のフィルターが滲出液で塞がれたり、キャニスターや管路内に閉塞が生じた場合にアラームが鳴ります。

ヘルプメニューからトラブルシューティングを確認ください。

警告
キャニスター満杯検出

キャニスターが満杯です。

**キャニスター満杯検出アラーム**

一見キャニスターが満杯でない場合においても、キャニスターがほぼ満杯の状態やキャニスター内のフィルターが滲出液で塞がれた場合にはアラームが鳴ります。

ヘルプメニューからトラブルシューティングを確認ください。

注意
バッテリー残量注意

コンセントに接続して充電してください。

**バッテリー残量注意**

バッテリーは約2時間の治療時間を残しています。

本品をすぐにコンセントに接続してください。

警告
バッテリー切れ

コンセントに接続して充電してください。

**バッテリー切れ**

バッテリーは約3分の治療時間しか残されていません。

本品をすぐにコンセントに接続してください。

警告
バッテリー異常

製造販売業者に連絡してください。コンセントに接続したまま治療を続けてください。

**バッテリー異常**

本品の内蔵バッテリーの充電ができない状態です。本品をコンセントに接続した場合にのみ、治療を継続することができます。バッテリー電源で本品を稼働できない場合は、製造販売業者に連絡してください。

警告
機器異常

製造販売業者に連絡してください。エラーコード: E01

**機器異常**

本品のハードウェアまたはソフトウェアのエラーが原因で、回復不能な不具合が発生している可能性があります。本品の電源を切り、再起動してください。再度アラームが鳴る場合は、エラーコードを書きとり、製造販売業者に連絡してください。

注意
治療停止中

画面または操作ボタンに触れて解除してください。

**治療停止中**

本品の電源を入れた後、15分以上操作が何も行われない場合に鳴ります。画面上のどこかにタッチしてアラームを解除してください。陰圧値を設定して治療を開始するか、治療を開始するまで電源を切ってください。

間欠モード

- 調整する設定を選択してハイライト表示します。
- 下げる(-)または上げる(+)アイコンを押して、設定陰圧値とサイクル時間を選択します。



設定

アラーム音量	小・中・大を選択してアラーム音量を調節します。 初期設定は、「大」に設定しています。
吸引度	設定陰圧値に到達するまでの時間を制御します。 低・中・高の3段階から選択できます。初期設定は、「高」に設定しています。 注) 吸引度を変更する場合は、必ず治療を止めてください。
モード変更	「医療従事者モード」、「患者モード」を選択します。 モード切替の場合はパスワード(3141)を入力します。 「患者モード」を選択すると、陰圧設定値、サイクル時間、治療モード、Yコネクタ設定などが使用できなくなります。
リークメーター	システム内のエアリーク量を視覚的に表示します。 著しいエアリークが検知されると目盛が黄色に変わります。

治療履歴

概要	1日当たりの稼働時間合計を棒グラフで表示します。
詳細	治療設定、アラーム、機器状況などの結果の履歴を表示します。

ヘルプメニュー

アラーム/ トラブルシューティング	各アラームの内容やトラブルシューティングを参照できます。
クイックリファレンス ガイド	機器の操作方法、ドレッシング交換などの使用頻度の高い項目を参照できます。

販売名:RENASYS 創傷治療システム 一般的名称:陰圧創傷治療システム
高度管理医療機器(クラスIII) JMDNコード:20395000
特定保守管理医療機器 承認番号:22400BZX00276000

使用方法・アラーム解除・故障などでお困りの場合
24時間コールセンター「レナシスダイヤル24」

0120-772750

24時間受付(年中無休)
※発注のお問い合わせは弊社営業所または販売代理店へお願いします。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

®Trademark of Smith+Nephew

© 2018-2023 Smith+Nephew