

様

退院後の創の管理について

退院前の画像

月 日

使っている・貼っているもの

カデックス® 軟膏
メロリン®

貼っている場所

足のキズ



交換する日、頻度

月 日 ()、日 ()、日 ()

※ 1週間に 回 交換

交換手順


はがし方



ガーゼをとめているテープを持って、はがします。



塗っていた薬が落ちるように石鹸で洗います。

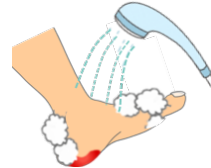

石鹸が残らないようにお湯で洗い流します。

洗い流した水分をガーゼなどでおし拭きします。

薬のつけ方



ガーゼの上に先生から指示された量の薬を出して延ばします。



キズの部分に薬が当たるようにガーゼをのせます。



ガーゼをテープでとめて固定します。

交換するときに確認してほしいこと

- キズから出る液が増えていませんか？
- キズの痛みが増していませんか？
- キズから出る液がにおいませんか？
- キズから血は出ていませんか？

病院に連絡してほしい状態



・キズの周りが赤い



・キズから液がたくさん出る



・キズが大きくなった

- ・痛み止めを飲んでもキズの痛みが治まらない
- ・キズから出る液がにおう
- ・キズから血がたくさん出る

連絡場所

電話番号

様

退院後の創の管理について

退院前の画像

月 日

使っている・貼っているもの

カデックス® 軟膏分包
メロリン®

貼っている場所

足のキズ



交換する日、頻度

月 日 ()、日 ()、日 ()

※ 1週間に 回 交換

交換手順

はがし方



メロリンをとめているテープをはがします。



塗っていた薬が落ちるように石鹸で洗います。



石鹸が残らないようにお湯で洗い流します。

洗い流した水分をガーゼなどでお拭きします。

薬のつけ方



薬を袋から取り出して、両側のメッシュをはがします。



切ったり丸めて、傷の大きさや形に合わせます。



形を整えた薬をキズにのせます。



薬をおおえるサイズのメロリンをのせてテープでとめます。

交換するときに確認してほしいこと

- キズから出る液が増えていませんか？
- キズの痛みが増していませんか？
- キズから出る液がにおいませんか？
- キズから血は出ていませんか？

病院に連絡してほしい状態



・キズの周りが赤い



・キズから液がたくさん出る



・キズが大きくなった

- ・痛み止めで飲んでもキズの痛みが治まらない
- ・キズから出る液がにおう
- ・キズから血がたくさん出る

連絡場所

電話番号