

+ ALLEVYN[◇] LIFE

Una guía para gestionar tus cuidados

Smith+Nephew



ALLEVYN[◇] LIFE

Apósito de espuma

CLOSER TO ZERO[◇] Te ayudamos a reducir el impacto humano y el coste económico de las heridas

smith-nephew.com/allevyn

He elegido el apósito **ALLEVYN^o LIFE** porque creo que es el mejor apósito para su herida. Al ser un paciente más activo, yo creo que podría beneficiarse de estar **un día más** sin tener que cambiar el apósito.

- **ALLEVYN LIFE** ha sido **diseñado con ayuda de enfermeras** y es utilizado por profesionales sanitarios alrededor del mundo con años de experiencia en el cuidado de las heridas
- Los apósitos duran más tiempo^{1*}, se pueden usar durante la ducha² y son cómodos^{3,4}.
- Sabrá cuando cambiar el apósito con un **indicador de cambio sencillo** en la parte superior del apósito.⁴
- El exceso de fluido **se enmascara discretamente**³, el apósito es acolchado para más confort.
- Ayuda a evitar posibles fugas, **bloquea** el olor para más tranquilidad.^{3,5,6}

Estas características significan que el apósito se puede dejar aplicado durante más tiempo, con el objetivo de darle al menos **un día más** entre los cambios de apósito. Esto significa tener más tiempo para hacer las cosas que quiere hacer en su vida diaria. .

Si tiene alguna preocupación o duda sobre el apósito, comuníquese conmigo o con algún otro integrante del equipo:

NOMBRE

TELEFONO:

Con ALLEVYN[®] LIFE el exceso de fluido de la herida es enmascarado³, al tiempo que ayuda a evitar posibles fugas y bloquea el olor^{3,5,6}.

Aquí hay una imagen útil para mostrarle cuando cambiar su apósito::



INDICADOR AL 0%

Todo está bien, no se preocupe por cambiar su apósito. El apósito puede permanecer aplicado, con el exudado enmascarado.



INDICADOR AL 50%

Todavía no es necesario cambiar el apósito, pero considere solicitar una visita con el profesional sanitario ya que los horarios y la disponibilidad pueden variar.



INDICADOR AL 75%

Es tiempo de cambiar el apósito. Contacte con el profesional sanitario para programar el cambio del apósito

Advanced Wound Management

Smith & Nephew S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4

08970 Sant Joan Despí,

Barcelona

T +34 902 30 31 60

F +34 902 30 31 70

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith+Nephew

Todas las marcas registradas

©Diciembre 2020 Smith+Nephew

AWM-AWC-23950-es V1 ALLEVYN

LIFE Patient card 0225

.....
* ALLEVYN^oLIFE puede usarse aproximadamente el doble de tiempo que los apósitos estándar. n=37; los apósitos duran 1.92x veces más que otros apósitos de espuma

Referencias: **1.** Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. J Wound Care. 2015 Jul;24(7):312, 314-7. **2.** Smith & Nephew 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life (HVT080). Internal Report. GMCA-DOF/08. **3.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK. 2013;9(4):91-95. **4.** Simon D, Biel A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. Wounds UK. 2014;10(3):80-87. **5.** Smith & Nephew 14 June 2012. Odour reducing properties of ALLEVYN Life. Internal Report. DS/12/127/DOF. **6.** Smith & Nephew 20 June 2016. A Randomised Cross-Over Clinical Evaluation to Compare Performance of ALLEVYN™ Life and Mepilex® Border Dressings on Patient Wellbeing-Related Endpoints. Internal Report. CE/047/ALF.