

La introducción del apósito de espuma ALLEVYN[®] LIFE en un entorno de atención primaria de cuidado de heridas redujo la frecuencia media de cambio de apósito y los costes semanales de los mismos, en comparación con los apósitos previos y fue muy bien valorado por los profesionales sanitarios

+ Puntos positivos

En comparación con los apósitos previos, el apósito ALLEVYN LIFE tuvo:




Resumen

- Audit de los recursos utilizados durante cuatro meses por dos centros de atención primaria de cuidado de heridas en Alemania tras la introducción del apósito ALLEVYN LIFE
 - Los profesionales sanitarios recibieron formación y educación sobre el producto antes de su uso
 - Se realizaron un máximo de cuatro cambios de apósito con ALLEVYN LIFE (140 cambios de apósito)
- En total se incluyeron 35 pacientes; la mayoría tenían >60 años (74.3%)
 - Se excluyeron cuatro pacientes debido a que faltaban datos sobre el tiempo de uso
 - Las heridas más frecuentes fueron úlceras de pie diabético (20.0%), úlceras de pierna de origen venoso (31.4%) y lesiones por presión (28.6%)
 - La mayoría de las heridas (>75%) eran <10cm²

Resultados

- En comparación con los apósitos previos, la introducción del apósito ALLEVYN LIFE ayudó a:
 - Reducir la frecuencia media semanal de cambios de apósito en 1.3 por semana (Figura)
 - Disminuir el coste medio semanal de los apósitos por herida en un 23% (de €45.81 a €35.46)
 - Simplificar y racionalizar posibles combinaciones de apósitos (de nueve a cuatro)
 - Aumentar el tiempo medio de uso en 0.46 días
- Los profesionales sanitarios calificaron el apósito ALLEVYN LIFE como mejor que los apósitos previos en cuanto a facilidad de uso (96.8%), adherencia (90.3%), tiempo de uso (90.3%) y desempeño general (96.8%) en 35 heridas. El 93.1% recomendaría su uso (para 27 de 29 heridas)
- En la mayoría de los pacientes se observó una disminución del tamaño de la herida, del nivel de exudado y del olor con el apósito ALLEVYN LIFE en comparación con los apósitos previos

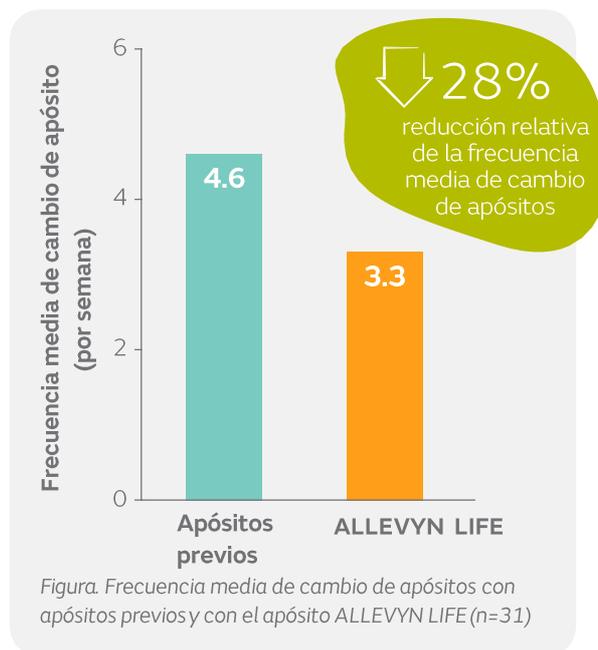

Conclusiones

La introducción de los apósitos ALLEVYN LIFE en un entorno de atención primaria de cuidado de heridas redujo la frecuencia media de cambio de apósitos y los costes de los mismos en comparación con los apósitos previos; la mayoría de los profesionales sanitarios lo valoraron mejor que los apósitos previos y recomendaron su uso.

Cita

*Krönert GT, Roth H, Searle RJ. Efficiency in wound care: The impact of introducing a new foam dressing in community practice. *EWMA Journal*. 2016;16(2):7-12.

Disponible en: [EWMA Journal](http://www.ewma-journal.com)

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de su uso.