

Anwendungsleitfaden

Der **INTRASITE[◊] CONFORMABLE** Hydrogel-Wundverband ist ein Vliesverband mit einem klaren, amorphen Hydrogel. Das Produkt erleichtert die Versorgung offener Wunden und passt sich dem Wundbett an.

Anlegen des INTRASITE[◊] CONFORMABLE Wundverbands



1 Reinigen Sie die Wunde mit steriler Kochsalzlösung



2 Die Wunde je nach Tiefe mit dem Verband locker füllen oder abdecken



3 Bei flachen Wunden mindestens zwei Lagen des Verbands aufbringen

4 Mit einem Sekundärverband abdecken, z. B. einem Film- oder absorbierenden Verband

Wechseln des INTRASITE[◊] CONFORMABLE Wundverbands



1 Verband vorsichtig mit einer Pinzette entfernen und die Wunde mit steriler Kochsalzlösung spülen



2 Überprüfen Sie, ob alle Verbände entfernt sind
3 Der Verband kann bis zu 3 Tagen auf der Wunde verbleiben

Bei Verwendung auf infizierten Wunden sollte die Infektion gemäß dem lokalen klinischen Protokoll behandelt werden.