

La medicazione in schiuma ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Heel ha dato prova di un'efficace gestione dell'essudato, comfort del paziente per il tempo di utilizzo e semplicità di rimozione in pazienti con ferite del tallone

Hampton, S. An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. *Br J Nurs.* 2010;19(6):S30–33.

Disponibile in: [British Journal of Nursing](#)

Punti salienti

 **100%**
percentuale ottenuta nella valutazione della gestione dell'essudato e nel comfort del paziente alla rimozione della medicazione (eccellente, ottima o buona)




Idonea su pazienti con **ferite del tallone** o ferite a rischio di macerazione

Overview

- Valutazione clinica non comparativa dell'utilizzo, dell'idoneità e delle caratteristiche della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER Heel nella gestione delle ferite del tallone
- I medici hanno valutato 20 pazienti adulti (età media 78,4 anni, il 70% dei quali di sesso femminile) con ferite del tallone presso sette centri nel Regno Unito
- Le medicazioni sono state applicate e sostituite in base alle esigenze dei pazienti e alla prassi standard in uso presso ogni centro
- La maggior parte delle ferite del tallone erano ulcere da decubito (80%)
- Il tempo medio di persistenza della ferita era 41,4 giorni, mentre l'area media della ferita era 13,1 cm²
- Più della metà dei pazienti presentava livelli di essudato moderati alla valutazione iniziale (55%), mentre in un paziente si registrava essudato abbondante (5%)

Risultati

- La capacità della medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER Heel di assorbire e trattenere l'essudato è stata giudicata dai medici eccellente, ottima o buona per tutti i pazienti
- Tutti i pazienti hanno giudicato il comfort al momento della rimozione della medicazione come buono, ottimo o eccellente
- Per i medici, la percentuale di pazienti con cute perilesionale sana è aumentata dal 25% alla valutazione iniziale al 70% per quella finale (Figura)
 - I casi in cui la cute perilesionale risultava infiammata (n = 2) e non sbiancante (n = 1) si sono risolti entro la fine dello studio
 - La cute perilesionale è stata classificata nella categoria "altro" al termine dello studio per due pazienti
- È stata riscontrata una correlazione fra la quantità di essudato trattenuto nella medicazione, il comfort del paziente durante il tempo di utilizzo e la capacità della medicazione di mantenersi in sede sulla cute senza staccarsi

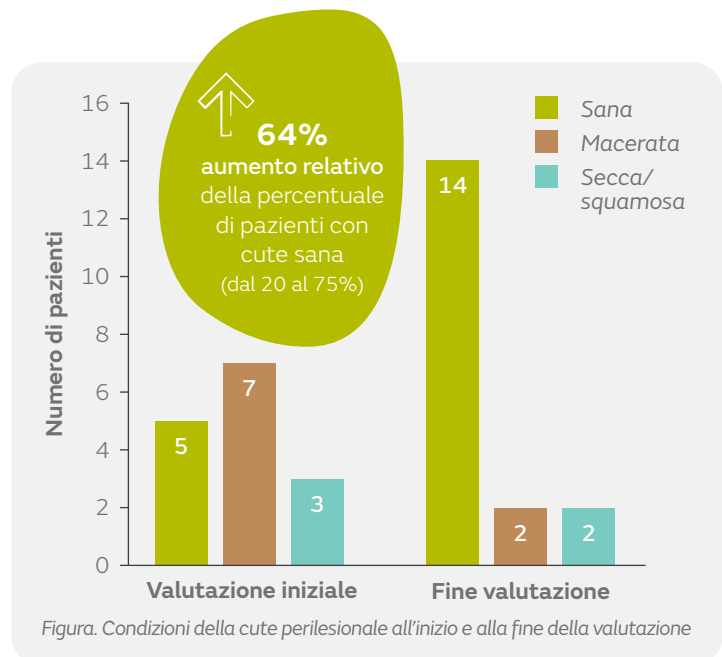

Conclusioni

La medicazione ALLEVYN GENTLE BORDER Heel è stata giudicata positivamente dai medici in termini di caratteristiche, comfort del paziente durante il tempo di utilizzo e dolore alla rimozione della medicazione, ed è risultata idonea al trattamento di pazienti con ferite del tallone o a rischio di macerazione.

Per informazioni dettagliate sui prodotti, comprese indicazioni d'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le Istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'impiego.