

# Smith+Nephew

医療品質のハイクオリティ絆創膏

## ハイドロ ジェントルエイド<sup>◇</sup>



全国の医療介護  
施設で採用\*  
\*2022年852施設

ひふの保護  
浅いキズに

### ふんわりパッド絆創膏



クッション性



高吸収



低刺激粘着  
貼り直し可能

# ハイドロ ジェントルエイド<sup>◇</sup>

一般医療機器 救急絆創膏  
届出番号:13B1X10222WC0016

製品番号	サイズ	パッド部サイズ	枚/箱	標準価格(税込)
66800833	5×5 cm	3×3 cm	10	¥1,958
66800834	7.5×7.5 cm	5×5 cm	10	¥2,398
66800835	10×10 cm	7.5×7.5 cm	10	¥2,959
66800840	15×15 cm	12.5×12.5 cm	10	¥6,644
66800836	5.5×12 cm	3×9.5 cm	10	¥2,871
66800837	8×15 cm	5.5×12.5 cm	10	¥4,400
66801012	10×20 cm	7.2×17.2 cm	10	¥5,346

使用目的又は効果

傷及び周囲皮膚の被覆及び保護

禁忌・禁止\*

再使用禁止 \*詳細は添付文書をご参照ください。

(実物大)

5×5 cm

5.5×12 cm



製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号

TEL.03-5403-8830

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

◇ Trademark of Smith+Nephew

©2019-2023 Smith+Nephew


HS-6

202401-4

## よくあるご質問

### Q. どのサイズを選べば良いですか？


**傷の周りの皮膚も十分に覆えるパッドサイズをご選択ください。**

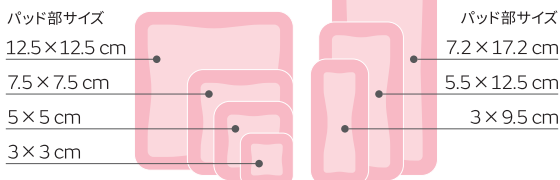

とくに滲出液が多い場合、小さいサイズでは吸収パッドも小さいため、交換が早まります。


### Q. 貼付中にシャワー浴はできますか？

**はがれにくい防水フィルムのため、シャワー浴程度であれば可能です。**

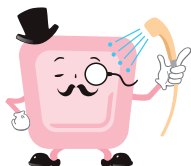

テープ部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

### Q. 何日ごとに交換したら良いですか？

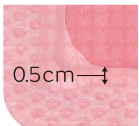


**滲出液がパッドの端から0.5cmまで到達した場合や、漏れ出した場合は交換してください。**

最長は7日間ですが、使用開始して初めの時期は、傷を観察する目的で早めの交換をお勧めします。

※吸収状態に関わらず7日間を限度に交換してください。

## 🤍痛みやわらぐふんわりパッド

傷にあたるパッド部分がスポンジ状です。  
クッション性のあるふんわりパッドが肌によく  
なじみ、傷を保護します。

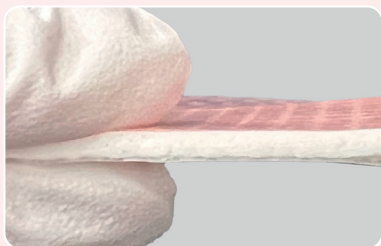


パッドが液を吸収、ゲル化しません  
(最長7日間使用可能\*).

\* 傷を観察し、滲出液の量に応じて  
適宜交換をしてください。

### イメージ図

傷から出た液を  
素早く蒸散

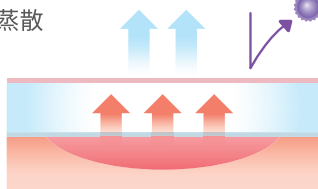

細菌の侵入を  
防ぎます

液を  
吸収・保持

### 使用例

すり傷・きり傷・刺し傷・かき傷・靴

足



靴ずれなど

膝



すり傷やかき傷など


脛



## 🤲 はがす時の痛みが少ない


低刺激粘着剤で、はがす時に感じる痛みが少なく\*、ししわになっても貼り直しができます。

\*感じ方には個人差があります。

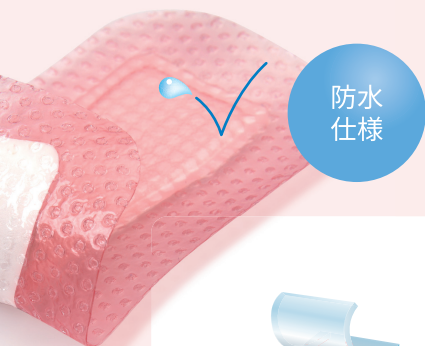


防水  
仕様


イメージ図

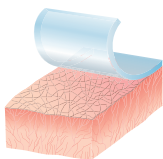

低刺激、低アレルギー性の  
シリコーンゲル粘着剤  
角質をはがしにくい

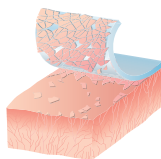

一般的な粘着剤

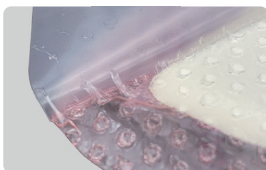

粘着が落ちにくい  
ため、シワになったり  
ズレた時に  
貼り直しができます。

ずれなどの浅い傷や**皮膚の保護**に使用いただけます。

腕



スキン-テアなど  
皮膚が弱くて裂けたり、  
めくれてできた傷

肘



すり傷など

尻



骨の出ている場所の  
皮膚の保護など

## 使用方法 ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

- 必要に応じて貼付部位の除毛をしてください。
- 貼付部を洗浄、または必要に応じて消毒します。  
消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように十分洗浄し余分な水分はよく拭き取ってください。



1 透明の裏紙をはがします。



2 粘着剤がついている  
パッド部分を傷にあて、  
残りの裏紙もはがします。



3 しわにならないように  
傷と周りの皮膚全体に  
密着させます。

※しわになった部分は、一度  
はがして貼り直しができます。

## はがし方



ジェントルエイドの隅を  
そっと持ち上げ、  
ゆっくりはがします。