


+ Guida all'applicazione - Sacrum

Smith+Nephew

Grazie alla loro struttura esclusiva, le medicazioni in schiuma ALLEVYN COMPLETE CARE aiutano a **ridurre al minimo le perdite***¹⁻³ e a **prevenire i fattori** che contribuiscono alle lesioni da pressione^{†4-7}

ALLEVYN[®]
COMPLETE CARE
Medicazione in schiuma

Step di applicazione della medicazione in schiuma per zona sacrale ALLEVYN COMPLETE CARE Sacrum

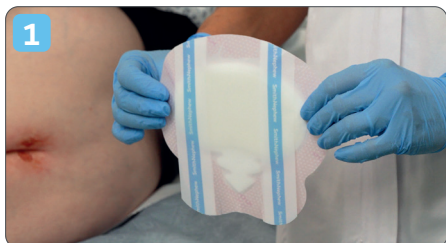

Selezionare la medicazione della misura appropriata, assicurandosi che il tampone assorbente copra interamente la ferita o l'area da proteggere. La scala centimetrata sulla busta è puramente indicativa.

Detergere il sito di applicazione. Assicurarsi che la cute perilesionale sia pulita, asciutta e priva di peluria in eccesso.



Staccare il primo supporto protettivo e applicare il lato adesivo della medicazione alla cute.



Posizionare l'estremità più stretta a una distanza minima di 2 cm dallo sfintere anale, quindi stendere la medicazione sopra il sacro.



Staccare i supporti protettivi rimanenti. Lasciare la medicazione. In caso di ferite, accertarsi che l'area sia interamente coperta dal tampone assorbente. Non tendere la medicazione.




Lisciare i bordi, verificando che non vi siano pieghe che potrebbero comprometterne la tenuta. La medicazione può essere riposizionata secondo necessità.




Applicazione completa: attenersi agli step osservazionali in caso di utilizzo per la prevenzione delle lesioni da pressione.

Medicazione a riposo

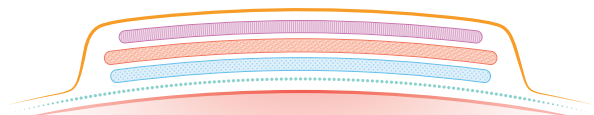

Medicazione sottoposta a forze di taglio

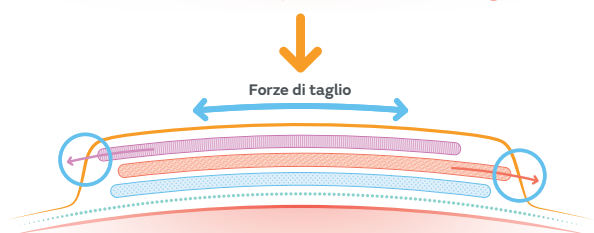


Tecnologia ShearDEFENSE® a strati indipendenti


- Il design brevettato a strati indipendenti consente agli strati di scorrere creando attrito all'interno della medicazione^{*4}

La medicazione ALLEVYN COMPLETE CARE maschera visivamente l'essudato assorbito, mantenendo un aspetto più gradevole per un periodo più lungo^{2,3,8-12} e indicando al contempo efficacemente il momento della sostituzione⁸


Ecco un diagramma utile per capire quando sostituire la medicazione

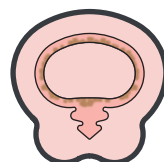

Sostituzione
non necessaria

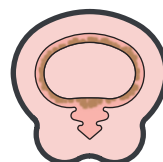

Considerare
il cambio

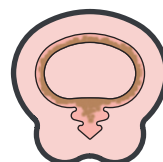


Sostituire

Rimozione



- Sollevare il bordo superiore e tirare lentamente la medicazione verso il basso, in direzione dell'ano, fino a rimuoverla completamente. In questo modo si ridurrà al minimo la possibilità di trasmettere infezioni.
- Smaltire secondo i protocolli clinici locali o gettare in modo igienico dopo l'uso.

Osservazione

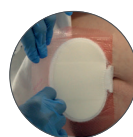

In caso di utilizzo per la prevenzione di lesioni da pressione, esaminare frequentemente la cute alla ricerca di eventuali danni da pressione. Sollevare un angolo all'indietro, ispezionare e riposizionare quindi la medicazione.

Dal momento che la disponibilità è soggetta alle pratiche mediche e/o normative dei singoli Paesi, i prodotti potrebbero non essere reperibili in tutti i mercati. Contattare il rappresentante o il distributore Smith+Nephew in caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Smith+Nephew nella propria zona. Per informazioni dettagliate sul prodotto, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'impiego.

*Come dimostrato in vitro. †Come dimostrato in silico e in vitro.

Riferimenti bibliografici: 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23-30. 3. Rossington A, et al. Wounds UK. 2013;9(4):91-95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Simon D, Bielby A. Wounds UK. 2014;10(3):80-87. 11. Joy H, et al. J Wound Care. 2015;24(7):312, 314-317. 12. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023.