


## + ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 3

Antimikrobielle Wundauflage

Anwendungshinweise

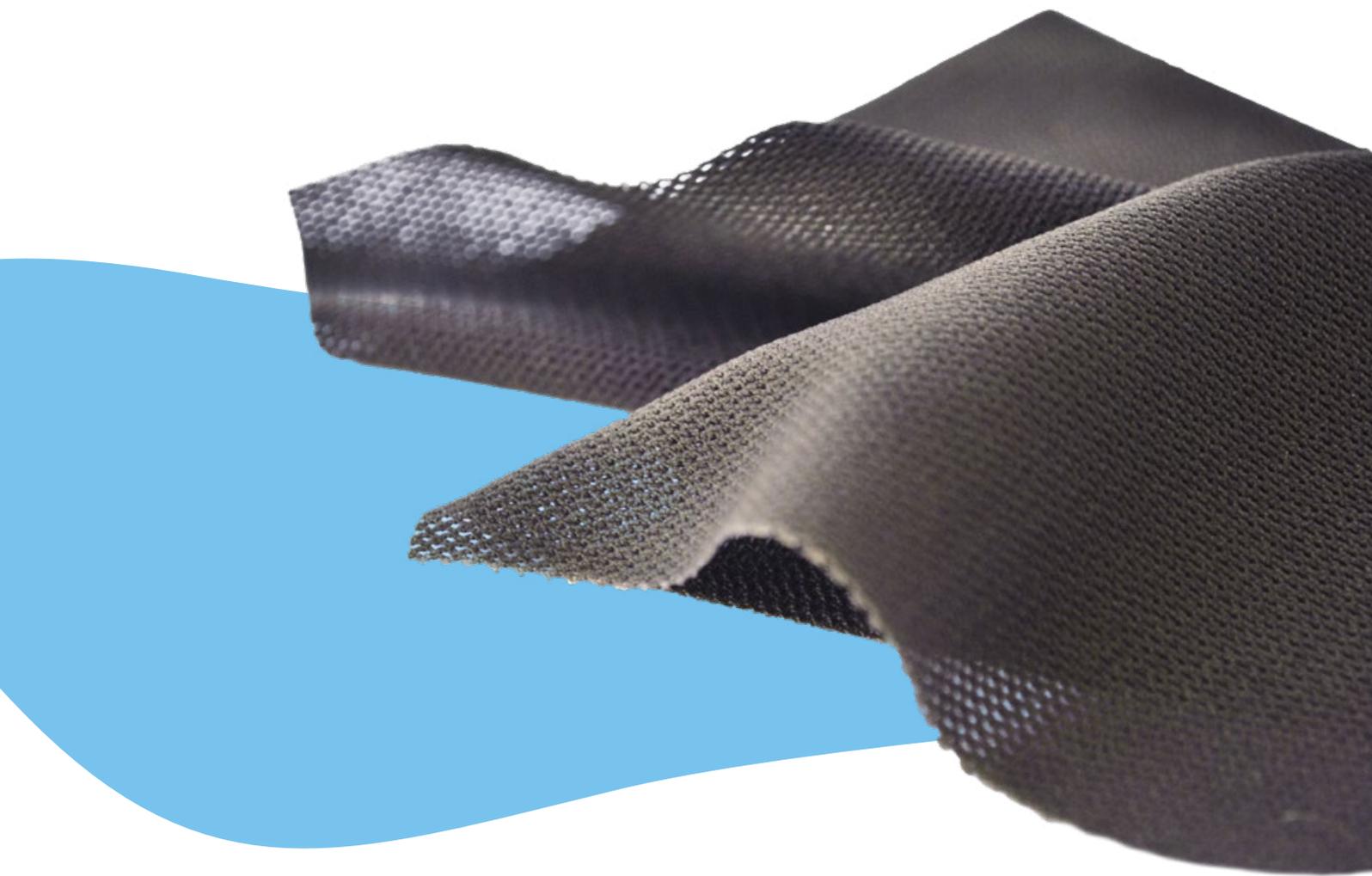

**Keine verzögerte Wundheilung –**  
wir möchten Sie dabei unterstützen,  
diesem Ziel nach Möglichkeit jeden  
Tag etwas näher zu kommen.

[www.closetozero.de](http://www.closetozero.de)

# + Indikationen und Vorteile

## Indikationen

- Der **ACTICOAT® FLEX 3** Verband ist als antimikrobieller Wundverband zur Anwendung bei Verbrennungen, Operationswunden, Druckgeschwüren, venösen Beingeschwüren und diabetischen Fußgeschwüren indiziert.
- Wenn **ACTICOAT® FLEX 3** bei infizierten Wunden verwendet wird, sollte die Infektion untersucht und gemäß den lokalen Protokollen behandelt werden.
- Der **ACTICOAT® FLEX 3** Verband kann in Kombination mit Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) für einen Zeitraum von bis zu drei Tagen verwendet werden.<sup>1-3</sup>
- Vor Anwendung des Produkts bitte stets die Gebrauchsanweisung beachten.
- Bei Verwendung mit NPWT ist das Wundfüllmaterial nach Anweisung des Herstellers anzufeuchten und zu wechseln.



## Vorteile



**Bakterizide Wirksamkeit schon nach 30 Minuten** mit langanhaltender Wirkung<sup>4-6</sup>



**Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien, inkl. MRSA, VRE**<sup>7,8</sup>



**Bakterizide Wirkung für 3 Tage**<sup>9</sup>



# + Anwendungshinweise



Die Wunde sollte gemäß den lokalen Protokollen gereinigt werden.  
**KEINE Kochsalzlösung verwenden.**

1. Den **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verband aseptisch aus der Verpackung nehmen.
2. Den Verband nach Bedarf zuschneiden. Bei Verwendung mit Kompressionstherapie muss der Verband auf die Größe der Wunde zurechtgeschnitten werden.



3. Den Verband gemäß den lokalen Protokollen befeuchten und dann behutsam ausdrücken (**KEINE Kochsalzlösung verwenden**). Vor der Anwendung überschüssiges Wasser ablaufen lassen.

Alternativ kann auch eine dünne Schicht eines Hydrogelprodukts, wie z. B. **INTRASITE<sup>®</sup> GEL**, direkt auf die Wunde und/oder auf den Verband aufgebracht werden.



4. Den **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verband, ohne diesen zu dehnen, mit einer beliebigen Seite nach oben auf die Wunde legen. Dabei darauf achten, dass der Verband keine Falten wirft. Der Verband sollte so angelegt werden, dass der dehnbare Teil entlang der Gliedmaße verläuft, damit der Patient diese bewegen kann.

Der **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verband kann zum Tamponieren von Wunden verwendet werden.



5. Den **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verband mithilfe eines geeigneten Sekundärverbands oder mittels Kompressions-therapie fixieren, damit eine feuchte Wundumgebung erhalten bleibt.

Bei stark exsudierenden Wunden sollte ein absorbierender Sekundärverband verwendet werden, z. B. **ALLEVYN<sup>®</sup>** Verbände. Der **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verband ermöglicht das Abfließen des Exsudats in den Sekundärverband. Den **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verband feucht halten – allerdings nicht zu feucht, um Mazeration zu vermeiden.



Den Verband je nach Menge an vorhandenem Exsudat und Zustand der Wunde wechseln.

Die antimikrobielle Wirkung des **ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3** Verbands bleibt bis zu 3 Tage lang erhalten.<sup>9</sup>

# + Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

## Vorsichtsmaßnahmen

- Nur zur äußeren Anwendung. Zum Beispiel darf der Verband nicht auf freiliegenden Organen angewendet werden.
- Der **ACTICOAT° FLEX 3** Verband ist nicht mit Produkten auf Ölbasis, wie Vaseline, kompatibel.
- Der **ACTICOAT° FLEX 3** Verband ist unter Umständen nicht mit topischen Antibiotika verträglich.
- Bei elektronischen Messungen, wie z. B. EEG und EKG, ist der Kontakt mit Elektroden oder Kontaktgels zu vermeiden.
- Die Anwendung von **ACTICOAT° FLEX 3** Verbänden kann ein vorübergehendes Kribbeln oder Brennen verursachen (**INTRASITE° GEL** hilft diese Symptome zu reduzieren). Sollte keine Besserung eintreten, den Verband entfernen.
- Der **ACTICOAT° FLEX 3** Verband ist ein für den einmaligen Gebrauch bestimmtes Produkt. Durch Öffnen der Verpackung des Verbands ist die Sterilität nicht mehr gegeben – daher sollten ungebrauchte Verbände nicht aufbewahrt oder weiterverwendet werden.



## Kontraindikationen

- Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Silber verwenden.
- Nicht bei Patienten während einer MRT (Magnetresonanztomographie) verwenden.
- Vor einer Bestrahlung muss der **ACTICOAT° FLEX 3** Verband entfernt werden. Nach jeder Behandlung kann ein neuer Verband angelegt werden.



Eine vollständige Liste der Vorsichtsmaßnahmen, Indikationen und Kontraindikationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

# + Bestellübersicht


## ACTICOAT<sup>◇</sup> FLEX 3



bis zu 3 Tage  
antimikrobiell  
wirksam

PZN*	Artikelnummer	Größe	Stück/Pack.
0537 2835	66800396	5 cm x 5 cm	5
0264 5787	66801290	4 cm x 15 cm	5
0537 2841	66800398	10 cm x 10 cm	5
0537 2858	66800399	10 cm x 10 cm	12
0537 2864	66800409	10 cm x 20 cm	12
0264 6634	66801291	4 cm x 25 cm	5
0264 6657	66801293	20 cm x 20 cm	5
0537 2870	66800419	20 cm x 40 cm	6
0264 6640	66801292	4 cm x 35 cm	5
0537 2887	66800432	40 cm x 40 cm	6
0537 2893	66800435	10 cm x 120 cm	6

\* Pharmazentralnummer; Erstattungsfähig

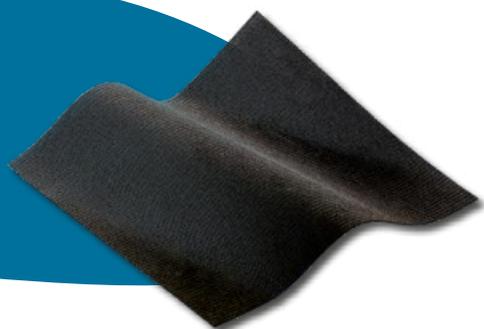

Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichts- und Warnhinweise entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts.

Wir stehen Medizinern und Pflegenden  
seit über 150 Jahren unterstützend zur Seite.

### Deutschland

Smith & Nephew GmbH  
Friesenweg 4/Haus 21  
22763 Hamburg  
T +49 (0) 40 8797 44-0  
F +49 (0) 40 8797 44-375  
[www.smith-nephew.de](http://www.smith-nephew.de)  
[info@smith-nephew.com](mailto:info@smith-nephew.com)

### Österreich

Smith & Nephew GmbH  
Concorde Business Park 1/3/C  
2320 Schwechat  
T +43 (0) 1 707 91-02  
F +43 (0) 1 707 91-01  
[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)  
[info.austria@smith-nephew.com](mailto:info.austria@smith-nephew.com)

### Schweiz

Smith & Nephew Schweiz AG  
Theilerstrasse 1A  
6300 Zug  
T +41 (0) 41 766 22-22  
F +41 (0) 41 766 22-94  
[www.smith-nephew.ch](http://www.smith-nephew.ch)  
[Info.CH@smith-nephew.com](mailto:Info.CH@smith-nephew.com)

### Referenzen

1. Smith+Nephew 2008. The antimicrobial activity of ACTICOAT<sup>®</sup> and ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3 while under negative pressure wound therapy. Interner Bericht. DOF 0810010.
2. Smith+Nephew 2009. Negative Pressure Wound Therapy Summary. Interne Erklärung.
3. Smith+Nephew 2009. Investigation into wound bed pressure under ACTICOAT<sup>®</sup> using an in vitro model. Interner Bericht. DS/09/019/R1.
4. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report 0810018, ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3 has antimicrobial activity in 30 minutes, Driffield K, October 2008.
5. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report 0810014, ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 7 has antimicrobial activity in 30 minutes, Driffield K, October 2008.
6. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report 1010014, Antimicrobial activity of ACTICOAT<sup>®</sup> 3, ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3, Suprasorb X +PHMB and Kendall AMD foam against bacteria and yeast commonly found in wounds over a 4 hour period, Lumb H, October 2010.
7. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report 0810016, Antimicrobial activity of ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3 against a broad spectrum of wound pathogens, Driffield K, October 2008.
8. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report 0810012, Antimicrobial activity of ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 7 against a broad spectrum of wound pathogens, Driffield K, October 2008.
9. Smith+Nephew 2008. Antimicrobial activity of ACTICOAT<sup>®</sup> FLEX 3 Dressings in a 3 day repeat challenge test. Interner Bericht. DOF 0810017.