

# + IV3000<sup>◇</sup> 10 x 12 cm

# Smith+Nephew

## IV3000<sup>◇</sup>

Kanülen- und Katheter-Fixierverband

Geeignet zur Fixierung von zentralvenösen, mehrlumigen (PICC-sowie Mid-Line-) Kathetern



### Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschließlich möglicher Wundnähte gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.

Dann orangen Abschnitt **1** vom Ende des Verbands entfernen, einschließlich der beiden sterilen Fixierstreifen und des Datumsetiketts




### Schritt 2

Die Streifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. Stabilisierung des Katheterlumens.



### Schritt 3

Ziehen Sie das mit **2** markierte Abdeckpapier ab.

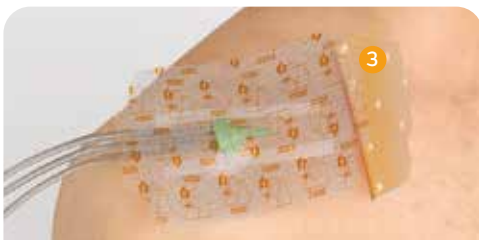

### Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.

Den Verband auf den Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.

Das mit **3** markierte Abdeckpapier entfernen.



### Schritt 5

Die mit **4** markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.

Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.



### Schritt 6

Nun das Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



### Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.



**Tipp:** Bitte beachten Sie bei der Applikation die aktuellen Hygieneanforderungen des Robert-Koch-Instituts. Die klebefreien Griffleisten von IV3000<sup>◇</sup> ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA<sup>®</sup> unseres sterilen, reizfreien Hautschutzprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an. Fixierstreifen sind individuell aufbringbar, die Abbildung ist ein Beispiel.

Dieses Poster ist hygienisch abwischbar

## Bestellinformation

Abbildung	Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)	Empfohlene Indikation
	4008	10cm x 12cm	0747 8176	400 Stück (8 OP)	50 Stück	Zentrale Katheter

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)\*

\* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

Wundmanagement Deutschland  
Smith & Nephew GmbH  
Friesenweg 4 / Haus 21  
D-22763 Hamburg

T +49 (0) 40 87 97 44 350  
F +49 (0) 40 87 97 44 375  
www.smith-nephew.de  
info@smith-nephew.com

© 2021 Smith & Nephew GmbH, <sup>◇</sup> Markenzeichen von Smith+Nephew  
AWM-AWC-18877; Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.