


+ Aplicación del kit de apósitos de esponja RENASYS[◇]-F con puerto blando

Smith+Nephew

Utilice técnicas limpias o asépticas para la aplicación, siguiendo el protocolo de su institución. La herida deberá limpiarse bien cada vez que se cambie el apósito.

RENASYS[◇]-F
Kit de apósitos de esponja
con puerto blando

Limpie y desbride

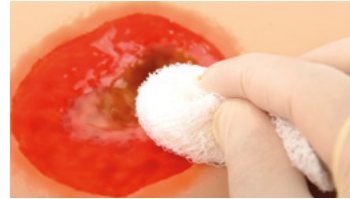

1. Desbride todo el tejido escarificado desvitalizado o necrótico que pueda haber. Limpie la herida y séquela aplicándole brevemente varias veces un paño.



2. Si lo desea, proteja la piel perilesional de la exposición a la humedad y el adhesivo utilizando un sellador cutáneo. Deje que el sellador cutáneo se seque por completo antes de colocar el film transparente.



3. Si se desea, puede aplicarse una capa de contacto con la herida no adherente. Recorte una sola capa de gasa no adherente y colóquela de un lado a otro del lecho de la herida.

Vende la herida con la esponja



4. Corte el apósito de esponja para adaptarlo al tamaño y la forma de la herida, y coloque la esponja cortada en la herida. Evite dejar el relleno demasiado apretado. La esponja debe llenar por completo la cavidad de la herida. En heridas profundas puede que sea necesario apilar trozos de esponja.



Precaución: Si son necesarios varias piezas de relleno de la herida para rellenar el perfil de la herida, cuente y anote cuántos piezas hay presentes para asegurarse de retirar todos ellos al cambiar el apósito y, así, reducir al mínimo el riesgo de retención y la posibilidad de infección. La esponja debe cortarse para que encaje holgadamente en el lecho de la herida. Para evitar dañar el tejido subyacente, no fuerce ni compacte con fuerza la esponja en ninguna zona de la herida.



No coloque esponja en túneles ciegos o no explorados. Si se presenta un túnel de profundidad conocida, corte un trozo de esponja más largo que el túnel, para asegurar el contacto directo con la esponja en la cavidad primaria de la herida. Para evitar que caigan fragmentos de esponja en la herida, no corte la esponja directamente sobre la cavidad de la herida. Tras el corte, retire los fragmentos de esponja sueltos frotando los bordes de la esponja para alejar estos de la herida abierta.



5. Mientras sostiene el film transparente, deje al descubierto un lado del revestimiento adhesivo retirando un solo panel, y aplique el revestimiento sobre la herida. Cubra el relleno de la herida con film transparente, retirando los paneles adhesivos restantes para sellar y, a continuación, retire el panel de estabilización superior.

Nota: Para reducir al mínimo la tensión o los traumatismos en la piel perilesional, evite estirar el film transparente y tirar de él.

Al utilizar varios trozos de film transparente, solape los bordes de este un mínimo de 7,5 cm.

Aplique el puerto blando RENASYS



6. Corte una abertura circular (de un diámetro no inferior a 2 cm) en el centro del film, sobre el relleno de la herida. Retire el film transparente suelto que pueda haber en la herida y deséchelo.



7. Retire el panel de revestimiento adhesivo del apósito con puerto blando RENASYS y alinéelo directamente sobre el orificio del film transparente. Presione ligeramente para fijar el puerto blando al film transparente.



8. Alise el apósito mientras retira el marco de estabilización del puerto blando RENASYS.



9. Fije el puerto blando RENASYS al paciente siguiendo el protocolo de su centro. Asegúrese de que el disco de aireación, situado cerca del conector de conexión rápida naranja, no quede cubierto ni ocluido de otra manera por el método utilizado para fijar el puerto blando.



10. Conecte el puerto blando RENASYS al tubo del recipiente presionando los conectores de conexión rápida naranja para unirlos. Un chasquido indicará que la conexión es firme. Active la bomba RENASYS asegurándose de que esté funcionando al nivel de terapia prescrito. Consulte el manual de la bomba RENASYS para obtener instrucciones de uso completas. El apósito acabado deberá quedar totalmente comprimido, ser firme al tacto y no presentar fugas.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas sus indicaciones de uso, contraindicaciones, efectos, precauciones, advertencias e información de seguridad importante, consulte las instrucciones de uso del producto antes de utilizarlo.

Advanced Wound Management
Smith & Nephew, Inc.
5600 Clearfork Main St.
Fort Worth, TX 76109

www.smith-nephew.com/wound
1-800-876-1261

◇ Marca comercial de Smith+Nephew
Todas las marcas registradas están reconocidas
©2020 Smith+Nephew
RNPE14-es-23768-0620